

Traumhaft **einfach, einfach** Amara View

Philips Respironics Mund-Nasen-Maske mit minimaler Kontaktfläche

Artikelnummernübersicht

Maskenkissen, Größe S

Artikelnummer: 1090692

Maskenkissen, Größe M

Artikelnummer: 1090693

Maskenkissen, Größe L

Artikelnummer: 1090694

Amara View-Schlauch und Anschlussstück

Artikelnummer: 1090689

Amara View-Anpassschablone

Artikelnummer: 1090699

Amara View-Kopfband, Standard

Artikelnummer: 1090697


Amara View-Kopfband, groß

Artikelnummer: 1090696

Quick-Clips für das Amara View-Kopfband

Artikelnummer: 1090698

(2 Stück pro Packung)

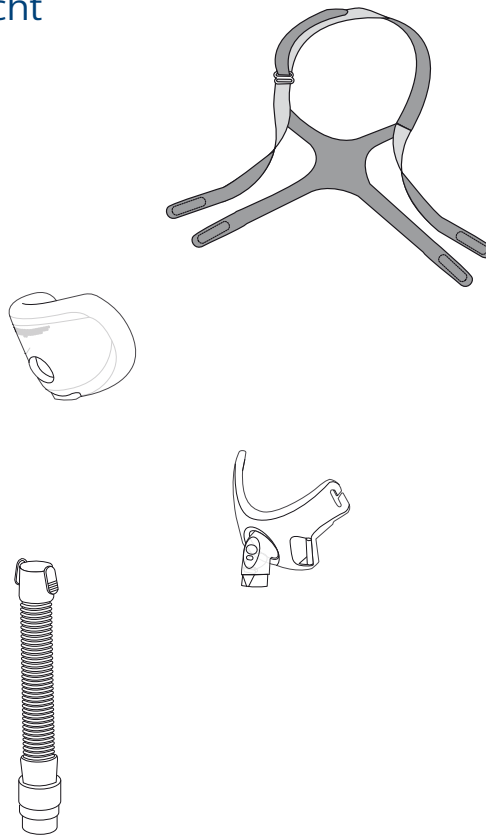

Bestellinformationen

Artikel	Artikelnr.
Amara View-Maske mit Ausatemventil und Kopfband	
Amara View-Maske, Größe S	1090602
Amara View-Maske, Größe M	1090603
Amara View-Maske, Größe L	1090604

Das innovative und einzigartige Design des Maskenkissens mit der Abdichtung schon unter der Nase verhindert Druckstellen sowie Beschwerden oder Reizungen auf dem Nasenrücken und ermöglicht dem Patienten ein größtmögliches Sichtfeld bei hoher Stabilität.

Auswahl der richtigen Größe für das „Unter-der-Nase“-Maskenkissen



- Im Gegensatz zu den meisten anderen Mund-Nasen-Masken wird die Maskenkissengröße für die Amara View anhand der gemessenen Nasentiefe bestimmt.
- Nutzen Sie für die schnelle und einfache Auswahl der richtigen Größe für das „Unter-der-Nase“-Maskenkissen die Anpassschablone.
- Halten Sie die Anpassschablone unter die Nase des Patienten, ohne dabei Druck auf die Wangen auszuüben. Die Position der Nasenspitze zeigt an, ob ein Maskenkissen in der Größe S, M oder L erforderlich ist.
- **Tipp:** Bei Patienten, deren Messung zwischen zwei Größen liegt, bitte immer die jeweils kleinere Größe wählen.

Anleitung zur Anpassung der Maske



1 Lösen Sie das Kopfband. Drehen Sie dazu die Kopfband-Clips heraus.

2

Wählen Sie ein Maskenkissen, das den Mund abdeckt und am Nasenende aufliegt.



3 Halten Sie die Maske leicht an das Gesicht und ziehen Sie das Kopfband um den Kopf.

4

Stellen Sie sicher, dass die Nase sich über (und nicht in) der Kissenöffnung für die Nasenlöcher befindet.



5 Drücken Sie die Kopfband-Clips zum Feststellen wieder hinein.

6

Ziehen Sie an den Laschen des Kopfbandes, um die oberen und unteren Bänder gleichmäßig einzustellen.



7 Stellen Sie das Scheitelband so ein, dass das Kopfband bequem sitzt. Die Anpassung des Riemens auf dem Kopf gibt mehr Stabilität und verhindert, dass die Maske verrutscht und Leckagen in Richtung Augen auftreten.

8

Schließen Sie die Maske an ein betriebsbereites CPAP-Gerät an. Heben Sie die Maske unter Druck noch einmal leicht vom Gesicht ab und ermöglichen Sie dem Maskenkissen sich aufzustellen. Nehmen Sie nun die letzte Feineinstellungen vor.



Weitere Informationen zur Anpassung der Maske finden Sie in den mitgelieferten Gebrauchsanweisungen der Maske. Ein größerer Maskenrahmen ist ebenfalls auf Anfrage erhältlich.