

2) 治療機器

- 治療機器新規追加及び患者への割り当て
- 治療機器情報編集
- 治療機器割り当て解除

3) 処方

- 処方作成 (医師のみ)
- 処方閲覧
- 処方変更 (医師のみ)

4) データカードユーティリティ

- SDカード内情報削除
- SDカードからの情報受信
- SDカードへの情報送信

(4) 患者リスト画面での患者検索

医療従事者は患者タブをクリックして、患者検索画面を表示する。
患者検索画面で患者名、またはすべての患者名を表示するアスタリスク (*) を入力して患者リストを表示させる。検索結果内の患者名をダブルクリックするとその患者の詳細画面が開く。

(5) 患者個別画面での患者情報確認

医療従事者は患者個別画面の患者プロフィールタブにて患者の各種情報を参照または編集する。

(6) 治療データ画面でのレポート確認

医療従事者は個別患者画面にて治療データタブをクリックして、レポートを確認する。レポートは、対象期間を指定しシステムプレートボタンで表示内容を選択することにより PDF ファイル形式で出力されるので、印刷又は電子データで保存する。

(7) 治療機器の処方変更が必要な場合

- 1) 医師は個別患者画面にて処方タブをクリックし、装置の処方パネルの編集をクリック。処方を変更後、保存ボタンをクリックする。
- 2) 医師は「カードに送信」ボタンをクリックし、データカードユーティリティ画面にて処方の書き込みボタンをクリックして SD カードに処方を書き込み、患者に手渡す。
- 3) 患者は医師から当該 SD カードを受け取った後、治療機器に挿入し、治療機器の処方 (設定パラメータ) を変更する。(患者による処方変更はできない)

併用機器 (本プログラムがサポートしている機器は以下のとおり)

販売名	承認番号	本プログラムへのデータ転送方法
レムスター PRI システム	22200BZX00875000	①又は②又は③
レムスターAuto PRI システム	22200BZX00874000	①又は②又は③
BiPAP エーバップス	22300BZX00382000	①
BiPAP Auto System One シリーズ	22400BZX00003000	①
BiPAP autoSV Advanced System One シリーズ	22500BZX00024000	①又は②
BiPAP A40 システム	22500BZX00130000	①又は②
REMstar Auto System One 60 シリーズ	22500BZX00268000	①又は②又は③
BiPAP Auto System One 60 シリーズ	22500BZX00448000	①又は②

REMstar Pro System One 60 シリーズ	22500BZX00477000	①又は②又は③
* BiPAP autoSV Advanced System One 60 シリーズ	22600BZX00073000	①又は②又は③
BiPAP A40 システム シルバーシリーズ	22600BZX00347000	①又は②
ドリームステーション Auto	22800BZX00007000	①又は③
ドリームステーション Pro	22800BZX00314000	①又は③
ドリームステーション BiPAP Auto	22800BZX00348000	①又は③
アンコールエニウェア	22800BZX00020000	VPN

- ①: SD カードを経由して本プログラムにデータを転送する
- ②: 有線又は無線でインターネット回線を経由してアンコールエニウェアにデータを転送し、本プログラムがアンコールエニウェアにアクセスすることでデータを取得する
- ③: 携帯電話の携帯電話回線を経由してアンコールエニウェアにデータを転送し、本プログラムがアンコールエニウェアにアクセスすることでデータを取得する

(8) ログアウト

医療従事者は、使用終了後にログアウトボタンをクリックし、ログアウトする。或いは、あらかじめ設定された一定時間操作されなかった場合、自動的にログアウトする。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 本プログラムは、治療機器で検出した気道閉塞性無呼吸イベントほか各種イベントを表示できるが、それらの情報のみで、患者の診断や治療を行わない。
- 医師は、SD カードに処方を作成する際に、確認スクリーンに示される情報を確認する。
- 患者が移動中等に SD カードを紛失または破損した場合、すみやかに医師に再処方を依頼するように、医師は患者に指導する。
- 本品は、医師との対面診療時期を決定する情報を提供するものではない。定期的に対面での診療を行う必要がある。
- 上記併用機器を使用して遠隔モニタリングが可能であっても、本品を用いて診断や自動解析はできない。定期的に、フォローアップのため、対面での診療を行う必要がある旨を医師は患者に指導する。
- その他、使用方法については本プログラムのヘルプ機能を参照する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: フィリップス・レスピロニクス合同会社

<緊急連絡先>

1. 平日 9:00~17:30

地域営業所・出張所・駐在

※地域営業所・出張所・駐在の連絡先は検索サイトより

「フィリップスレスピロニクス 営業所」でご検索下さい。

2. 平日 17:30 以降~翌 9:00、土・日曜日と祝祭日

機器安全センター 0120-633881

製造業者: Respironics, Inc.

レスピロニクス インク

アメリカ合衆国