

**PHILIPS**

在宅酸素療法



## シンプリーゴー ミニの使い方

※本書は取扱説明書にかわるものではありません。  
必ず正式な取扱説明書をご覧ください。

### ⚠ 火気からは2m以上離れてご使用ください。

酸素自体が爆発したり、燃えたりはしませんが、燃えているものをさらに燃えやすくする性質があります。

酸素吸入しながらたばこを吸うことは、健康面からも絶対にやめましょう。カニューレに引火することもあり、大変危険です。

シンプリーゴー ミニの使い方を動画でご覧いただけます。

<https://youtu.be/XOC4uWRjXFg>

スマートフォン・タブレットから、右のQRコードで  
動画にアクセスできます。



# 1 各部の名称

前面



患者  
カニューレ  
コネクタ



充電式バッテリ

背面




電源差込口  
(AC電源、DC電源)

コントロールパネル



ホームボタン

ホーム画面に  
アクセスします。

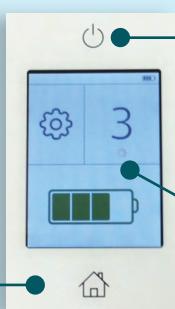

電源ボタン

装置のオンと  
オフを切り替  
えます。

ディスプレイ  
画面

付属品



ショルダー付き  
キャリーバッグ



アクセサリ  
バッグ



AC電源アダプタ  
AC電源コード



DC電源  
アダプタ

## 2 カニューレの使い方

### カニューレの接続

ご使用前にカニューレを患者カニューレコネクタに接続してください。




酸素フローが妨げられることのないよう、カニューレが挟まれたりねじれたりしていないことを確認してください。



### カニューレの装着

カニューレの方向を確認し、鼻孔に装着します。

左右の耳にカニューレをかけ、ストッパーを上げます。

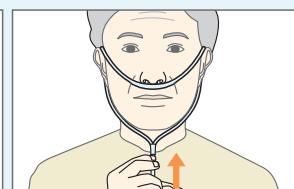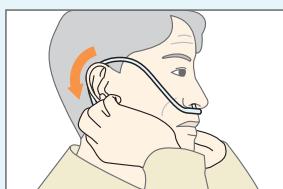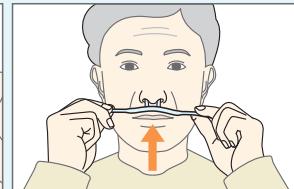


**注記：使用できるチューブの長さは最長3mです。**

**注記：カニューレは弊社指定の製品をご使用ください。**

### 3 電源のオン／オフ

#### 電源のオン


電源ボタン $\textcircled{\text{O}}$ を1回押して5秒以内にもう一度押します。  
下記のような画面が表示された後ホーム画面が表示されます。

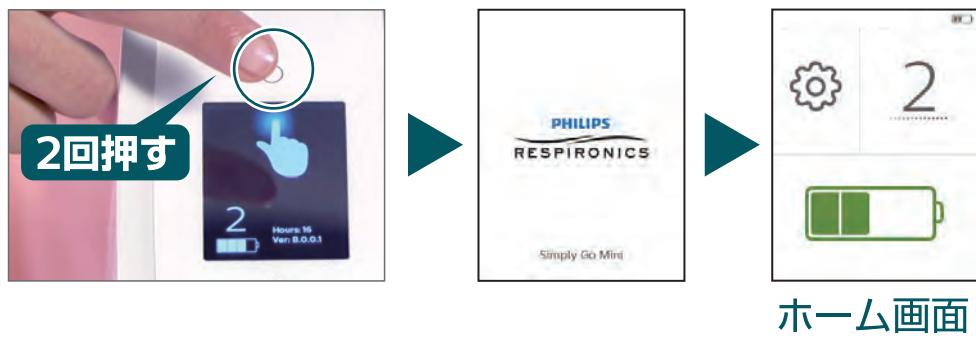

#### 電源のオフ


電源ボタン $\textcircled{\text{O}}$ を1回押します。  
右のような確認画面が表示されます。  
電源ボタンをもう1度押すと、オフになります。

**注記:** もう一度押さないと、  
ホーム画面に戻ります。

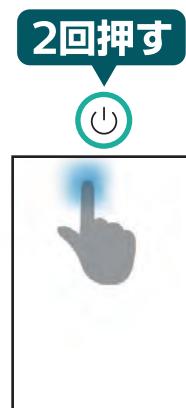

## 4 設定の表示と変更

ホーム画面には以下の項目が表示されます。

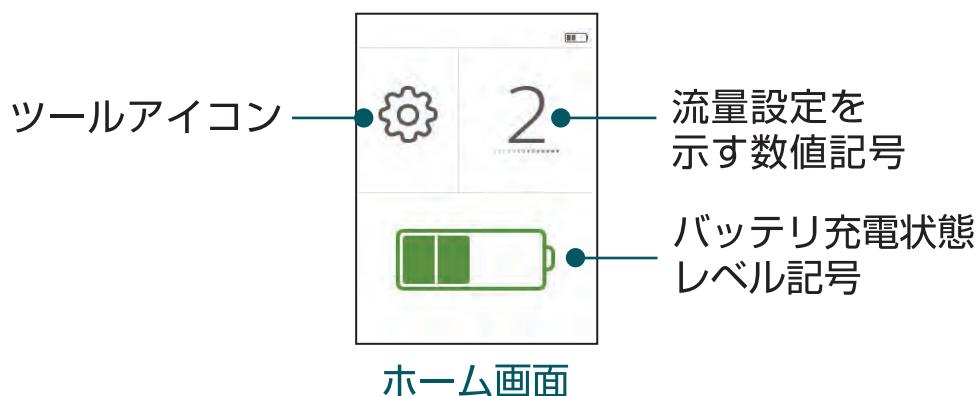

以下の記号がホーム画面に表示されます。


記号	説明
	<b>ツールアイコン</b> ツールメニューにアクセスできます。
	<b>パルス記号</b> 設定値の下に点線が表示され、呼吸の検出と酸素パルスの供給を示します。
	<b>ウォームアップ記号</b> システムが安定するまで表示されます (通常15分程度) 酸素は通常通り供給されます。
	<b>充電状態レベル</b> バッテリに残っている充電量を示します。

## 流量設定の変更

番号に触れて、設定画面にアクセスします。

[+] または [-] ボタンを押して、設定を1～5まで1つずつ調節してください。

**医師に指示された処方流量を守って設定してください。**

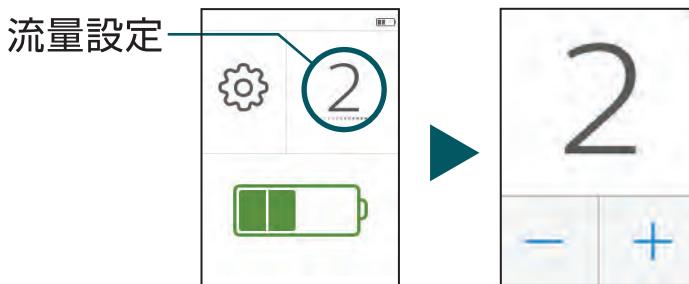

参考) 流量設定換算表


設 定	1	2	3	4	5
LPM 換算	0.7	1.3	2.0	2.6	3.0

\*呼吸数20回～40回の場合

\*I:E = 1:2で算出

## バッテリ容量の確認

バッテリ記号に触れて、以下のバッテリ情報画面にアクセスしてください。

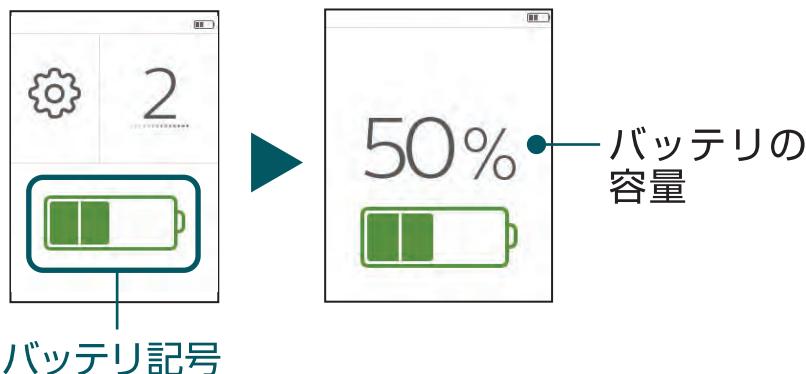

## 5 ご利用の前に

シンプリーゴー ミニは必ず標準バッテリまたは拡張バッテリ(オプション)を装着してご使用ください。



標準バッテリ



拡張バッテリ(オプション)

### 参考) バッテリ駆動時間

設定	1	2	3	4	5
標準バッテリ	6 時間	4 時間 30 分	3 時間	2 時間 15 分	2 時間
拡張バッテリ	12 時間	9 時間	6 時間	4 時間 30 分	4 時間

## バッテリの装着

本装置の電源がオフになっていることを確認してバッテリを本装置の下部に挿入してください。



## バッテリの取り出し

バッテリ中央にあるイジェクトボタンを押して取り出してください。



**注意：バッテリは電源がオフのときのみ取り外し、装置作動時は絶対に取り外さないでください。**

本装置を初めて使用する際は、事前にバッテリを一定時間連続して初期充電してください。



バッテリ	最低充電時間
標準バッテリ	<b>最低 3.5 時間</b>
拡張バッテリ	<b>最低 7 時間</b>

## バッテリの充電

AC電源アダプタの出力ケーブルを電源入力コネクタに接続し、電源コードおよび装置上の緑色の点を位置を合わせて接続してください。①

AC電源コードのプラグをACコンセントに接続します。充電が完了したら、AC電源アダプタを取り外してください。②

### 緑の点の位置を合わせて接続

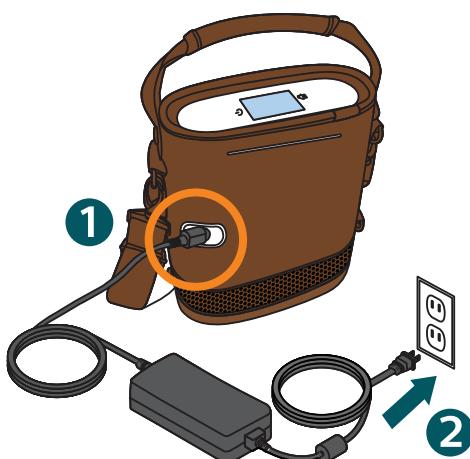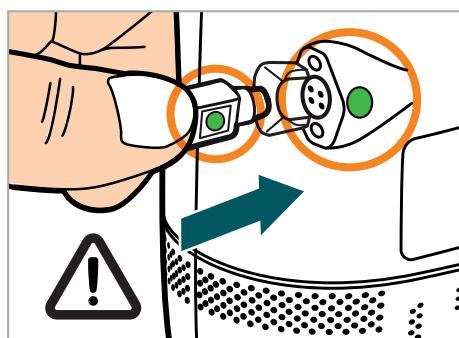

注記：装置をAC電源に接続するとすぐに、AC電源アダプタが緑色に点灯します。

# 6 お手入れ

## 本体、標準バッテリ又は拡張バッテリ

電源から外した後、家庭用中性洗剤を浸した湿った布で外面を拭き、水気を拭き取ってください。バッテリが取り外されている場合は、乾いた布でバッテリを拭いてください。



## AC／DC電源アダプタおよびコード

電源から外した後、家庭用中性洗剤を浸した湿った布でコードを拭き、水気を拭き取ってください。

## カニューレ

鼻に直接装着する部分は特に汚れがたまりやすい為、こまめに洗ってください。



# 7 トラブルシューティング

問題	考えられる原因	対応方法
装置がオンにならない	バッテリが切れている。	ACまたはDC電源コードを使用して装置を作動させ(バッテリを挿入した状態で)、バッテリの再充電を行ってください。 問題が解決しない場合、弊社または機器供給会社に連絡してください。
	バッテリが正しく装着されていない。	バッテリを取り外して、正しく装着し直してください。
	電源ボタンが2回押されていない。	電源ボタンを2回押してください。
装置が酸素供給を開始しない	電源がオンになっていない。	電源ボタンを2回押してください。
	カニューレチューブが曲がっている、またはねじれている。	チューブが酸素アウトレットポートに適切に接続されており、何も詰まっていないことを確認してください。
	装置の誤作動。	弊社または機器供給会社に連絡してください。
酸素の濃度が低い	装置がウォームアップ中である。	装置の使用を継続し、装置が指定の濃度の酸素を供給するまで、20分間お待ちください。この状態が続く場合、弊社または機器供給会社に連絡してください。
アラームが鳴る	装置の確認が必要。	個々のアラームとその対応策については取扱説明書「アラーム表示と画面記号」セクションを参照してください。
黄色のバッテリ状態インジケータが画面に表示される	バッテリが充電／放電の推奨サイクル数を超えているか、満充電容量が低下している。	弊社または機器供給会社に連絡して交換用バッテリを注文してください。
黄色のシープ状態インジケータが画面に表示される	装置の性能が低下しているか、バッテリ充電能力が低下していることが示されている。	弊社または機器供給会社にお問い合わせください。

# お問合せ

備品の購入や機器のトラブルなど、お問合せは以下にご連絡ください。お問合せの際は、お名前・ご利用の機器名・かかりつけ医療機関名・取扱業者名などを必ずお伝えください。

## 機器のトラブルは24時間対応、安心の技術サポート

平日9:00～17:30 地域営業所・出張所・駐在

全国営業所情報 <http://www.philips.co.jp/PRJ-Office>



### 夜間・土休日受付

営業所・出張所・駐在の  
対応日・対応時間外 受付

### 機器安全センター

0120-633-881

### かかりつけ医療機関名

製造販売業者

**フィリップス・レスピロニクス合同会社**

本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号フィリップスビル  
[www.philips.co.jp/healthcare](http://www.philips.co.jp/healthcare)

お問い合わせは地域の営業所・出張所・駐在まで

\*営業所・出張所・駐在の連絡先は以下のURLで公開しています

[www.philips.co.jp/PRJ-Office](http://www.philips.co.jp/PRJ-Office)



改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくはお近くの営業所までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、Philips、Respironics、またはその他の会社の商標または登録商標です。