

Un nuevo estándar. Una nueva opción.

Máscara nasal acolchada de gel Nuance Pro de Philips Respironics

Guía de ajuste de la máscara



1

Antes de colocarse la máscara, coloque los bordes de la almohadilla debajo de las fosas nasales. Elija el tamaño de almohadilla que quede cómoda debajo de su nariz, sin huecos.

Importante: no empuje la base de la almohadilla de gel dentro de las fosas nasales.



2

Estirando el armazón sobre la cabeza, sostenga con cuidado la almohadilla por debajo de la nariz. El armazón debe quedar extendido contra la nuca.



3

Coloque los bordes de la almohadilla dentro de las fosas nasales, de modo que queden cómodamente debajo de su nariz, sin huecos.



4

Ajuste la correa craneal superior de modo que el armazón quede justo por encima de sus orejas y no demasiado cerca de los ojos. El armazón debe quedar holgado y sentirse cómodo.



5

Ajuste las correas de los costados de manera uniforme tirando hacia arriba; las almohadillas de gel deben quedar por debajo de los pómulos. La máscara debe sentirse firme y cómoda en el rostro. No la ajuste demasiado.



6

Los últimos ajustes para que quede cómoda y ajustada se deben realizar mientras esté recostado y esté encendida la presión del dispositivo.

Nota: en caso de fugas excesivas, pruebe un tamaño alternativo de almohadilla.

Se pueden encontrar detalles adicionales sobre el ajuste en las instrucciones que vienen con la máscara.

Para obtener más información, por favor visite www.philips.com/respironics

Broudy MM 2/12/14 MCI 4106015

PHILIPS

RESPIRONICS

Un nuevo estándar. Una nueva opción.

Máscara nasal acolchada de gel Nuance de Philips Respironics

Guía de ajuste de la máscara



1

Antes de colocarse la máscara, coloque los bordes de la almohadilla debajo de las fosas nasales. Elija el tamaño de almohadilla que quede cómoda debajo de su nariz, sin huecos.

Importante: no empuje la base de la almohadilla de gel dentro de las fosas nasales.



2

Estirando el armazón sobre la cabeza, sostenga con cuidado la almohadilla por debajo de la nariz. El armazón debe quedar extendido contra la nuca.



3

Coloque los bordes de la almohadilla dentro de las fosas nasales, de modo que queden cómodamente debajo de su nariz, sin huecos.



4

Ajuste la correa craneal superior de modo que el armazón quede justo por encima de sus orejas y no demasiado cerca de los ojos. El armazón debe quedar holgado y sentirse cómodo.



5

Ajuste las correas de los costados de manera uniforme tirando hacia arriba; la máscara debe sentirse firme y cómoda en el rostro. No la ajuste demasiado.



6

Los últimos ajustes para que quede cómoda y ajustada se deben realizar mientras esté recostado y esté encendida la presión del dispositivo.

Nota: en caso de fugas excesivas, pruebe un tamaño alternativo de almohadilla.

Se pueden encontrar detalles adicionales sobre el ajuste en las instrucciones que vienen con la máscara. También hay disponible un marco más pequeño de tela, a pedido.

Para obtener más información, por favor visite www.philips.com/respironics

Broudy MM 2/12/14 MCI 4106015

PHILIPS

RESPIRONICS