

El rendimiento tiene un nuevo estilo

Wisp de Philips Respironics: máscara nasal de mínimo contacto

Guía de ajuste de la máscara



1

Antes de colocarse la máscara, desconecte los ganchos del soporte craneal girándolos hasta que queden fuera del marco.

Importante: utilice el indicador de tamaño de la máscara para seleccionar la almohadilla que se ajuste al ancho de su nariz sin que obstruya sus fosas nasales.



2

Mantenga con cuidado la almohadilla en su lugar sobre la nariz y tire el soporte craneal por sobre su cabeza.

Nota: el soporte craneal debe quedar extendido contra la parte trasera de su cabeza.



3

Manteniendo la máscara en su lugar, reconecte los ganchos apretándolos nuevamente contra el marco de la máscara.

Nota: si no desea usar los ganchos, las lengüetas del soporte craneal pueden insertarse en las ranuras del marco de la máscara.



4

Jale hacia atrás en las ranuras del soporte craneal para ajustar las correas inferiores y superiores del soporte craneal de manera pareja. La máscara debe permanecer cómodamente contra su rostro.

Importante: no las ajuste demasiado. El soporte craneal debe ajustarse sin apretar y debe ser cómodo.



5

Opcionalmente, puede deslizar el tubo de la máscara a través de la presilla de la corona del soporte craneal antes de enganchar el tubo del CPAP.

Nota: utilizar la presilla de la corona del soporte craneal puede ayudarlo a que algunas posiciones para dormir sean más cómodas.



6

Adopte diversas posiciones para dormir. Cambie de posición hasta sentirse cómodo. En caso de que haya fugas de aire excesivas, realice algunos ajustes finales mientras se encuentre acostado.

Nota: es normal que haya algunas fugas de aire. Ajuste las correas superiores del soporte craneal para disminuir las fugas alrededor de sus ojos.

Se pueden conseguir detalles adicionales sobre el ajuste en las instrucciones que acompañan a la máscara. También se encuentra disponible un soporte craneal más grande, a pedido.

Para obtener más información, visite www.philips.com/respironics

Broudy MM 2/20/14 MCI 4106003

PHILIPS

RESPIRONICS