




Instrucciones

1. Conexión de una cánula nasal a la salida de oxígeno.

- Conecte una cánula nasal (1).
- Coloque la cánula nasal y respire con normalidad por la nariz (2).

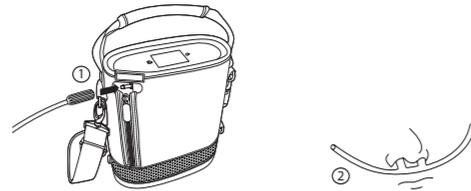

- Encienda el dispositivo de la forma descrita en el apartado siguiente.


Nota: El dispositivo funciona con un tubo de cánula de hasta 3 m.

2. Encendido y apagado de SimplyGo Mini

- Para encender el dispositivo, pulse dos veces en un plazo de 5 segundos.

Nota: El dispositivo se pondrá en marcha automáticamente con el ajuste de caudal de oxígeno que se estaba utilizando cuando se apagó por última vez.

- Pulse para apagar el dispositivo. Cuando aparezca una ventana de confirmación, púselo por segunda vez para apagar el dispositivo.

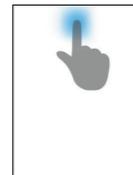

Nota: Si no pulsa el botón de encendido/apagado por segunda vez, se abrirá nuevamente la pantalla de inicio.

Configuración

1. Pantalla de inicio

La pantalla de inicio contiene los siguientes elementos:

Símbolos	Descripción
	Icono de herramienta para acceder al menú de herramientas
2	Símbolo numérico que representa el ajuste de flujo
	Símbolo del nivel de carga de la batería



2. Cambio del ajuste del flujo de oxígeno


- Toque el número de ajuste del flujo que aparece en la pantalla de inicio para acceder a la pantalla de ajustes de O₂.
- Pulse los botones + o - para aumentar o disminuir el ajuste de O₂ de 1 a 5 en incrementos de 1.



3. Comprobación del estado de la batería

- Toque el símbolo del nivel de carga de la batería en la pantalla de inicio para acceder a la pantalla de información sobre la batería.

El número de porcentaje de la batería y el símbolo del nivel de la batería indican el nivel de capacidad restante de la misma.

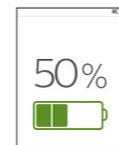


4. Acceso al menú de herramientas del dispositivo

Toque en la pantalla de inicio para acceder a los menús siguientes: información sobre la unidad, brillo, sonido de la pantalla táctil, registro de alarmas y selección de idioma.

Nota: Use < y > para desplazarse por los diferentes menús.

Menú de información sobre la unidad


- Pulse el icono de información para acceder al menú de información sobre la unidad.
- Pulse **▲** y **▼** para desplazarse por las diferentes pantallas de información.

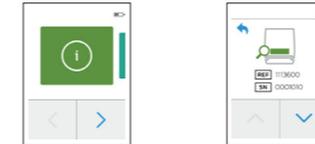

Nota: Vuelva a la pantalla anterior pulsando .


Menú de brillo de la unidad

- Pulse el icono de brillo para acceder al menú de brillo de la unidad.
- Pulse + y - para desplazarse por los ajustes y elija el nivel de brillo deseado.

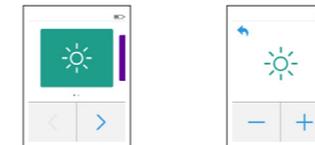


Menú de audio de la pantalla táctil

- Pulse el icono de audio para acceder al menú de audio de la pantalla táctil.
- Seleccione el icono superior para habilitar el audio de la pantalla táctil.
- Seleccione el icono inferior para silenciar el audio de la pantalla táctil.

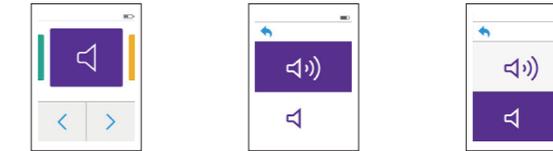


Menú del registro de alarmas

- Pulse el icono del registro de alarmas para acceder al menú del registro de alarmas.
- Pulse < y > para desplazarse por la lista de alarmas en el historial del registro.

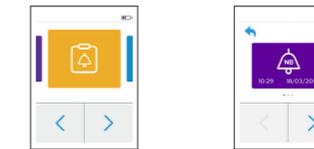

Menú de selección de idioma

- Pulse el icono selección de idioma para acceder al menú de selección de idioma.
- Pulse **▲** y **▼** para desplazarse por la lista de idiomas y elija el idioma deseado.
- Cuando se resalte el idioma, se abrirá la ventana de confirmación. Seleccione **✓** para confirmar la selección de idioma.
- Seleccione **✗** para cancelar la selección.


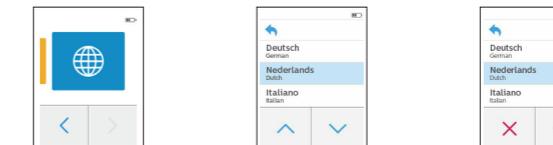


Guía de inicio rápido



Descripción general

- Botón de encendido/apagado** Solo enciende y apaga SimplyGo Mini.
- Panel de control** Interfaz de la pantalla táctil para controlar las funciones. Muestra información sobre el estado de funcionamiento y los ajustes del dispositivo.
- Pantalla de inicio** Abre la pantalla de inicio desde cualquier otra pantalla.
- Conector de la cánula** Punto de salida de oxígeno y de conexión de la cánula.
- Batería recargable** Batería recargable estándar o ampliada.
- Conector de entrada de alimentación** Punto de conexión para fuentes de alimentación externas: voltaje de línea de CA, suministro de CC en vehículo.

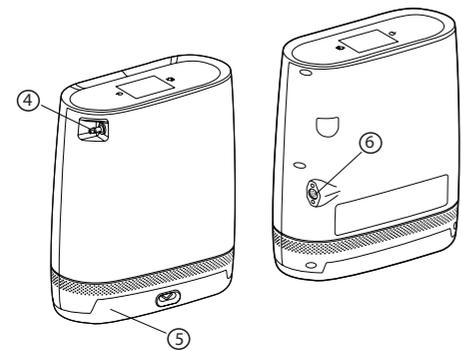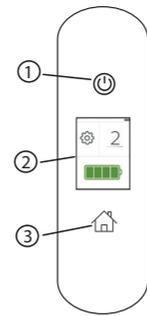


Para comenzar

Esta guía está indicada para ayudarle a usar el concentrador de oxígeno portátil SimplyGo Mini. Si tiene alguna duda que no quede resuelta con la información incluida esta guía, consulte el Manual del usuario del SimplyGo Mini o póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos.

1. Inserción de la batería dentro del dispositivo.

Use una batería estándar o una batería ampliada.

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado.
- Inserte la batería en la parte inferior del dispositivo (1).
- Para retirar la batería, presione el botón de expulsión, situado en el centro del compartimento para la batería. La batería quedará suelta (2).

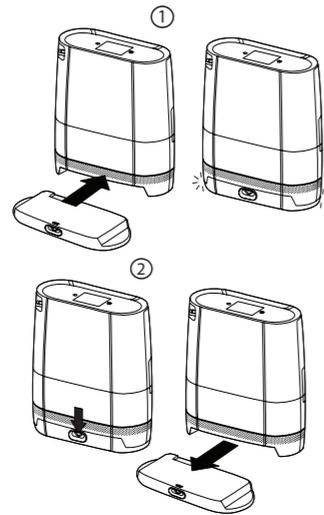


Importante: la primera vez que cargue la batería, asegúrese de cargarla por completo. No utilice el cable de alimentación de CC para la carga inicial; utilice alimentación de CA en su lugar.

2. Carga de la batería con la fuente de alimentación de CA.

Antes de utilizar este dispositivo por primera vez, es necesario cargar las baterías de SimplyGo Mini durante un período de carga ininterrumpido inicial.


Batería	Carga mínima
Estándar	3,5 horas como mínimo
Ampliada	7 horas como mínimo

- Conecte el cable de salida de la fuente de alimentación de CA al conector de entrada de alimentación del dispositivo SimplyGo Mini alineando los puntos verdes del cable de alimentación y el dispositivo (1).
- Conecte el conector del cable de alimentación de CA a una toma de CA (2).
- Desconecte la fuente de alimentación de CA cuando finalice la carga.

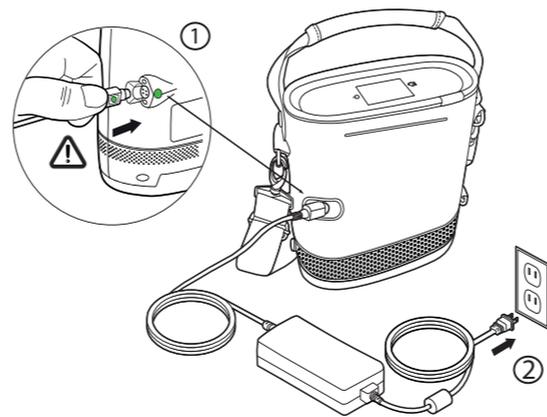

Precaución: retire la batería cuando el dispositivo esté apagado y nunca mientras el dispositivo esté en funcionamiento.

3. Uso de la bolsa portátil y la correa de hombro.

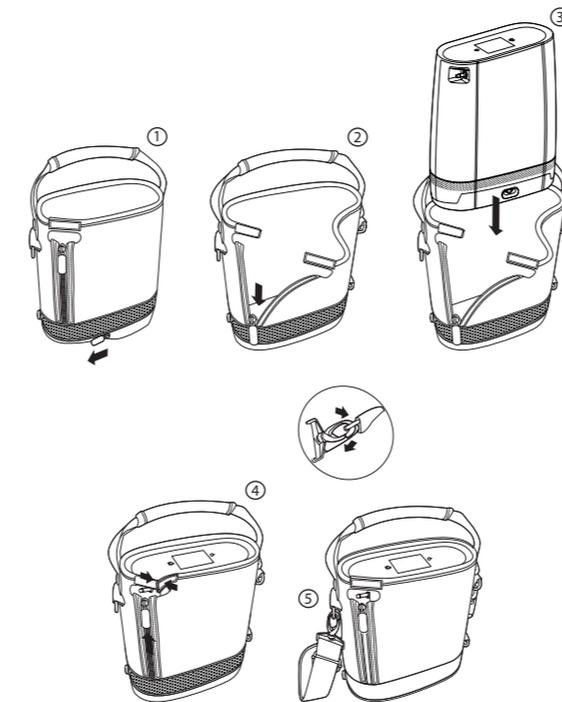

Mi proveedor

Compañía	_____
Dirección	_____
_____	_____
_____	_____
Teléfono	_____
Mi nombre de contacto	_____
Teléfono móvil	_____
Correo electrónico	_____
_____	_____

Mi prescripción

Paciente	_____
Médico	_____
Teléfono	_____
Correo electrónico	_____
_____	_____
Mi prescripción	_____
_____	_____
_____	_____



Accesorios del concentrador de oxígeno portátil SimplyGo Mini

Esta Guía de inicio rápido no se aplica a los siguientes accesorios de SimplyGo Mini, que se venden por separado:

- Cánula nasal estándar de una sola luz
- Mochila para SimplyGo Mini
- Cargador de batería y baterías opcionales

Póngase en contacto con su proveedor de servicios médicos para obtener más información sobre los accesorios de SimplyGo Mini.