


Nebulizador SideStream

Reusable

Reemplazelo luego de seis (6) meses de uso.

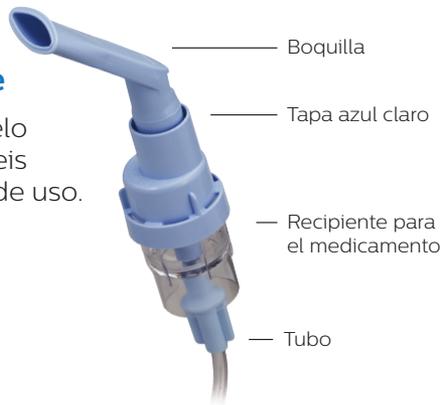


Desechable

Reemplazelo luego de dos (2) semanas de uso.




Antes de utilizar SideStream por primera vez, lea el folleto de instrucciones de uso.


Cómo utilizar el nebulizador SideStream

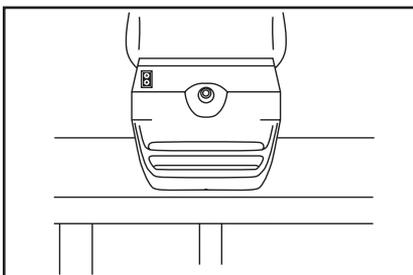


1. Coloque el compresor en una superficie sólida.

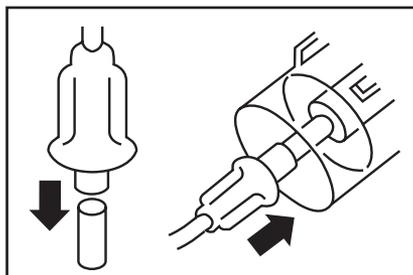


2. Conecte el tubo al compresor y al recipiente para el medicamento.

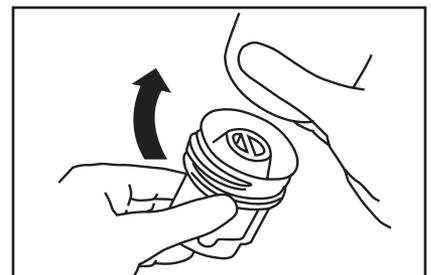

3. Desenrosque la tapa.

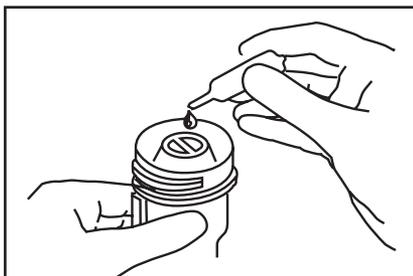


4. Llene el recipiente para el medicamento.

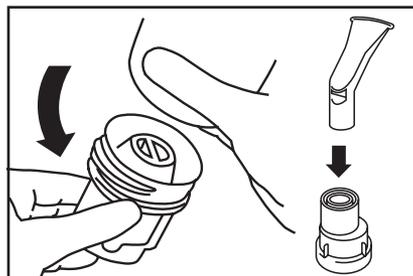


5. Vuelva a poner la tapa. Conecte la boquilla.




6. No incline el dispositivo SideStream.

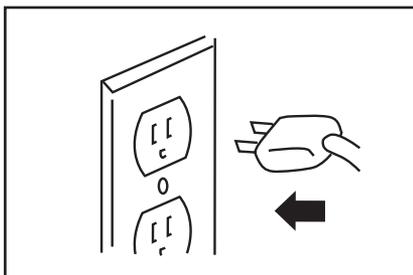

7. Conecte el compresor.

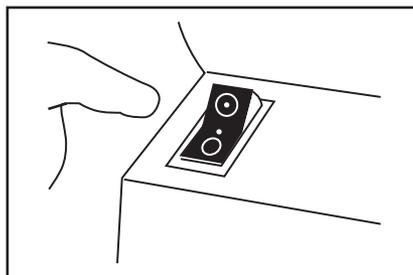


8. Encienda el interruptor.

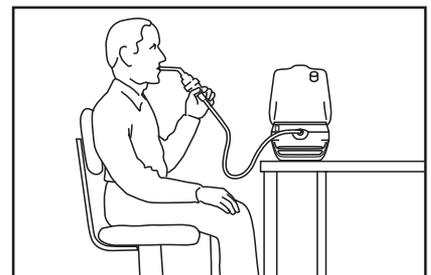


9. Siéntese erguido, relájese e inhale y exhale lentamente.


Si necesita utilizar una máscara SideStream para adultos o niños...

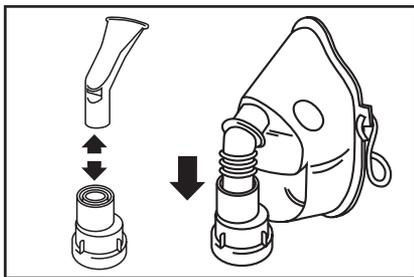

1. Reemplace la boquilla por una máscara con adaptador.

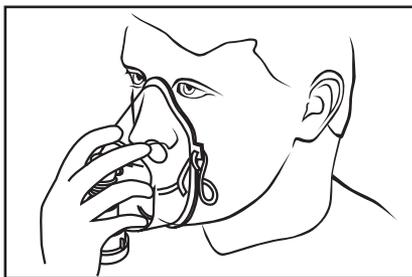


2. Coloque el elastico sobre la cabeza y ajústelo.

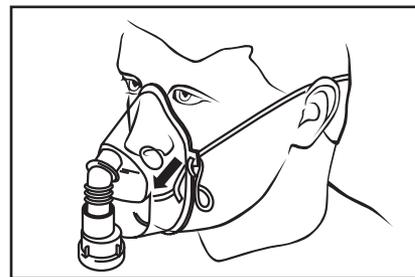


3. Coloque las correas sobre la cabeza y ajuste.

Instrucciones de limpieza


Después de cada uso (para SideStream reusable y desechable)...

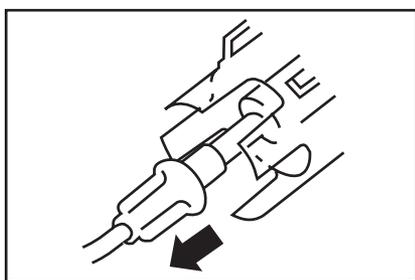

1. Desconecte la unidad del tubo.

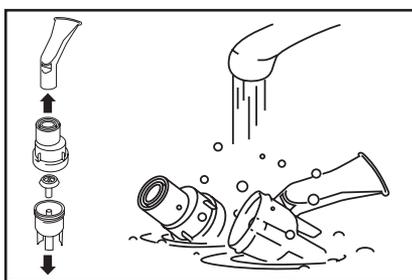


2. Desarme y lave todas las piezas con agua tibia y jabón (excepto el tubo).

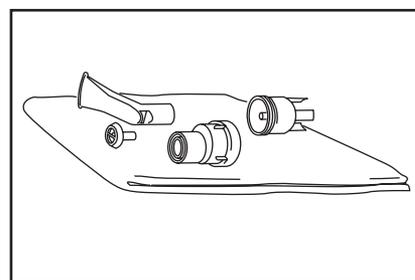


3. Enjuáguelas con agua limpia y séquelas al aire libre.


Una vez a la semana (solo para SideStream reusable)...

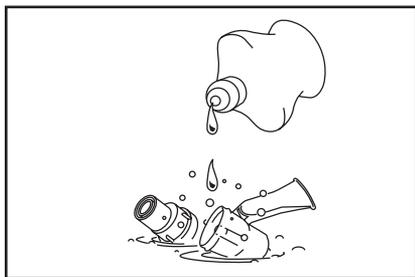

1. Coloque las piezas (excepto el tubo) en agua con 2 a 3 gotas de detergente líquido.

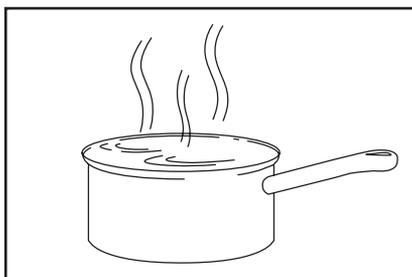

2. Hierva durante 10 minutos.

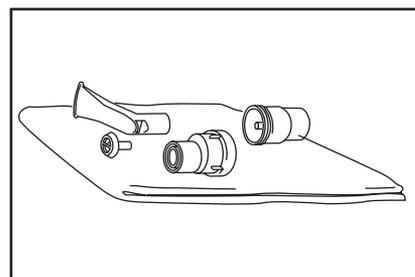

3. Enjuáguelas con agua limpia por 2 minutos y séquelas al aire.

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Reservados todos los derechos. Philips Healthcare se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones y/o a interrumpir la fabricación de cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones, y no se considera responsable de las consecuencias derivadas del uso de esta publicación. AVISO: La ley federal de EE.UU. limita la venta de estos dispositivos a médicos o bajo prescripción facultativa.



Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668
Servicios de atención al Cliente
+1 724 387 4000
+1 800 345 6443 (llamada gratuita, solo para EE. UU.)
www.philips.com/respironics
e-doc Luz AR 2/5/16 MCI 4107281