



Le ayuda a mantener el control

OptiChamber Diamond, cámara de inhalación antiestática con válvulas de inhalación y exhalación, y mascarillas de mínimo contacto LiteTouch

PHILIPS
RESPIRONICS




Cámara OptiChamber Diamond y mascarillas LiteTouch

La combinación de comodidad
y rendimiento

Las mascarillas LiteTouch se caracterizan por su suave almohadilla, y el diseño vacío que evita la presión en la cara, logrando mayor confort del paciente.


¿Por qué debo usar una cámara?

El medicamento que contiene el inhalador se expulsa a gran velocidad y puede terminar en la boca y la garganta. La cámara facilita la coordinación para que llegue mayor cantidad de medicamento a los pulmones, y así conseguir una dosis efectiva.

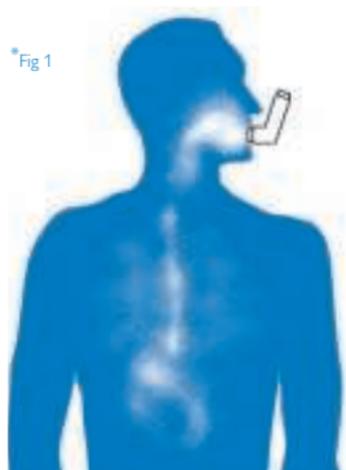

Si solo se utiliza un inhalador:

Sin coordinación el medicamento puede terminar en la boca, en la garganta y en el estómago, lo que podría originar efectos secundarios.

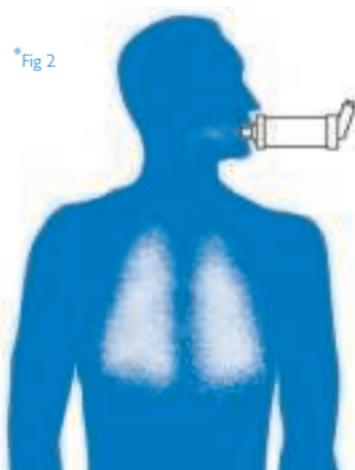

Si se utiliza un inhalador con una cámara de inhalación:

No es necesaria la coordinación del usuario para conseguir una dosis efectiva. Y existe una mayor deposición de medicamento en los pulmones.

¿Debo usar una mascarilla o una boquilla?

Los niños pequeños y los adultos que no puedan utilizar la boquilla deben usar una mascarilla, pero es conveniente cambiar a la boquilla tan pronto como sea posible. Simplemente retire la mascarilla LiteTouch y utilice la boquilla de la cámara. Si nota cualquier dificultad, puede volver a colocar la mascarilla.

* Fig 1 y 2. Adaptadas de Hirst, P.H. et al. 2001. Deposition and pharmacokinetics of an HFA formulation of Triamcinolone Acetonide delivered by pressurized metered dose inhaler. J. Aerosol Med. 14:155-165.

Consejos para un tratamiento eficaz:

- Agite siempre el inhalador antes de usarlo. Esto ayudará a mezclar el medicamento contenido en su interior.
- Si le recetan más de una dosis de la medicación, realice una sola inhalación cada vez.
- Cuando utilice la boquilla, inhale lentamente, realizando una respiración profunda.
- Una vez que haya inhalado el medicamento, contenga la respiración alrededor de 8 segundos.
- Cuando utilice la mascarilla para un correcto sellado, asegúrese de que esté bien apoyada en la cara sin huecos por los que pudiera entrar aire.
- Los niños deben dejar de usar la mascarilla tan pronto como les sea posible sellar los labios alrededor de la boquilla de la cámara.



¿Por qué elegir Opti-Chamber Diamond?

Está diseñada para ayudar a los pacientes a lograr un tratamiento efectivo.

Las válvulas de inhalación y exhalación se abren libremente incluso con tasas de flujo pediátricas bajas, lo cual permite al paciente respirar con facilidad a través de la cámara.

Características de la cámara Optichamber Diamond:

- **Válvulas de baja resistencia** – permiten respirar con facilidad a través de la cámara con una resistencia mínima, y controlar inhalación y exhalación.
- **Mascarillas desmontables LiteTouch** – sellan con un mínimo contacto y presión.
- **Cámara antiestática** – facilita un tratamiento inhalado con mayor deposición de fármaco.
- Totalmente desmontable para su limpieza

Puede utilizarla con cualquier medicamento en MDI (inhalador).

Consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.



Philips Healthcare
forma parte de
Royal Philips

Contacte con nosotros en
www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Asia

+49 7031 463 2254

Europa, Oriente Medio, África

+49 7031 463 2254

Latinoamérica

+55 11 2125 0744

Estados Unidos

+1 425 487 7000

800 285 5585

(toll free, US only)

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668 EE UU

Atención al cliente

+1 724 387 4000

Philips Respironics Argentina

+54 114 546 7777

Philips Respironics Colombia

+57 1 422 2600

01 8000 1110 10

Philips Respironics Iberia

+34 91 566 90 00

Philips Respironics Mexico

+52 15 269 9000

Respironics, OptiChamber y LiteTouch son marcas comerciales de Koninklijke Philips N.V. y empresas afiliadas. Reservados todos los derechos.

Visítenos en www.philips.es/respironics

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.



Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

MCI 4104918 PN448927