



Philips Amara View  
Fuld ansigtsmaske

**Pakke med én**  
Mellemstor pude  
med hovedtøj



HH1222

## Nyd udsigten

Med sit innovative design til under næsen giver Amara View et frit udsyn og forhindrer røde mærker, ubehag eller irritation af næseryggen

### **Innovativt design til under næsen**

- Komfort og ydelse

### **Frit synsfelt, så du kan bære briller og læse**

- Det bredeste synsfelt af alle førende fulde ansigtsmasker

### **Det mindste og letteste valg**

- Dækker mindre af ansigtet end nogen anden førende fuld ansigtsmaske

**PHILIPS**

Fuld ansigtsmaske  
Pakke med én Mellestor pude, med hovedtøj

## Specifikationer

### Innovativt design

- Frit synsfelt: Brug briller, læs eller se TV

### Design til under næsen

- Komfort og ydelse: Forhindrer røde mærker

### Design

- Støjsvag udånding: 360° roterende knæstykke
- Isserem: Nem justering

### Specifikationer

- Driftstryk: 4 - 20 cmH<sub>2</sub>O
- Lydtrykniveau: 24,2 dBA
- Antal dele: Fire
- Pudemateriale: Flydende silikonegummi
- Ramme-/knæstykke-/drejeledsmateriale: Polykarbonat
- Hovedtøjsspænde-/slangemateriale: Termoplastisk polyester-elastomer
- Hovedtøjsmateriale: Polyuretan, Nylon-Lycra

- Quick Release-funktionens materiale: Polyoxymetylen (acetal)
- Rengøringsinstruktioner: maske: Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, lad lufttørre
- Rengøring: hovedtøj, slanger: Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, hæng til tørre

### Kontraindikationer:

- Nylig øjenoperation, tørre øjne, hiatusbrok, alvorlig reflux
- Svækket hosterefleks: svækket hjerte-lukkemuskel

### Service

- Garanti: 90 dage

### Brugsformål

- Skal bruges på patienter > 30 kg; med CPAP-recept

HH1222/00

## Vigtigste nyheder

### Den mindste og letteste valgmulighed



Da den er mindre\* og lettere\*\* end traditionelle fulde ansigtsmasker, dækker Amara View mindre af patientens ansigt end tilsvarende masker og eliminerer den klodsede pude og ramme foran øjnene. \* Interne test: Arkivdata \*\* Omfatter ikke Amara Views Quick Release-slange

### Innovativt design



Forhindrer røde mærker, ubehag eller irritation på næseryggen

### Frit synsfelt



Det åbne design gør det nemt at bære briller, læse, se TV eller bruge en computer eller tablet, før du falder i søvn.



Udgivelsesdato  
2018-01-29

Version: 4.2.1

12 NC: 0000 010 90663

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)