




Philips DreamWear

### Starter-Pack

Frames in 3 formaten  
en kussentjes in 4 formaten

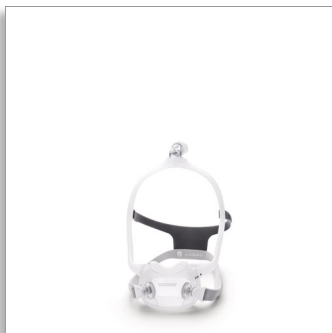

HH1133/00

## Alsof u helemaal niets draagt.\*

DreamWear Full Face biedt u vrijheid en comfort, zodat u kunt genieten van een goede nachtrust.

#### Magnetische klemmen

- De hoofdbandclips en het maskerkussen bevatten magneten

#### Innovatief ontwerp

- Onbeperkte bewegingsvrijheid
- Een modulair ontwerp voor meer opties

#### Zien wat u wilt

- Groot zichtveld dankzij het open ontwerp

#### Comfortabel en gebruiksvriendelijk

- Gebruiksvriendelijk
- Zacht, flexibel frame
- Full Face-kussen voor onder de neus



# PHILIPS

## Kenmerken

### Onbeperkte bewegingsvrijheid



Omdat de luchtslang naar de bovenkant van het hoofd is verplaatst, biedt DreamWear Full Face 's nachts meer bewegingsvrijheid. Gebruikers geven aan dat ze niet meer in een bepaalde positie moeten slapen wanneer ze DreamWear Full Face dragen.\*

### Nooit meer rode plekken op de neusbrug



Met het innovatieve ontwerp van het kussen voor onder de neus hebt u geen last meer van rode plekken, ongemak of irritatie op de neusbrug.\*\*

### Onbelemmerd zicht



Dankzij het open ontwerp kunt u eenvoudig een bril dragen, lezen, tv kijken en een computer of tablet gebruiken voordat u gaat slapen.\*\*

### Alsof u helemaal niets draagt



Het zachte, flexibele frame is comfortabel om 's nachts te dragen. Gebruikers geven aan dat het voelt alsof u helemaal niets draagt.\*

### Keuzevrijheid



Door het modulaire ontwerp kunnen gebruikers het kussen kiezen dat het best bij hen past, en dat alles op één frame.

### Gebruiksvriendelijk



Het bestaat slechts uit een paar onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten, uit elkaar te halen en schoon te maken.

### Magnetische klemmen

Neem contact op met uw zorgverlener voordat u het masker in gebruik neemt. Sommige medische apparaten worden beïnvloed door magnetische velden. De magnetische klemmen in dit masker moeten ten minste 50 mm van een actief medisch apparaat worden gehouden. Speciale aandacht is nodig bij geïmplanteerde apparaten zoals pacemakers, defibrillatoren en cochleaire implantaten. Lees de gebruiksaanwijzing in de verpakking voor meer informatie.

## Specificaties

### Waarschuwing: magnetische interferentie

- Pas op met pacemakers: Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik.

### Productgegevens

- Materiaal: Nylon, Polyurethaanschuim, Polycarbonaat, Polyester, Siliconen, Spandex
- Garantie: 90 dagen
- Drukbereik: 4 tot 30 cmH2O
- Geluidsniveau: 17 dBA
- Aantal onderdelen: 9

### Het masker reinigen

- Handmatig wassen met een mild reinigingsmiddel: Spoel grondig, laat aan de lucht drogen<sup>1</sup>

### Reinigen van de hoofdband en de slangen

- Handmatig wassen met een mild reinigingsmiddel: Spoel grondig, hang op om te drogen<sup>1</sup>

### Vervanging

- Controleer dagelijks op slijtage: Vervang bij de eerste tekenen van slijtage

### Beoogd gebruik

- Voor gebruik bij patiënten > 30 kg; met voorschrift voor CPAP



Publicatiedatum  
2018-07-21

Versie: 5.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Eventuele vergoeding van dit medische hulpmiddel is afhankelijk van uw zorgverzekering

\*\* Gegevensanalyse van een onderzoek naar patiëntvoorkeuren in augustus 2017, waarbij n = 85 en de voorgeschreven maskers Resmed Airfit F10 en F20, Respironics Amara View en F&P Simplus waren. Gebaseerd op 10 dagen gebruik.

\*\* Verklaring ontwerp - het masker is zodanig ontworpen dat het niet in contact komt met de neusbrug.

<sup>1</sup> Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer reinigingsinstructies.