

# Einfach träumen

## Leckagen-

Korrekturdrehknopf  
für eine weniger störende  
Feinjustierung der Maske

## Einrastende Kopfband-Clips

mit einstellbaren Laschen zur  
schnellen und einfachen Anpassung.

Clips 1104974

## Optionale Schlauchhülle

Schlaufe für die  
Schlauchpositionierung

Schlauch mit Schlauchhülle 1104977

## Kopfband mit Scheitelband

Kopfband 1104973

## Wisp Pädiatrie-Nasenmaske

Maske mit  
Ausatemventil 1104961

Packung mit 3 Maskenkissen-Größen (SC klein,  
SC mittel, SC groß), 1 Rahmen und 1 Kopfband.

## Maskenkissen-Design

Auto-Seal-Rillen-Technologie  
mit minimaler Kontaktfläche.

SC klein 1104969

SC mittel 1104970

SC groß 1104971

## Weicher Stoffrahmen

Rahmen 1104972

Das um  
**360°**  
drehbare Kniestück

bietet dem Kind  
Bewegungsfreiheit

SE-Kniestück 1104976

# Nützliche Tipps

Weitere Tipps für die Anpassung sowie Informationen zum Beheben von Leckagen oder zur Reinigung finden Sie in unseren Anleitungsvideos unter: [www.philips.de/schlaftherapie](http://www.philips.de/schlaftherapie)



- Vor der ersten Verwendung die gesamte Maske gemäß den in der Gebrauchsanweisung aufgeführten Pflege- und Reinigungsanweisungen von Hand waschen. Keine Feuchtigkeitscreme/Lotion auf das Gesicht des Kindes auftragen.
- Drei Maskenkissen Größen (SC klein, SC mittel, SC groß) sind erhältlich. Die Anpassschablone über die Nase des Kindes legen, um die Größe zu bestimmen.
- Der häufigste Fehler bei der Anpassung ist ein zu festes Anziehen des Kopfbands. Anzeichen für einen zu straffen Sitz sind z. B. Rötungen, Druckstellen oder Hautwülste an den Maskenrändern.

# Anleitung zur Anpassung

Im Handumdrehen die richtige Passform mit Wisp Pädiatrie finden. Befolgen Sie einfach die unten aufgeführten Anleitungen. Wählen Sie zuerst die richtige Maskenkissengröße aus. Es stehen drei Maskenkissen Größen zur Auswahl:



SCS (klein)




SCM (mittel)



SCL (groß)



1. Verwenden Sie die Anpassschablone, um das Maskenkissen auszuwählen, das zu der Nasenbreite des Kindes passt, ohne die Nasenlöcher zu blockieren.

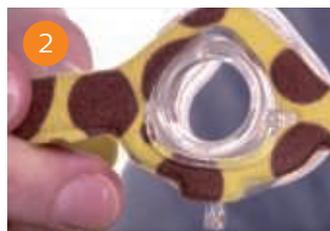

2. Befestigen Sie das Kissen an der Maske. Der Leckagen-Korrekturdrehknopf muss dabei nach unten zeigen.



3. Trennen Sie die Clips des Kopfbands, indem Sie sie aus dem Rahmen drehen.



4. Positionieren Sie das Maskenkissen mit nach unten zeigendem Leckagen-Korrekturdrehknopf auf der Nase des Kindes.



5. Ziehen Sie die Maskenhalterung über den Kopf des Kindes und drücken Sie die Clips wieder hinein, so dass sie einrasten.



6. Die Spitze des Maskenkissens sollte auf dem Nasenrücken liegen und die Nasenlöcher sollten nicht blockiert sein.



7. Passen Sie die oberen und unteren Laschen für einen angenehmen Sitz an. Stellen Sie das Scheitelband ein und achten Sie darauf, dass der Rahmen die Ohren nicht berührt.



8. Verbinden Sie den Schlauch der Wisp Pädiatrie und das Maskendrehgelenk mit der Vorderseite der Maske.

© 2016 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

[www.philips.de/respironics](http://www.philips.de/respironics)  
MCI 4107590 PN459691

