

PHILIPS

マスク

ドリームウェア フルフェイスマスク
DreamWear Fullface mask




マスク及び CPAP付属品の使い方

- ※ 本書は取扱説明書に代わるものではありません。
必ず添付文書および取扱説明書をご覧ください。
- ※ フィルタの交換・取り付けはご使用の機器を確認し、
裏面の「5.フィルタの取り付け方法」の項を参照しながら行ってください。
- ※ ご不明な点がございましたら、最終ページの連絡先までお問い合わせください。

ヘッドギアとマスクの名称

*呼気ポート付きマイクロエルボ、外気取入口（左右）および呼気ポートは塞がないでください。

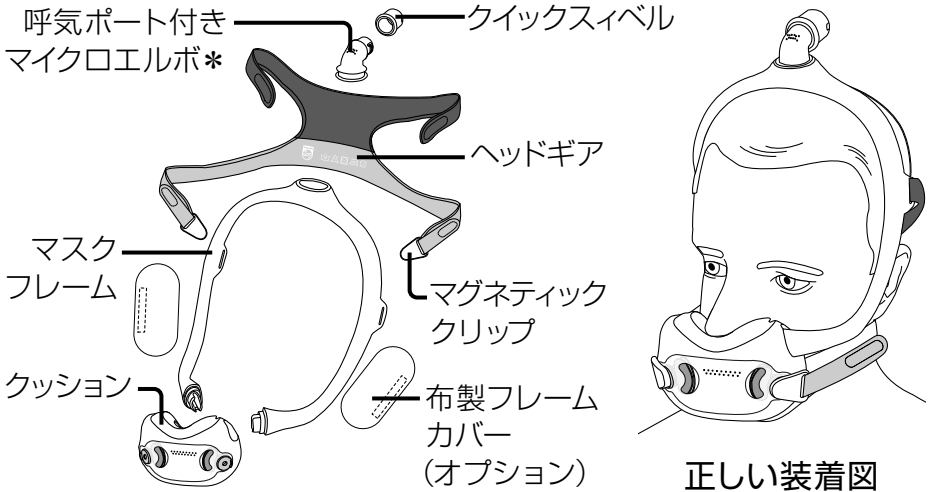

1 マスク装着の手順 (1)

マスクを組み立て、クッションを鼻の下に当てます。
フレームを頭の上に配置します。



1 マスク装着の手順 (2)

ヘッドギアを後頭部にかかるように取り付けます。呼気ポート付きエルボが頭頂部に来ていることを確認してください。



マグネティッククリップをマスクのクッションに取り付けます。ヘッドギアのタブをはがし、締めすぎないように注意しながら長さを調整します。





マスクを取り外す際は、クッションをつかみ、鼻から前方に引き離してマグネット式クリップを外します。次に、クッションとマスクを引き上げて頭から外します。



2 トラブルと対処法



マスクが頬に食い込んでいる場合

ヘッドギアを締めすぎていませんか？
ヘッドギアと頬の間に指が1本入る
程度に緩めます。

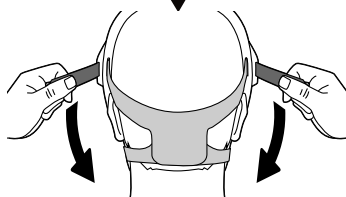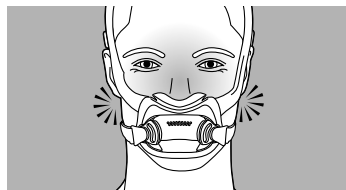



マスクフレームが耳にかぶる場合

マスクフレームが後方に傾き、
耳にかぶる場合は、より小さいサイズ
のマスクフレームをおすすめします。

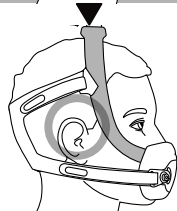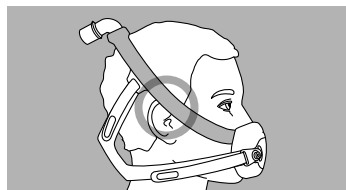

マスクフレームが目付近に近すぎる場合

マスクフレームが頭の前方に傾き、
目に近すぎる場合は、より大きい
サイズのマスクフレームをおすすめ
します。

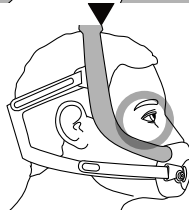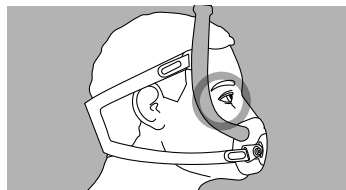

3





マスクの分解／組み立て

部品名	分解	組み立て
ヘッドギア	<p>ヘッドギアタブを外し、マグネティッククリップを回して取り外します。</p>	<p>ヘッドギアをマスクフレームのスロットに通します。</p>
		
クッション	<p>クッションをマスクフレームから取り外します。</p>	<p>所定の位置に「カチッ」とはまるまでマスクフレームに差し込みます</p>
		
<p>呼気ポート 付き マイクロ エルボ</p>	<p>マスクフレームから呼気ポート付きマイクロエルボを取り外します。</p>	<p>マスクフレーム上部に、ななめから溝に合わせて差し込みます。</p>
		

4

付属品のお手入れ方法

(呼吸回路、水タンク、花粉フィルタはマスクの付属品ではありません)

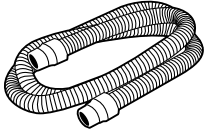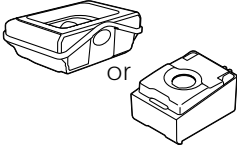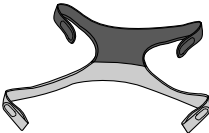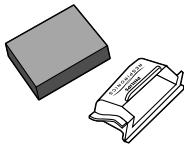頻度	付属品名	洗浄方法・交換
毎日	 マスク・呼吸回路	中性洗剤をうすめたぬるま湯で、洗います。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。
	 水タンク	中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水ですすぎます。乾いた布などで水気を拭き取り陰干しします。
1週間	 ヘッドギア	マスクからはずして中性洗剤をうすめたぬるま湯にひたし、5分間おきます。
2週間	 花粉フィルタ	必ず乾いた花粉フィルタと交換します。使用後は中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水でよくすすいだあと風通しのよい所で陰干しします。



付属品（マスク・回路など）のお手入れをする際は、以下のことをお守りください。

- ベンジン、アルコール、塩素系洗剤は使用しない。
- 日当りの良い場所で干さない。


5

フィルタの取り付け方法



ドリーム
ステーション

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際は
右図の順でセットします。

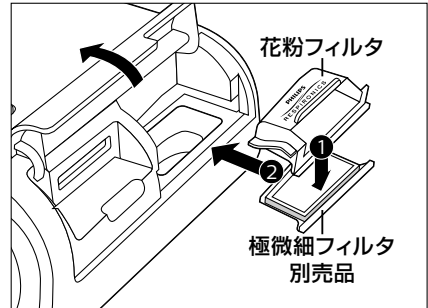

ドリームステーションの取り扱い方法を解説した動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから


各端末から右記のQRコードを
読み取り動画へアクセス



パソコンから


フリックス・レスピロニクス

ページ下部の「一般の方：お使いの製品について」→「Dream Family」へアクセス

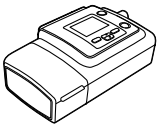


BiPAP A40システム
シルバーシリーズ


古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際は
右図の順でセットします。

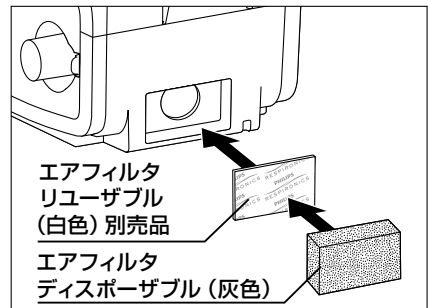

トリロジーplus
シリーズ

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際は
右図の順でセットします。

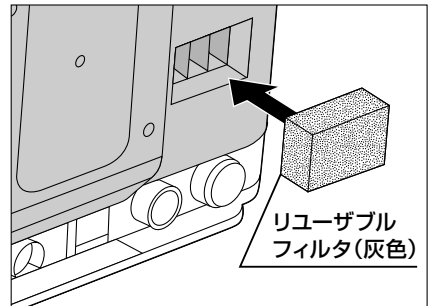

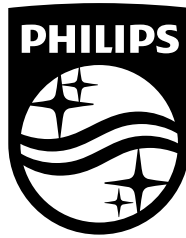

CPAP装置をお使いの方

CPAPお客様コールセンター

よるは よいこきゅう

0120-48-4159

受付時間 7:00~22:00 年中無休 365日対応

販売名: ドリームウェア フルフェイスマスク
医療機器届出番号: 11B1X00022000113
一般医療機器 一般的名称: 人工呼吸器用マスク

製造販売業者 **フィリップス・レスピロニクス合同会社**
本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号フィリップスビル
www.philips.co.jp/healthcare

お問い合わせは地域の営業所・出張所・駐在まで
※営業所・出張所・駐在の連絡先は以下のURLで公開しています
www.philips.co.jp/PRJ-Office

人工呼吸器をお使いの方

昼間

地域営業所・出張所・駐在

受付時間 平日9:00~17:30

夜間休日

機器安全センター

0120-633-811

受付時間 平日17:30~翌9:00 土・日・祝祭日

© 2018 Philips Respirionics GK
改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくはお近くの営業所までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名称は、Philips、Respirionics、またはその他の会社の商標または登録商標です。
PN 1140397/181010 R1-FK

