

PHILIPS

Wisp CPAP-nesemaske
med hodestropp

Pakke

3 puter (S/M, L, XL)

m/hodestropp

HH1024



Ytelse har fått en ny stil.

Den smarte rilleforseglingsteknologien fra Wisp tilpasser seg alle bevegelsene dine. Slik oppnår du førsteklasses forsegling og god nattesøvn.

Magnetiske klemmer

- Hodestroppklemmene og maskeputen inneholder magneter

Uhindret synsfelt

- Les, se på TV eller bruk briller

Kompakt design


- Wisp passer komfortabelt til over 98 % av brukerne*

God ytelse og komfort

- Rask og enkel montering og justering.

Høydepunkter

Større frihet

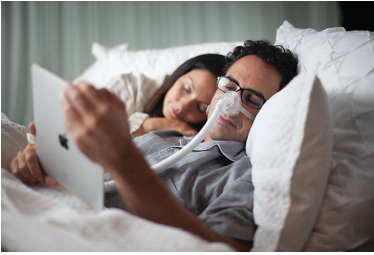

Wisp har et stilrent design som fjerner behovet for pannepute, noe som gir deg bedre synsfelt.

Kompakt utforming, naturlig passform



Nesetipp-puten er designet til å ligge under neseryggen, noe som gjør at kontakten med ansiktet er minimal, samtidig som det gir førsteklasses forsegling. * Bekreftes via den antropometriske databasen

Minimalt design, optimal forsegling



Designet og hodedelklemmene gjør den enklere å bruke og rengjøre.

Magnetiske klemmer

Ta kontakt med helsepersonell før du bruker denne masken. Enkelte medisinske apparater kan bli påvirket av magnetiske felt. De magnetiske klemmene i denne masken må holdes minst 50 mm (2 tommer) unna alle aktive medisinske apparater, spesielt implanterte enheter som pacemakere, defibrillatorer og cochleaimplantater. Les brukerhåndbøkene i pakken for mer informasjon.

Spesifikasjoner

Advarsel: Magnetisk interferens

Ta hensyn til pacemakere: Read IFU's before use.

Beskrivelser

Sound pressure level: 19 DBA

N° of parts: seks

Putemateriale: silikon/polykarbonat

Hodestroppmateriale:

UBL/uretanskum/nylon/Lycra/nylon-termoplast

Rørmateriale: Termoplast polyester elastomer

Frame material: Nylon/spandex/uretanskum

Materiale i svingfeste: silikon/polykarbonat

Cleaning instructions: mask: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Rengjøring: hodedel, rør: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Materiale i vinkelrør/svingfeste: Polykarbonat

Driftstrykk: 4–20 cmH₂O

Materiale i hodeklemmer: Acetalkopolymer

Tiltenkt bruk

To be used on patients <gt/>30kg: with CPAP prescription

Kompakt

Enkel montering og justering: Stille ekshalasjon

Utforming

Compact: Easy fitting and adjustment

Komfort: Elastisk hodestropp

Patentert design: Utforming med nesetipp-pute

Stille ekshalasjon: 360 graders roterende vinkelrør

Service

Garanti: 90-days

