

© 2020 Koninklijke Philips N.V.Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

www.philips.com/respironics

Administrar para automatizar

Care Orchestrator está configurado para entregar información accionable del paciente a los equipos de atención, lo que permite al personal identificar qué pacientes necesitan ayuda y promover la atención oportuna Atención personalizada al paciente en su máxima expresión. Configure reglas para generar tareas en descargas de terapia. Nota: La Guía de reglas y recordatorios explicará las reglas de gestión con mayor profundidad. Configurar las reglas Conjuntos de reglas Los conjuntos de reglas son una forma de administrar las reglas sanitarias, de uso y equipos para diferentes conjuntos de Proveedores Ubicaciones Reglas y recordatorios AHI demasiado alto Conjuntos de recordatorios Preferencias del sistema % alto de noche con fuga grande Añadir una tarea para realizar el seguimiento del







Preferencias del sistema que le permiten tomar el control

Controle la configuración de seguridad del sistema para la aplicación en general, como el tiempo de espera de la sesión, la duración de la contraseña, el historial de contraseñas, el bloqueo de la cuenta, etc. **Advertencia: Los administradores son responsables de seguir las políticas y procedimientos que rigen sus prácticas comerciales al modificar la configuración de seguridad.**

Configure las preferencias del sistema

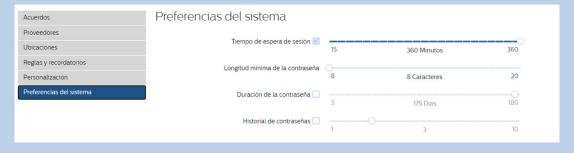

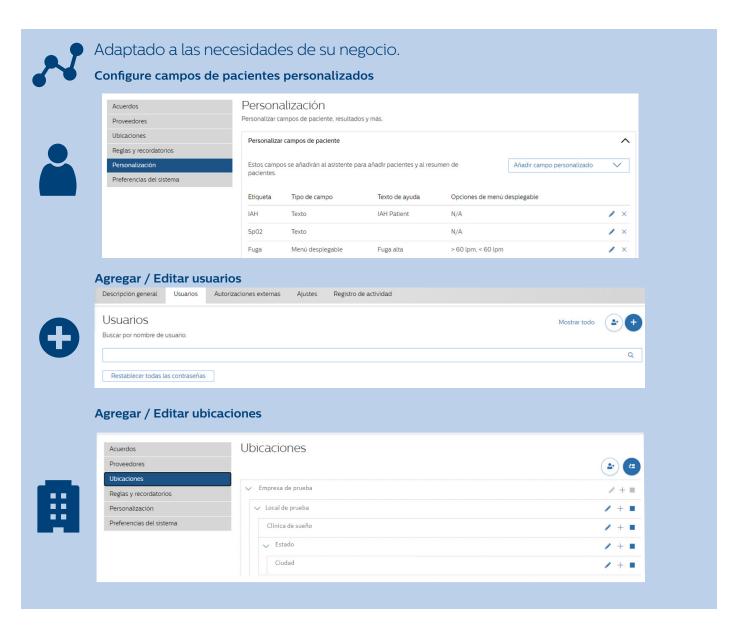

Inicio rápido de roles de usuario

Permisos	Roles					
	Administrador	Terapeuta	Asistente clínico	Médico	Espectador paciente	Administrador de reglas del paciente
Agregar usuario / editar usuario	V					
Añadir paciente		V	~	\		
Editar paciente		V	~	\		
Ver paciente		V	~	\	~	
Asignar equipo		V	~	V		
Ver datos de terapia		V	~	\	~	
Configuración	~					
Crear / editar prescripción		V		\		
Ver receta		V	~	V	~	
Informes de terapia		V	~	V	~	
Descargar datos de la tarjeta SD		V	~	V	~	
Gestionar tareas		V	~	\	V	
Personalizar reglas a nivel de paciente *						~

^{*} Para personalizar las reglas a nivel del paciente, el usuario debe tener asignadas las funciones de administrador de reglas del médico y del paciente