

PHILIPS
RESPIRONICS

Care Orchestrator

Guía de inicio rápido



Pon el poder
a tu alcance

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

www.philips.com/respironics

Care Orchestrator hace que la prestación de atención sea más fácil que nunca

Sistema de gestión del sueño y del cuidado respiratorio

Monitoree y controle de forma remota prácticamente todos sus pacientes con apnea del sueño y problemas respiratorios con un solo sistema. Care Orchestrator entrega información procesable del paciente directamente a los equipos de atención, a través de teléfonos inteligentes, tabletas o PC.



Guía de inicio rápido del Care Orchestrator

Para iniciar sesión en su cuenta (CO) del Care Orchestrator, accese www.careorchestrator.com, haga clic en el botón de "registrarse" en la parte superior derecha de su pantalla. La página le pedirá un "Usuario" y "Contraseña".

Usuario: _____ Contraseña: _____

Panel de acción	<p>El botón Buscar paciente lo ayuda a buscar por nombre, apellido, número de serie del dispositivo, ID externo o ID de referencia. Simplemente haga clic en el archivo del paciente en los resultados de búsqueda para ver los detalles del paciente.</p> <p>Para mostrar una lista de todos los pacientes bajo su cuidado, simplemente escriba un asterisco (*).</p>	
	<p>El botón Descargar tarjeta de datos permite a los usuarios transferir datos de terapia del paciente e información para Care Orchestrator utilizando una tarjeta SD.</p> <p>Para configurar un lector / grabador de tarjetas SD, consulte las instrucciones del software de la tarjeta SD, o use la herramienta Inicializar medios extraíbles. Consulte la Solución de problemas de tarjetas SD para obtener información útil.</p>	
	<p>Haga clic en el botón Agregar un paciente para agregar pacientes. Inicialmente, los pacientes requieren solo cinco campos de datos: consultorio, nombre, apellido, fecha de nacimiento y fecha de instalación.</p> <p>Se puede agregar información adicional más adelante a su conveniencia.</p>	
	<p>El botón Agregar una tarea es donde usted asigna la atención al paciente y las responsabilidades del equipo de atención. En esta sección puede programar tareas y fechas de finalización, asignar prioridades y cualquier breve descripción de la terapia.</p>	
Chat	<p>El botón Chat le permite comunicarse con el soporte de Philips Respironics para responder preguntas y solucionar problemas en tiempo real.</p>	

Cómo generar informes de terapia

- 1 Buscar paciente
- 2 Abrir perfil de paciente
- 3 Haga clic en la pestaña "datos de terapia"

Seleccione días de terapia

Seleccione tipo de reporte

Seleccione el rango de fechas para la mejor cantidad de días de uso. Disponible para dispositivos individuales o múltiples.

Generar un informe de terapia.*

Imprima el informe en PDF o guarde el informe en la pestaña "Documentos" del paciente.

*Genera informes de sueño y ventilación

Nota: Cuando intente utilizar las **Utilidades de tarjeta de datos** en Care Orchestrator, se le pedirá que descargue o actualice las **Utilidades de tarjeta de datos** si no tiene instalada la última versión. Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar la última versión de **Utilidades de tarjeta de datos**

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Philips local