

**PHILIPS**  
RESPIRONICS

*Care Orchestrator*

Guia de início rápido



**O poder na ponta  
dos seus dedos**

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.  
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)

# Conduzir cuidados respiratórios e do sono **em harmonia**

## Care Orchestrator - sistema de gerenciamento de sono e cuidados respiratórios

Monitore e gerencie remotamente praticamente todos os pacientes com apneia do sono e pacientes respiratórios com um único sistema. O Care Orchestrator fornece informações acionáveis do paciente diretamente para as equipes de atendimento - via smartphone, tablet ou PC.



## Guia de início rápido do Care Orchestrator

Para fazer login na sua conta do Care Orchestrator (CO), navegue até [www.careorchestrator.com](http://www.careorchestrator.com) clique no botão Entrar no canto superior direito. A página de login solicitará seu nome de usuário e senha.

Nome de usuário: \_\_\_\_\_ Senha: \_\_\_\_\_

<b>Painel de ação</b>	<p>O botão <b>Procurar paciente</b> ajuda a pesquisar por nome, sobrenome, número de série do dispositivo, ID externo ou ID de referência. Basta clicar no arquivo do paciente (lupa) e nos resultados da pesquisa para ver os detalhes <b>do paciente</b>.</p> <p>Para exibir uma lista de todos os pacientes sob seus cuidados, basta digitar um asterisco (*).</p>	
	<p>O botão <b>Download do cartão de dados</b> permite que os usuários transfiram dados da terapia do paciente ao Care Orchestrator usando um cartão SD.</p> <p>Para configurar um leitor / gravador de cartão SD, consulte as instruções do software do cartão SD ou use a ferramenta Inicializar mídia removível. Consulte a seção Solução de problemas de cartões SD para obter informações úteis.</p>	
	<p>Clique no botão <b>Adicionar um paciente</b> para adicionar pacientes. Inicialmente, os pacientes requerem apenas cinco campos de dados: <b>Localização, Nome, Sobrenome, Data de nascimento e Data da instalação</b>. Informações adicionais podem ser adicionadas posteriormente, conforme sua conveniência.</p>	
	<p>O botão <b>Adicionar uma tarefa</b> é onde você atribui responsabilidades de assistência ao paciente a equipe de atendimento. Nesta seção, você pode agendar tarefas do paciente e datas de conclusão, atribuir prioridades e quaisquer breves descrições da terapia.</p>	
<b>Bate-papo</b>	<p>O botão <b>Bate-papo</b> permite que você se comunique com o suporte de produto Philips Respironics para responder a perguntas e solucionar problemas em tempo real.</p>	

## Como gerar **relatórios de terapia**

- 1 Pesquisar paciente
- 2 Abrir perfil do paciente
- 3 Clique na guia "dados da terapia"



\* Gere relatórios de sono e Trilogy

**Nota:** Ao tentar usar os **Utilitários de cartão de dados** no Care Orchestrator, você será solicitado a baixar ou atualizar o **cartão de dados**, se a versão mais recente não estiver instalada. Siga as instruções na tela para baixar e instalar a versão mais recente do **Data Card Utilities**.

Para mais informações, entre em contato com seu representante de vendas