


AVENT


Manual
de utilizare

SCF258/02



PHILIPS

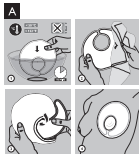

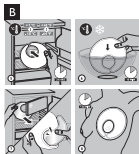

Notă: Spălați husa înainte de prima utilizare. Înainte de a aplica pernuta termică pe sân, asigurați-vă că temperatura acestuia este acceptabilă prin aplicarea pernuței pe spatele mâinii. Întotdeauna folosiți pernuta termică cu husa furnizată.

Utilizare caldă: pentru a stimula fluxul de lapte înainte de alăptare. Cufundați pernuta termică într-un castron cu apă caldă și lăsați-o să se încălzească până la o temperatură optimă (Fig. 1). Uscăți pernuta termică cu un prosop sau o cârpă (Fig. 2). Introduceți pernuta termică în husa furnizată (Fig. 3). Aplicați pernuta termică pe sân (Fig. 4).

Utilizare rece: pentru a calma durerea sau sânii inflamați. Puneți pernuta termică în frigider sau congelator și lăsați-o să se răcească până la temperatura optimă pentru 24 de ore (Fig. 5). Alternativ, cufundați pernuta termică într-un castron cu apă și gheață (Fig. 6). Introduceți pernuta termică în husa furnizată (Fig. 7). Aplicați pernuta termică pe sân (Fig. 8).

Curățare și stocare - Înainte de a folosi pernuta termică pentru prima dată și după fiecare utilizare,

curățați peruța în apă caldă cu detergent lichid. Nu folosiți o perie/un burete de curățare sau agent de curățare abraziv. • Puteți curăța manual husa sau în mașina de spălat la o temperatură mică. • Stocați peruța termică și husa într-un spațiu rece, uscat, departe de lumina solară directă și să nu fie la îndemâna copiilor.

Sfaturi privind siguranța și soluții la cele mai comune probleme

• Nu încălziți peruța termică în cuptorul cu microunde. • Nu folosiți peruța termică fără husa fumizată. • Nu puneți peruța termică direct pe piele. • Nu puneți peruța termică pe piele dacă aveți răni. • Nu folosiți peruța termică în timp ce hrăniți copilul sau dacă folosiți pompa de sân. • Dacă peruța termică s-a stricat sau dacă conținutul acestora se scurge, debarasați-vă de aceasta. • Nu înghițiți conținutul peruței termice. • După înghețare, gelul din interiorul peruței termice are aspectul de zăpadă. Acest lucru este normal. Gelul din peruța termică va reveni la starea normală după câteva ore. • Dacă aveți nelămuriri privind folosirea peruței termice, vă rugăm să consultați doctorul.

Philips AVENT, este o divizie
a Philips Electronics UK Ltd. Philips Centre,
Guildford Business Park, Guildford, Surrey,
GU2 8XH
Mărcile aparțin Philips Group.
©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.