

**Pentru siguranța și sănătatea
copilului dumneavoastră:
AVERTISMENT!**

Utilizați întotdeauna acest produs sub supravegherea unui adult. Sorbirea continuă și îndelungată a lichidelor cauzează carii dentare. Verificați întotdeauna temperatura alimentelor înainte de a hrăni copilul. Nu lăsați componentele neutilizate la îndemâna copiilor. Nu încălziți niciun fel de lichide sau mâncare în cuptorul cu microunde. NU permiteți copiilor să se joace cu piesele mici. NU permiteți copiilor să meargă sau să alerge în timp ce folosesc biberoane sau căni. Gurile de scurgere și supapele nu sunt adecvate pentru băuturi fierbinți, acidulate sau cu pulpă; NU utilizați cămile cu guri de scurgere și supape pentru a amesteca formulele de lapte deoarece acest lucru ar putea cauza scurgerea lichidelor.

Înainte de utilizare: Inspectați toate articolele și aruncați-le la primul semn de deteriorare sau slăbire. Curățați gura de scurgere și supapa de schimb înainte de prima utilizare (consultați secțiunea „Curățare”). Asigurați-vă întotdeauna că supapa este asamblată corespunzător.

Curățare: Curățați gura de scurgere și supapa de schimb după fiecare utilizare pentru a asigura igiena optimă.

1. Clătiți gura de scurgere și supapa cu atenție, cu apă caldă. *Atenție: Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, antibacterieni sau solvenți chimici. Concentrația excesivă a agenților de curățare poate provoca fisurarea pieselor din plastic. Dacă se întâmplă acest lucru înlocuiți gura de scurgere și supapa imediat.*

2. Sterilizați gura de scurgere și supapa într-un sterilizator sau în apă fiartă timp de max. 5 minute. Gura de scurgere și supapa de schimb pot fi, de asemenea, sterilizate în toate modalitățile standard. *Notă: Spălați-vă mâinile cu atenție și asigurați-vă că suprafețele sunt curate înainte de contactul cu articolele sterilizate.* Nu sterilizați nicio piesă a cării cu gură de scurgere în cuptorul cu microunde fără a utiliza un sterilizator pentru microunde.

3. După sterilizare lăsați gura de scurgere și supapa să se răcească timp de 5 minute. Gura de scurgere și supapa sunt lavabile în mașina de spălat vase, coloranții alimentari pot decolora piesele.

Manual de utilizare
SCF252



PHILIPS
AVENT

Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4
9206 AD Drachten
The Netherlands

www.philips.ro/AVENT

Trademarks
owned by the Philips Group.
©2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved

