

PHILIPS

BlueTouch 痛楚紓緩
背貼

創新 Blue LED 技術

紓緩肌肉背部疼痛

無線

需與肩帶一併使用



PR3092/00



自然緩解背部疼痛

創新技術治療疼痛，設有藍色 LED 燈

Philips BlueTouch 可自然緩解背部疼痛。藍色 LED 燈刺激身體的自我修復過程，讓痛楚明顯減少。Philips BlueTouch 無須醫生處方，各大藥房有售。

世界首創治療背部疼痛

- 創新技術治療疼痛，設有藍色 LED 燈
- 代替藥物治療的新療法
- 舒緩作用：熱力及身體的自我修復

使用過程：簡單、方便、隱蔽

- 使用背帶，舒適昇華
- 治療時間短，三種強度模式
- 便攜而體貼 - 融入您每天的生活

方便日常生活使用：安全，電量持久

- 安全使用
- 清潔簡便

立即試用，實力毋庸置疑

- 使用 5 次後的初步舒緩疼痛體驗

產品特點

世界首創

以藍色 LED 燈技術治療背部疼痛為世界首創，Philips BlueTouch 以完全自然的方法舒緩背部疼痛：藍色 LED 燈刺激身體的自我修復過程，讓痛楚明顯減少。Philips BlueTouch 專為上背及/或下背而設。由於技術天然，Philips BlueTouch 無須服藥並可代替藥物治療，無須醫生處方，各大藥房有售。

代替藥物治療

藍色 LED 燈最大的好處是天然，藍光刺激身體的自我修復過程。當藍色 LED 燈照射到人體皮膚，體內會釋放出一氧化氮分子並傳到疼痛的肌肉。這些微小的分子作用強大，可以自然舒緩疼痛，同時免除服用藥物可能導致的副作用。

熱力和一氧化氮

除了明顯的熱力有助舒緩疼痛，藍色 LED 燈會刺激身體產生一氧化氮 (NO)。一氧化氮能促進循環，提升肌肉的氧氣和營養供應，同時減輕痛感，讓肌肉得到休息和舒緩痛楚。有指一氧化氮抗氧化、保護細胞和抗炎作用，因此能保護肌肉及神經，對抗傷患及避免受傷。Philips BlueTouch 不但可以舒緩疼痛，更是預防措施。

背帶

使用可調節的舒適背帶，可以將 Philips BlueTouch 隱藏於衣服之下。固定背帶以高級布料製成，專為上背及下背而設。首先將 BlueTouch 放進背帶預設的口袋，然後放到身上適當位置，以魔术貼緊緊即可，輕鬆容易。不論居家外出，隨時戴著 BlueTouch 都舒適方便。

治療時長

Philips BlueTouch 最多每日可使用兩次，治療時間按所選強度而有所不同。模式 1 (溫和) 最多可用 30 分鐘，模式 2 (中等) 可用 20 分鐘，而模式 3 (強力) 則為 15 分鐘。強度不同在於光線的強度及溫度，可按個人喜好選擇。藍色 LED 燈的多種模式選擇，讓 BlueTouch 每天都能有效地為你舒緩疼痛。

便攜而體貼

每日的 Philips BlueTouch 背痛療程，可以輕鬆地融入您的日常生活。Philips BlueTouch 以電池供電，無須電線，療程期間您可以自由活動。BlueTouch 體積輕巧，可以體貼地在衣服下使用。療程時你更可以繼續您的日常活動，上班、做家务或出外購物，都可享受療程。

安全

Philips BlueTouch 絕對安全。藍色 LED 燈刺激身體的自我修復過程，舒緩疼痛，同時免除服用藥物可能導致的副作用。當你啟動本產品，LED 燈會以低電量亮起，你可以放心直望藍光。產品感應到與皮膚的接觸後，才會以最高功率運作，並會在療程完結時自動關機。溫度感應器會感測你的皮膚溫度。

清潔簡便

Philips BlueTouch 清潔簡便：以柔軟的濕布或非非常柔軟的刷掃走表面的塵埃。請不要把產品浸入水中或用水沖洗。背帶可以用 30 度溫水機洗。

5 天療程結果

證實可在使用 BlueTouch 療程 5 天後初步感受到疼痛得以舒緩

規格

天然的舒緩疼痛療法

BlueTouch 擊退背痛: 舒緩痛楚效果顯著
創新 LED 背貼: 40 個高科技藍色 LED
絕對天然: 絕無化學成份

使用範圍

背痛: 中度，慢性肌肉問題
下背: 脊椎和腰部
上背: 肩頸

方便使用

使用時間短: 每天約 15 至 30 分鐘
模式 1 (溫和): 每日 2 次，每次 30 分鐘。
模式 2 (中等): 每日 2 次，每次 20 分鐘。
模式 3 (強力): 每日 2 次，每次 15 分鐘。

規格

額定電壓: 100 V - 240 V
額定頻率: 50 - 60 Hz
額定輸入: 15 瓦
經典: IIa 級醫療設備
分類: 風險類別 1
進水: IP22
每日最多: < 90 J/cm²
電池類型: 鋰離子
藍色 LED 燈波長: 453 nm

連接

變壓器: 100 V - 240 V

插座

Micro USB: 以 micro USB 線充電

操作

相對濕度: 30% 至 90%
溫度: 10 °C 到 35 °C

儲存

相對濕度: 30 - 90% (無凝結)
溫度: -20 °C 到 35 °C

重量與尺寸

BlueTouch 重量: 0.168 kg
尺寸 (寬 x 高 x 厚): 353 x 229 x 66 毫米
背帶尺寸 (寬 x 高 x 厚): 229 x 179 x 30 毫米

安全

BlueTouch: 衛生和安全
省電回應模式: 與空氣接觸時
過熱感應器: 自動關機
療程後自動關機: 自動

