


PHILIPS

Patch anti-douleur
BlueTouch

BlueTouch

Anti-douleur à LED novateur

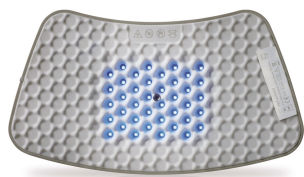

PR3082/00



Soulage naturellement le mal de dos

Traitement novateur de la douleur par LED bleues

Le BlueTouch Philips permet de soulager naturellement le mal de dos. Les LED bleues stimulent le processus d'auto-rétablissement du corps ; la douleur régresse sensiblement. Le BlueTouch Philips est disponible en pharmacie sans ordonnance.

Une première mondiale contre le mal de dos

- Traitement exclusif de la douleur par LED bleues
- Nouveaux traitements sans médicaments
- Soulagement : chaleur et processus naturel du corps

Application simple, pratique et discrète

- Sangles dorsales pour un confort optimal
- Courtes durées de traitement, trois niveaux d'intensité
- Portable et discret : à intégrer aux habitudes quotidiennes
- Les premiers effets anti-douleur sont observés au bout de 5 utilisations

Pour le quotidien : longue durée de vie, sans danger

- Utilisation sûre
- Nettoyage simple

Disponible en pharmacie dans toute l'Allemagne

- Disponible sans ordonnance en pharmacie
- Essayez-le : délai de rétractation de 30 jours

Points forts

Première mondiale



L'utilisation de LED bleues pour soulager le mal de dos est une première mondiale dans le domaine des nouveaux traitements. Le BlueTouch Philips permet de soulager la douleur de manière complètement naturelle : la lumière émise par les LED bleues stimule les processus de soulagement de la douleur propres au corps. Le BlueTouch a été spécialement développé pour une utilisation sur le haut et/ou le bas du dos. Avec son mode d'action naturel, il représente une alternative aux traitements médicamenteux. Le BlueTouch Philips est disponible sans ordonnance en pharmacie.

Délai de rétractation de 30 jours

Essayez le BlueTouch Philips ! Si vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé dans un délai de 30 jours à compter de la date d'achat.


Alternative aux médicaments



Le principal avantage du traitement par LED bleues est qu'il est naturel. La lumière bleue stimule les propres processus du corps. Lorsque la lumière des LED bleues atteint la peau, les réserves de molécules d'oxyde nitrique (NO) du corps sont libérées et transportées vers le muscle siège de la douleur. Cette petite molécule a un grand

effet : les douleurs dorsales sont soulagées de manière naturelle, sans les effets secondaires observés avec les traitements médicamenteux.

Chaleur et oxyde nitrique

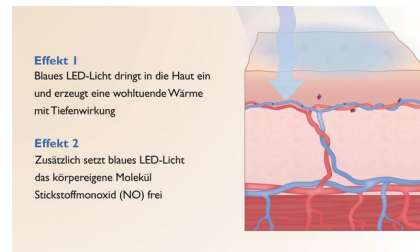

En plus du soulagement observable apporté par la chaleur, la lumière des LED bleues stimule la production d'oxyde nitrique (NO) dans le corps. Ainsi, le transfert d'oxygène et de nutriments vers le muscle est amélioré, tandis que la transmission des signaux de douleur est réduite. Les muscles peuvent se relaxer et les douleurs diminuent. Le NO est réputé antioxydant, cytoprotecteur et anti-inflammatoire. Ainsi, il permet d'éviter que les muscles et les nerfs ne s'endommagent et que vous ne vous blessiez à nouveau. Le BlueTouch Philips ne fait pas que soulager : il a également une utilité préventive.

Sangles dorsales



Grâce à ses sangles dorsales confortables et individuellement réglables, le BlueTouch Philips peut être porté sous des vêtements en toute discrétion. Fabriquées avec des textiles de qualité supérieure, elles ont été spécialement développées pour le haut et le bas du dos. Insérez simplement le BlueTouch dans l'ouverture de la sangle dorsale fournie, puis placez-la contre votre corps, et attachez-

la à l'aide des fixations en Velcro. Ainsi, le port de votre BlueTouch est confortable à tout moment, à la maison comme en déplacement.

Durée du traitement

Stufe	Behandlungs-dauer	Max. Anwendungen pro Tag
1 Sanft	30 Min.	2
2 Medium	20 Min.	2
3 Stark	15 Min.	2

Vous pouvez utiliser le BlueTouch Philips jusqu'à deux fois par jour. La durée de chaque traitement dépend du niveau d'intensité sélectionné. En Mode 1 (léger), utilisez l'appareil pendant 30 minutes maximum, en Mode 2 (moyen), pendant 20 minutes, et en Mode 3 (intense), pendant 15 minutes. Sélectionnez le niveau d'intensité en fonction de vos préférences. Ils offrent une intensité lumineuse et une température différentes. Grâce à l'action des LED bleues, le BlueTouch peut soulager efficacement les douleurs dorsales, lorsque qu'il est utilisé tous les jours.

Portable et discret



Intégrez facilement le traitement de vos douleurs dorsales à vos habitudes quotidiennes avec le BlueTouch Philips. L'appareil fonctionne avec des piles, et donc sans câbles, ce qui vous permet de vous déplacer en toute liberté pendant le traitement. D'une taille compacte, le BlueTouch peut être porté discrètement sous les vêtements. Ainsi, vous pourrez vaquer à vos activités quotidiennes, que ce soit au bureau, à la maison ou dans la rue, pendant votre traitement.

Caractéristiques

Traitement naturel de la douleur

Le BlueTouch contre le mal de dos:

Soulagement observable de la douleur

Patch à LED novateur: 40 LED bleues haute technologie

Absolument naturel: Sans produits chimiques

Zones d'application

Pour le mal de dos: modéré, musculaire chronique

Région lombaire: Colonne vertébrale et région lombaire

Haut du dos: Épaules et cervicales

Facile à utiliser

Courte durée d'utilisation: De 15 à 30 min deux fois par jour

Mode 1 (léger): Deux fois par jour pendant 30 min

Mode 2 (moyen): Deux fois par jour pendant

20 min

Mode 3 (élevé): Deux fois par jour pendant 15 min

Spécificités

Tension nominale: 100-240 V

Fréquence nominale: 50-60 Hz

Puissance nominale: 15 W

Classe: Appareil médical de classe IIa

Classification: Groupe de risque 1

Pénétration par l'eau: IP22

Dose quotidienne maximale: < 90 J/cm²

Type de batterie: Li-Ion

Longueur d'ondes de la lumière émise par les

LED bleues: 453 nm

Connexions

Adaptateur secteur: 100-240 V

Prises

Micro USB: Charge avec adaptateur 12 V et câble micro-USB (non inclus)

Fonctionnement

Taux d'humidité relative: 30 à 90 %

Température: de +10 °C à +35 °C

Rangement

Taux d'humidité relative: 30 à 90 % (aucune condensation)

Température: de -20 °C à +35 °C

Poids et dimensions

Poids du BlueTouch: 0,168 kg

Dimensions du patch (l x H x P):

353 x 229 x 66 mm

Dimensions des sangles (l x H x P):

229 x 179 x 30 mm

Sécurité

BlueTouch: Certifié CE et sans danger

Mode feedback basse puissance: En contact avec l'air

Capteur de surchauffe: Arrêt automatique

Arrêt à la fin du traitement: Automatique

