


V. Démarrage de la surveillance avec le Pod.

1. Prélever le pod de la station



2. Poser le Pod sur le Patch, au niveau de l'emplacement qui lui est réservé.

3. Observer à l'écran le schéma de positionnement qui s'ouvre automatiquement. (Ce schéma indique si le contact entre la peau et les électrodes est bon)

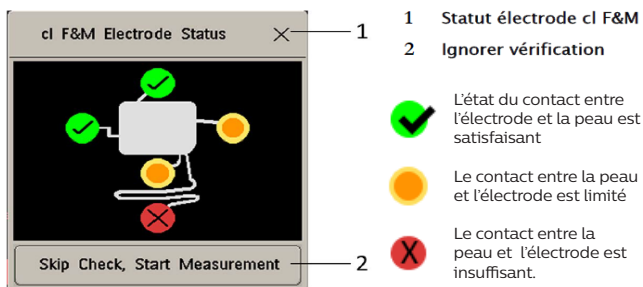

Pour les électrodes dont le schéma indique un rond rouge ou jaune, décoller les électrodes concernées et **répéter les étapes** de préparation de la peau du chapitre IV 2.1 et 2.2

4. Si le schéma à l'écran indique un rond "vert" pour chacune des 5 électrodes, la surveillance démarre automatiquement.



Attention : Si l'état de l'une ou plusieurs des électrodes à l'écran reste "jaune", vous pouvez choisir d'ignorer la vérification. Il vous suffit de sélectionner le bouton "ignorer vérification" dans la fenêtre Statut électrode. La précision de la mesure ne devrait pas en être affectée. Toutefois, la détection du rythme cardiaque foetal peut être moins sensible.

Betless* = sans sangle abdominale

Référence commerciale de la station Avalon CL (x10)	866074 (y ajouter l'option M01 lors de la demande de devis auprès du commercial)
Référence commerciale du Pod	866488
Solution sans sangle abdominale – Pod & Patch maternel et foetal	
Références des accessoires et consommables Avalon Betless*	



Réf : NUS – Pod & Patch – V1

PHILIPS

Monitoring foetal

Gamme Avalon Pod & Patch maternel et foetal



Une question ?

Pour plus d'informations vous pouvez contacter notre pôle assistance client au :
0810 835 624

Ce document ne se substitue pas au manuel d'utilisation qui prévaut et reste la seule référence pour une utilisation correcte de l'équipement en cas de doute.

I. Branchement et démarrage de la station Avalon CL

1. S'assurer que le cardiotoçographe (FM20/30/40/50) est **éteint**.

2. Brancher la station Avalon CL sur l'une des quatre **connectiques rouges** au choix. (moniteur toujours éteint)



3. Allumer le moniteur (la station s'allumera ainsi automatiquement)
Attendre que le voyant (LED) de la station clignotant "jaune" passe au **vert fixe**.



La LED clignote en jaune



La LED passe au vert fixe

4. Vérifier que le logo "CL" figure bien en bas à droite de l'écran du moniteur.

II. Préparation de la peau de la maman

1. Nettoyer la peau du ventre de la maman avec un linge imbibé d'**eau savonneuse** (surtout pas d'alcool !)
2. Suite à l'étape 1, rincez le ventre de la maman avec un linge imbibé d'**eau claire**.
3. Sécher la peau de la maman avec un **linge sec**.

III. Positionnement de la partie "centrale" du patch

1. Pour déterminer l'emplacement du patch sur le ventre de la maman, prendre le **point de croisement** entre la ligne **médiane verticale passant par le fundus**, puis la **ligne horizontale passant au dessus des crêtes iliaques**.



Généralement ce point de croisement tombe au niveau de l'ombilic, mais pas toujours.

2. Appliquer la partie du centrale du patch, sur ce point de croisement (que ce soit l'ombilic ou non). L'électrode la plus basse doit être positionnée environ 6 cm au dessus de la symphyse pubienne.

Patiante de gabarit "standard"



Patiante avec ombilic "déplacé"

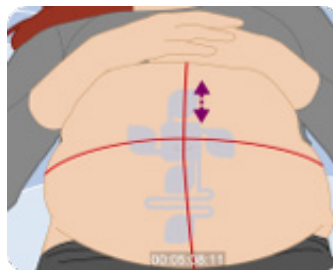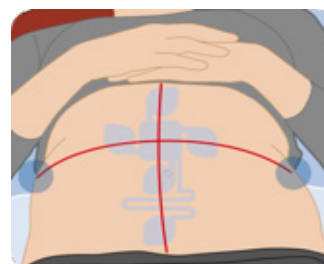

Patiante à fort IMC

Pour les patientes à fort IMC, l'électrode la plus haute doit être positionnée dans l'alignement de la ligne médiane verticale, environ 12cm en dessous du fundus.

IV. Fixation des électrodes du patch, sur le ventre

1. Prendre une gomme abrasive dans le carton de patch et la coller sur le doigt de votre choix.
2. Pour chacune des zones où sera appliquée une électrode, procéder comme suit avec la languette abrasive:

2.1. Effectuer trois mouvements verticaux (toujours dans le même sens) et trois mouvements horizontaux (toujours dans le même sens).



2.2. Retirez l'opercule de l'électrode, placez l'électrode sur la peau préparée puis appuyez fermement dessus mais évitez d'appuyer sur la zone centrale pré-gélifiée de cette électrode. (Cela risquerait de faire couler le gel sur la partie adhésive de l'électrode).

3. Répéter les étapes 2.1 et 2.2 pour l'ensemble des électrodes du patch.



Attention:

Si possible, éviter de placer les électrodes sur les zones suivantes : nombril, piercings, cicatrices, vergetures épaisses, lésions cutanées, grains de beauté et linea nigra particulièrement sombre.