

PHILIPS

AVENT

Nipplette™

Решение без операций

Для плоских или втянутых сосков

2 Nipplette и 2 вкладыша



SCF152/02



Простое и эффективное решение проблемы втянутых сосков

Результаты, подтвержденные клиническими исследованиями*

Nipplette™ помогает мамам с плоскими или втянутыми сосками кормить своих малышей грудью. Этот уникальный и современный инструмент представляет собой простое и долговечное решение, не требующее хирургического вмешательства. Ваши соски будут поддерживать новую форму в течение многих недель.

Просто и удобно

- Дополнительная информация
- Устройство для плоских или втянутых сосков
- Простая процедура

Без хирургического вмешательства — аккуратное всасывание

- Клинически доказанные результаты

Незаметно — подойдет для сосков любого размера

- Идеально до беременности или в течение первых 6 месяцев беременности

Основные особенности

Для плоских или втянутых сосков

Втянутые или плоские соски становятся причиной стресса у 10 % женщин, а также дискомфорта при кормлении грудью. Когда малыш сосет молоко, сосок должен выступать. Если этого не происходит, вам поможет простое решение — Nipplette™. Это устройство позволяет женщинам с плоскими или втянутыми сосками комфортнее ощущать себя во время кормления без необходимости в хирургическом вмешательстве*. Устройство состоит из прозрачной формы для соска и герметичного кольца, прикрепленного к клапану и поршню.

Рекомендованное время использования

Корректор Nipplette рекомендуется использовать до беременности каждый день или ночь в течение 8 часов*. Если у вас слишком чувствительная грудь, корректор можно использовать в течение первых шести месяцев беременности — это поможет добиться полной коррекции — или по несколько минут перед непосредственным сеансом кормления уже после рождения ребенка. Корректор Nipplette поможет вытянуть сосок, в результате чего малышу будет легче захватить его — это упростит процедуру кормления грудью в первые дни жизни малыша. Полную косметическую коррекцию можно продолжить по окончании периода грудного вскармливания; в таком случае корректор Nipplette можно использовать с выбранной периодичностью.

Аккуратное всасывание

Одной рукой чашечка удерживается над ареолой соска, после чего поршень 5 мл из нее высасывается воздухом, в результате чего сосок всасывается в чашечку. Всасыванием управляет пользователь, так что вы сможете самостоятельно управлять степенью всасывания. После вытягивания соска пользователь отделяет поршень от клапана и может продолжать заниматься обычными делами — корректор Nipplette незаметен под бюстгалтером. При первом использовании рекомендуется максимальное всасывание соска*.

Результаты, доказанные в клинических условиях

Клинические исследования*, проведенные в отношении Nipplette, доказали эффективность устройства в области коррекции формы соска вне зависимости от причины патологии (пубертатный период или операция по уменьшению груди). Все беременные женщины, участвовавшие в эксперименте, перестали испытывать проблемы с грудным вскармливанием. Полная коррекция достигается в среднем после 1–3 месяцев постоянного использования.

Дополнительная информация

Nipplette не будет работать после полного поступления молока. К этому времени малыш должен привыкнуть к захвату соска.

Характеристики

Простой процесс чистки

Мытье горячей мыльной водой

Конструкция

Естественная форма

Материал

Вкладыши для бюстгалтера: Одобрено дерматологами

Nipplette: полипропилен

В комплект входят:

Сменные вкладыши для бюстгалтера: 2 шт.

Nipplette: 2 шт.

Удобство использования

Незаметны под одеждой: Поршень для сброса вакуума

Функции

Решение проблемы втянутых сосков: Бережное всасывание

Этапы взросления

Этап: До беременности, 0–6 месяцев, Начало кормления грудью



* McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Nipplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) Vol 47, Pages 46–49

* Этот раздел содержит мнения пользователей о данном продукте. Компания Philips не несет ответственности за содержимое оставленных пользователями в этом разделе комментариев и содержащихся в них технических сведений и рекомендаций, а также не считает их официальной информацией Philips.