

# PHILIPS

## AVENT

### Nipplette™

Nechirurgické řešení

Pro ploché nebo vpáčené  
bradavky

2 pomůcky Nipplette a 2 prsní  
vločky



SCF152/02



## Jednoduché, účinné řešení pro vpáčené bradavky

### Klinicky prokázané výsledky\*

Nipplette™ pomáhá kojit matkám s plochými či vpáčenými bradavkami. Tento jedinečný a revoluční nástroj představuje snadné, nechirurgické a dlouhodobé řešení. Po několika týdnech stálého nošení zůstane bradavka vztyčená.

#### **Snadné a pohodlné**

- Další informace
- Pomůcka pro ploché nebo vpáčené bradavky
- Jednoduchý postup

#### **Bez chirurgického zákroku – jemné sání**

- Klinicky prokázané výsledky

#### **Snadné a diskrétní – vhodné pro bradavky všech velikostí**

- Ideální k používání během prvních 6 měsíců těhotenství

# Přednosti

## Pro ploché nebo vpáčené bradavky

Vpáčené bradavky nebo bradavky, které nelze vytáhnout, postihují až 10 % žen, kterým způsobují psychologický stres a ztěžují kojení matce i dítěti. Když dítě saje z prsu, mělo by dojít k vytažení bradavky. Pokud ne, pomůcka Nipplette™ je jednoduchým, pohodlným řešením, které může pomoci. Toto zařízení umožňuje ženám s plochými nebo vpáčenými bradavkami pohodlně kojit bez nutnosti využití invazivní operace\*. Skládá se z průhledného kloboučku na bradavku s těsnicí obrubou, který se připevňuje k ventilu a otvoru stříkačky.

## Kdy se použití doporučuje

V ideálním případě by se pomůcka Nipplette měla používat ještě před otěhotněním a nosit po 8hodinových intervalech během dne nebo noci\*. Pokud nejsou prsa příliš citlivá, lze ji používat také během prvních šesti měsíců těhotenství k dosažení trvalé korekce nebo po narození dítěte, jen několik minut před kojením. Pomůcka Nipplette bradavku sáním vytáhne, aby se dítě mohlo snadno přisát a mohlo si během prvních několika dnů lépe zvykat na kojení. Po skončení kojení lze provést trvalou kosmetickou korekci; v takovém případě lze pomůcku Nipplette čas od času opět použít.

## Jemné sání

Klobouček se jednou rukou přidrží na dvorci bradavky. 5ml stříkačkou se odsaje vzduch, aby se bradavka přisála ke dvorci. Sání řídí uživatelka a může za bradavku zatáhnout tak silně, jak jí to vyhovuje. Jakmile dojde k vytažení bradavky, může uživatelka po opatrném odpojení stříkačky od ventilu dále provádět všechny běžné činnosti a pomůcku Nipplette nosit diskrétně v podprsence. Na začátku kojení se používání doporučuje co nejčastěji\*.

## Prokázaný klinický úspěch

Byly prováděny klinické zkoušky\*, které u pomůcky Nipplette prokázaly úspěšné dosažení trvalé korekce plochých či vpáčených bradavek, ať už tento stav existoval od puberty, nebo byl následkem operace zmenšení prsou. Těhotné ženy, které měly obavy ohledně kojení a nepodstoupily operaci prsou, všechny začaly úspěšně kojit. Trvalé korekce se normálně dosahuje za dobu mezi jedním a třemi měsíci stálého používání.

## Další informace

Jakmile začne mléko plně proudit, pomůcka Nipplette nebude fungovat. Do té doby si však již dítě zvykne na správné přisávání k bradavce.

# Specifikace

## Snadné čištění

Čištění v teplé mýdlové vodě

## Vzhled

Nenápadný design

## Materiál

**Absorbční vložky:** Dermatologicky testováno  
**Nipplette:** Polypropylen

## Co je součástí

**Jednorázová prsní vložka:** 2 ks  
**Nipplette:** 2 ks

## Jednoduchost použití

**Snadné skrytí pod oblečením:** Stlačovací stříkačka pro uvolnění vakua

## Funkce

**Řešení pro ploché bradavky:** Použijte jemné sání

## Stupně vývoje

**Fáze:** Před otěhotněním, 0–6 měsíců, Fáze zahájení kojení



\* McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Nipplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) Vol 47, strany 46–49

\* Tato část obsahuje názory spotřebitelů na výrobek. Společnost Philips se distancuje od obsahu zadaného spotřebiteli v této části, a proto žádné technické informace nebo doporučení týkající se používání výrobku, které jsou v této části uvedeny, nejsou oficiálními informacemi společnosti Philips.