

PHILIPS

AVENT

Nipplette™

Soluția nechirurgicală

Pentru mameloane plate sau omblicate

2 Nipplette și 2 tamponi pentru sâni

 Product Picture

SCF152/02



Soluție simplă, eficientă pentru mameloanele omblicate

Rezultate dovedite clinic*

Nipplette™ ajută mamele cu mameloane aplatizate sau omblicate să alăpteze. Acest instrument unic și revoluționar oferă o soluție nechirurgicală simplă și de durată. După câteva săptămâni de purtare continuă, mamelonul își va păstra forma alungită.

Ușor și comod

- Informații suplimentare
- Un dispozitiv pentru mameloanele plate sau omblicate
- O procedură simplă

Nechirurgical – aspirație delicată

- Rezultate dovedite clinic

Simplu și discret – potrivit pentru orice mărime de mamelon

- Utilizare ideală înainte sau în primele 6 luni de sarcină

Repere

Pentru mameloane plate sau ombilicate

Mameloanele ombilicate sau neprotractile afectează până la 10 % dintre femei, provocând suferință psihologică și îngreunând alăptarea la sân pentru mamă și bebeluș. Acțiunea de supt a bebelușului ar trebui să tragă mamelonul afară. În caz contrar, Nipplette™ este o soluție simplă și confortabilă care poate ajuta. Dispozitivul permite femeilor cu mameloane plate sau ombilicate să alăpteze la sân în mod confortabil, fără a necesita operații invazive*. Constă dintr-un mulaj mamelonar transparent cu margine de etanșare, atașat la o supapă și un port pentru seringă.

Când se recomandă utilizarea

În mod ideal, Nipplette ar trebui utilizat înainte de sarcină și purtat pe perioade de 8 ore, ziua sau noaptea*. Dacă sânii nu sunt prea sensibili, se poate utiliza și în primele șase luni de sarcină pentru a obține o corecție permanentă sau după nașterea copilului, timp de câteva minute înainte de fiecare alăptare. Nipplette va aspira mamelonul în afară, permițând copilului să se atașeze ușor la sân și ajutând la stabilizarea alăptării în primele câteva zile. Corecția cosmetică permanentă poate fi efectuată după terminarea alăptării. În acest caz, Nipplette poate fi aplicat din nou din timp în timp.

Aspirație delicată

Cupa se ține peste areola mamelonului cu o mână și aerul este extras cu ajutorul unei seringi de 5 ml, astfel încât mamelonul să poată fi aspirat în ea. Puterea de sucțiune poate fi controlată de către persoana care îl folosește, în funcție de starea de confort dorită. După ce mamelonul este tras în afară și seringă este scoasă cu atenție din supapă, poți continua activitatea normală și poți purta discret Nipplette în sutien. Utilizarea inițială este încurajată cât mai mult posibil*.

Succes clinic dovedit

Testele clinice* efectuate pe Nipplette au indicat succesul obținerii unei corecții permanente a mameloanelor aplatizate sau ombilicate, indiferent dacă starea a existat din pubertate sau a fost rezultatul unei intervenții chirurgicale de micșorare a sânilor. Cu condiția să nu fi suferit intervenții chirurgicale la sân, femeile însărcinate preocupate de alăptare au reușit să alăpteze la sân cu succes. În mod normal, o corecție permanentă este obținută după una până la trei luni de utilizare continuă.

Informații suplimentare

Nipplette nu va funcționa odată ce lactația se instalează complet. Totuși, până atunci, bebelușul se va fi obișnuit să se atașeze cu succes la sân.

Specificații

Etape de dezvoltare

Fază: Înainte de sarcină, 0 - 6 luni, Faza de inițiere a alăptării

Include

Tampon de unică folosință pentru sân: 2 buc.
Nipplette: 2 buc.

Material

Tampoane pentru sânii: Testat dermatologic
Nipplette: Polipropilenă

Design

Design discret

Ușor de utilizat

Ușor de mascat sub haine: Împinge seringă pentru a elibera aspirarea

Funcții

Soluție pentru mameloanele aplatizate:
Utilizează aspirarea delicată

Ușor de curățat

Curăță cu apă fierbinte și săpun



* McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), Nipplette: instrument de corectare nechirurgicală a mameloanelor ombilicate, British Journal of Plastic Surgery (1994) vol. 47, paginile 46-49

* Această secțiune conține opinii ale consumatorilor cu privire la produs. Philips se disociază de conținutul introdus de consumatori în această secțiune și, în consecință, informațiile tehnice și/sau recomandările privind utilizarea produsului incluse în aceasta nu sunt destinate utilizării ca informații oficiale Philips.