

**PHILIPS**

**AVENT**

**Nipplette™**

Ei tarvetta kirurgiaan

Sisäänpäin kääntyneille  
nänneille

1 Nipplette ja 2 liivinsuojaa



Product Picture

SCF152/01



## Helppo ratkaisu sisäänpäin kääntyneille nänneille

### Kliinisesti todistetut tulokset\*

Nipplette™ edistää imettämistä, jos nännit ovat matalat tai sisäänpäin kääntyneet. Tämä ainutlaatuinen väline takaa pitkäkestoisen ratkaisun ilman kirurgiaa. Jatkuvassa käytössä nänni nousee pystyasentoon muutamassa viikossa.

#### **Helppo ja miellyttävä**

- Lisätietoja
- Laite matalille tai sisäänpäin kääntyneille nänneille
- Yksinkertainen toiminta

#### **Ei vaadi kirurgiaa – hellävarainen imemisliike**

- Kliinisesti todistetut tulokset

#### **Yksinkertainen ja huomaamaton – sopii kaikenkokoisille nänneille**

- Ihannetapauksessa ennen raskautta tai kuuden ensimmäisen raskauskuukauden aikana

# Kohokohdat

## Sisäänpäin kääntyneille nänneille

Jopa kymmentä prosenttia naisista vaivaavat sisäänpäin kääntyneet nännit tai nännit, jotka eivät nouse pystyyn. Siitä aiheutuu ahdistusta, mikä tekee imetyksestä vaikeaa äidille ja vauvalle. Imemisliikkeen pitäisi nostaa nänni esiin. Jos näin ei tapahdu, Nipplette™ on yksinkertainen ja miellyttävä ratkaisu. Laitteen avulla naiset, joilla on matalat tai sisäänpäin kääntyneet nännit, voivat imettää miellyttävästi turvautumatta kirurgiaan\*. Se koostuu venttiiliin ja ruiskuliitännästä yhdistetystä läpinäkyvästä kupista, jossa on tiivistysrengas.

## Suosittelava käyttöajankohta

Ihannetapauksessa Nippletteä olisi käytettävä ennen raskautta 8 tunnin jaksoissa päivällä ja yöllä\*. Jos rinnat eivät ole kovin arat, sitä voi käyttää myös kuuden ensimmäisen raskauskuukauden aikana pysyvän tuloksen saavuttamiseen tai synnytyksen jälkeen muutaman minuutin ajan aina ennen imetystä. Nipplette nostaa nännin esiin, jolloin vauva saa helpommin otteen. Se helpottaa rintaruokintarutiinia ensimmäisinä päivinä. Imetyksen loputtua seurauksena voi olla pysyvä kosmeettinen muutos, ja silloinkin Nippletteä voi käyttää ajoittain.

## Hellävarainen imemisliike

Kuppia pidetään nänninpihalla yhdellä kädellä ja samalla imetään ilmaa pois 5 ml:n ruiskulla, jolloin nänni nousee pystyyn. Käyttäjä hallitsee imua, joten hän voi käyttää niin suurta voimaa kuin tuntuu miellyttävältä. Kun nänni on pystyssä ja käyttäjä on irrottanut ruiskun varovasti venttiilistä, hän voi jatkaa normaaleja toimiaan. Nipplette pysyy huomaamattomasti rintaliivien sisällä. Laitetta on suositeltavaa käyttää aluksi mahdollisimman paljon\*.

## Toimivuus todistettu kliinisesti

Nippletteä koskevissa kliinisissä tutkimuksissa\* on osoitettu, että matalat tai sisäänpäin kääntyneet nännit ovat korjaantuneet pysyvästi, riippumatta siitä, onko nännien muutos tapahtunut murrosiässä vai aiheutunut rintojen pienennysleikkauksesta. Naisille, joille ei ollut tehty leikkausta ja jotka olivat raskauden aikana huolissaan imetyksen onnistumisesta, pystyivät imettämään ongelmitta. Pysyvä muutos saavutetaan tavallisesti 1–3 kuukauden jatkuvassa käytössä.

## Lisätietoja

Nipplette ei toimi, kun maidontulo on täysin käynnistynyt. Siihen mennessä vauva on oppinut saamaan kunnon otteen nännistä.

# Tekniset tiedot

## Helppo puhdistaa

Puhdista kuumassa pesuainevedessä.

## Muotoilu

Huomaamaton muotoilu

## Materiaali

Liivinsuojat: Dermatologically tested  
Nipplette: Polypropeeni

## Sisältö

Kertakäyttöinen liivinsuoja: 2 kpl  
Nipplette: 1 kpl

## Helppokäyttöinen

Helppo käyttää huomaamattomasti  
vaatteiden alla: Vapauta imu painamalla ruiskua

## Toiminnot

Ratkaisu litteille nänneille: Käyttää  
hellävaraista imua

## Kehitysvaiheet

Vaihe: Before Pregnancy, 0 – 6 months,  
Breastfeeding initiation phase

