

PHILIPS

AVENT

Nipplette™

En icke-kirurgisk lösning

För plana eller indragna
bröstvårtor

1 Nipplette och 2 amningskupor



Product Picture

SCF152/01



Enkel och effektiv lösning för indragna bröstvårtor

Kliniskt bevisade resultat*

Nipplette™ hjälper mammor med plana eller indragna bröstvårtor att amma. Det här unika och revolutionerande verktyget ger en enkel, icke-kirurgisk och varaktig lösning. Efter några veckors kontinuerlig användning blir bröstvårtan utdragen.

Enkel och bekväm

- Ytterligare information
- En enhet för plana eller indragna bröstvårtor
- En enkel procedur

Icke-kirurgisk – varsam sugrörelse

- Kliniskt bevisade resultat

Enkel och diskret – passar alla bröstvårtsstorlekar

- Optimal användning är före eller under de sex första månaderna av graviditeten

Funktioner

För plana eller indragna bröstvårtor

Upp till 10 % av kvinnor har indragna eller plana bröstvårtor, vilket kan leda till psykisk stress och göra amning svårt för både mamman och barnet. Barnets sugmönster bör dra ut bröstvårtan, och gör det inte det är Niplette™ en enkel och bekväm lösning som kan hjälpa till på traven. Enheten gör det möjligt för kvinnor med plana eller indragna bröstvårtor att amma bekvämt utan att kirurgi behövs*. Den består av en genomskinlig bröstvårtsform med en tätningskant som sitter fast på en ventil och en öppning för sprutan.

När användning rekommenderas

Niplette ska helst användas innan graviditeten och bäras i åttatimmarsperioder under dagen eller natten*. Om bröstet inte är för känsliga kan den även användas under graviditetens första sex månader för att få en permanent korrigering, eller efter att barnet har fötts i några minuter före varje amning. Niplette suger ut bröstvårtan, vilket gör att barnet enkelt får grepp, och hjälper till att få igång amningen under de första dagarna. Den permanenta kosmetiska korrigeringen kan påverkas när du väl har slutat amma. I så fall kan du använda Niplette då och då för att åtgärda detta.

Skonsam sugrörelse

Den lilla koppen hålls över vårtgården med ena handen och luft dras ut med en 5 ml spruta så att bröstvårtan sugas in i koppen. Användaren styr sugkraften och kan dra i bröstvårtan så hårt som känns behagligt. När bröstvårtan har dragits ut kan användaren, efter att försiktigt ha tagit bort sprutan från ventilen, fortsätta med sina normala aktiviteter och bära Niplette diskret innanför bh:n. Den första användningen rekommenderas i hög grad*.

Kliniskt bevisade resultat

Kliniska tester* som genomförts på Niplette har bevisat att en permanent korrigering av plana eller indragna bröstvårtor har uppnåtts, oavsett om ett sådant tillstånd har existerat sedan puberteten eller har uppstått efter en bröstförminskning. Gravida kvinnor som oroade sig över amningen kunde börja amma, förutsatt att de inte hade genomgått en bröstoperation. En permanent korrigering sker normalt efter 1–3 månaders kontinuerlig användning.

Ytterligare information

Niplette fungerar inte vid fullt mjölkflöde, men vid det laget har barnet vant sig vid att få ett bra grepp om bröstvårtan.

Specifikationer

Enkel att rengöra

Rengör i varmt vatten med tvål: Yes

Design

Diskret formgivning: Yes

Material

Amningskuper: Dermatologically tested

Niplette: Polypropylene

Vad medföljer?

Ultrabekväma amningskuper för engångsbruk:

2 delar

Niplette: 1 delar

Lättanvänd

Enkel att dölja under kläder: Push syringe to release vacuum

Funktioner

Lösning för platta bröstvårtor: Use gentle suction

Utvecklingsstadier

Stadie: Before Pregnancy, 0 – 6 months, Breastfeeding initiation phase

