

PHILIPS

AVENT

Nipplette™

En ikke-kirurgisk tilnærming

Flate eller innovervendte
brystvorter

1 Nipplette og 2 ammeinnlegg



SCF152/01



En enkel og effektiv løsning for innovervendte brystvorter

Resultater som er klinisk bevist*

Nipplette™ hjelper mødre med flate eller innovervendte brystvorter med ammingen. Dette unike og revolusjonerende instrumentet er en enkel, ikke-kirurgisk og langvarig løsning. Ved regelmessig bruk blir brystvortene utovervendte i løpet av bare noen uker.

Enkel og komfortabel

- Tilleggsinformasjon
- Et apparat for flate eller innovervendte brystvorter
- En enkel prosedyre

Ikke-kirurgisk – skånsom sugefunksjon

- Resultater som er klinisk bevist

Enkel og diskret – passer til brystvorter i alle størrelser

- Ideell for bruk før eller i de første seks månedene av svangerskapet

Høydepunkter

Flate eller innovervendte brystvorter




Innovervendte brystvorter eller brystvorter som ikke stikker ut, berører opptil 10 % av kvinner, noe som gir mentalt stress og gjør ammingen vanskeligere for mor og barn. Babyens suging skal trekke ut brystvorten. Hvis ikke er Niplette™ en enkel og komfortabel løsning som kan hjelpe. Apparatet gjør det mulig for kvinner med flate eller innovervendte brystvorter å amme komfortabelt uten behov for kirurgiske inngrep*. Niplette består av en gjennomsiktig brystvorteform og en forseglingsflens, som er festet til en ventil og sprøyteåpning.

Anbefalt bruk

Niplette skal ideelt sett anvendes før graviditeten og brukes i 8-timers perioder om dagen eller natten*. Hvis brystene dine ikke er for følsomme, kan den også brukes i de første seks månedene av svangerskapet for å oppnå en permanent korreksjon, eller i noen minutter før hver amming etter at babyen er født. Niplette suger brystvorten ut og lar babyen enkelt få tak, og bidrar til å etablere ammingen de første dagene. Den permanente kosmetiske korrigeringen kan da skje når ammingen er over, og hvis dette er tilfellet, kan Niplette brukes igjen med jevne mellomrom.

Skånsomme sugebevegelser

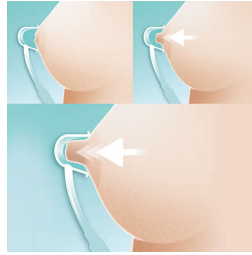

Koppen holdes over hele brystvorten med én hånd, og luft trekkes ut med en 5 ml sprøyte slik at brystvorten blir sugd inn i den. Brukeren har kontroll over sugingen og kan dra i brystvorten etter hva som er behagelig. Når brystvorten er trukket ut, og sprøyten er fjernet fra ventilen, kan brukeren fortsette med vanlige aktiviteter og bruke Niplette diskret inni behåen. Det er anbefalt å bruke den så mye som mulig i starten*.

Bevist klinisk suksess

Kliniske tester* utført på Niplette har bevist suksess med å gjennomføre en permanent korreksjon av flate eller innovervendte brystvorter, uansett om tilstanden har eksistert siden puberteten eller er resultat av brystreduksjonskirurgi. Såfremt de ikke hadde gjennomgått brystkirurgi, kunne gravide kvinner som var bekymret for ammingen, gi brystet med godt resultat. En permanent korreksjon oppnås vanligvis etter mellom én og tre måneders kontinuerlig bruk.

Tilleggsinformasjon

Niplette fungerer ikke når melken begynner å strømme ordentlig, men da skal babyen til gjengjeld ha blitt vant til å få tak i brystvorten.

Spesifikasjoner

Utviklingstrinn

Trinn: Før graviditeten, 0–6 måneder, Innledningsfasen til ammingen

Følgende er inkludert:

Disposable breast pad: 2 pcs

Materiale

Breast pads: Dermatologisk testet

Niplette: Polypropylen

Følgende er inkludert:

Niplette: 1 pcs

Utforming

Diskré design

Enkel i bruk

Skjules enkelt under klær: Trykk på sprøyten for å løse ut vakuum

Funksjoner

For flate brystvorter: Bruk skånsom sugeseffekt

Enkel å gjøre ren

Rengjør i varmt såpevann

