

# PHILIPS

## AVENT

### Накладки на соски

Тепло материнской груди при кормлении

Защита сосков от раздражения

Маленькие (15 мм)

2 шт.



SCF153/01



## Для долгого и комфортного кормления грудью\*

Удобный захват для малыша и бережный контакт с вашей кожей\*

Накладки на соски созданы для кормления грудью при возникновении проблем с кормлением или захватом. Сверхтонкая накладка в форме бабочки обеспечивает контакт малыша с материнской грудью кожа к коже.

#### Футляр для обеспечения гигиены

- Легко содержать чистыми в гигиеничном футляре для переноски и стерилизации

#### Легкий захват для малыша\*

- Созданы для устранения проблем с захватом

#### Функции устройства


- Удобная форма
- Во время кормления малыш будет ощущать тепло материнской груди

#### Когда использовать накладку на сосок

- Малыш сможет пить с удобной ему скоростью
- Создано для матерей, испытывающих дискомфорт при кормлении грудью


# Особенности

## Уникальная форма бабочки

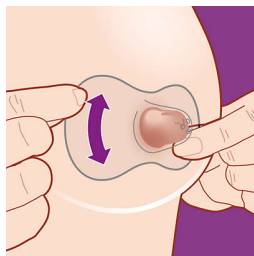


Наши накладки на соски имеют форму бабочки и предназначены для контакта малыша с кожей матери. Благодаря особой форме возможен контакт с грудью не только носом, но и подбородком, что поможет малышу почувствовать запах и кожу матери. Просто разместите накладку по центру соска — так малыш сможет захватить всю ареолу. Защитите свои соски и поддерживайте тактильную связь с вашим малышом.

## Созданы для легкого захвата\*

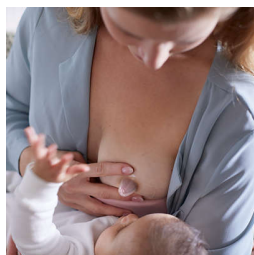

Наши накладки на соски помогут малышам справиться с захватом, а вам — дольше кормить грудью\*. Накладки помогут мамам с плоскими и втянутыми сосками, а также малышам, которым трудно сосать: накладки обеспечат легкий захват и стабильную форму соска при паузах во время кормления.

## Защита сосков во время кормления

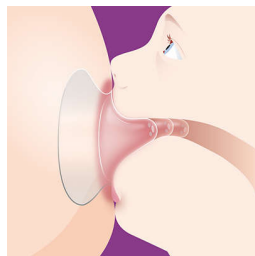


Накладки на соски созданы для комфортного кормления и подойдут для мам, которые испытывают раздражение, боль или воспаление сосков. Накладки помогут сократить вытягивание сосков во время кормления и кормить ребенка с максимально комфортными ощущениями.

## Кормите в темпе, удобном малышу



Если поток грудного молока необходимо контролировать либо у ребенка не хватает сил, чтобы пить его, накладки для сосков также помогут вам решить возникшую проблему. Три отверстия на кончике накладки помогут стабилизировать поток в случае чрезмерного количества молока. Таким образом малыш сможет пить в удобном темпе даже в случае слишком большого количества молока у матери.

## Доступно в двух размерах

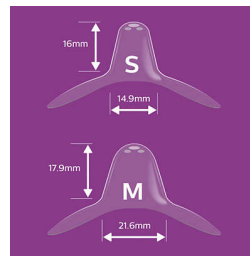

Накладки на соски доступны в двух размерах, чтобы вы могли подобрать их под размер своей груди. Маленькие накладки подойдут для сосков от 12 мм, а средние — до 21 мм. Для определения размера просто расположите одно из специальных колец поверх соска. Поверните накладку по часовой стрелке и направьте сосок в отверстие. Затем растяните основание накладки по ареоле. Если между соском и силиконовой накладкой есть зазор 2 мм, этот размер вам подходит. Совет: размеры основаны на размерах непосредственно соска, а не ареолы.

## Легкая очистка



Перед каждым использованием накладки на соски нужно очищать; это занимает менее 10 минут. Поместите их в кипящую воду на 5 минут либо используйте гигиеничный футляр. Поместите хорошо промытые накладки в футляр и добавьте 25 мл воды. Затем поместите футляр в микроволновую печь мощностью 750–1000 Вт на три минуты. Дайте накладкам остыть в течение пяти минут. Затем вылейте воду; накладки готовы к использованию. Используйте удобный гигиеничный футляр в поездках, чтобы хранить накладки в чистоте.

# Характеристики

## Дизайн

Дизайн в форме бабочки

## Материал

Накладки на соски: Без бисфенола-А\*\*, силикон

## В комплект входят:

Накладки на соски 15 мм: 2 шт.

Гигиеничный футляр для переноски: 1 шт.



\* При плоских или втянутых сосках, чрезмерной чувствительности и болевых ощущениях при кормлении, проблемах с захватом у детей

\*\* Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

\*\*\* Этот раздел содержит мнения пользователей о данном продукте. Компания Philips не несет ответственности за содержимое оставленных пользователями в этом разделе комментариев и содержащихся в них технических сведений и рекомендаций, а также не считает их официальной информацией Philips.

\*\*\*\* Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

\*\*\*\*\* RU № 2021/15810 от 22.11.2021