

PHILIPS

Peak Flow - Medidor de flujo máximo

PersonalBest

Medición con código colores en 3 zonas

Le ayudamos a tener siempre el control

Adecuado para niños y adultos




Destacados

El control del flujo máximo a su




Un mango plegable mantiene la mano alejada de los indicadores; también sirve de ayuda como técnica para obtener una lectura correcta.

Codificación con colores en tres zonas

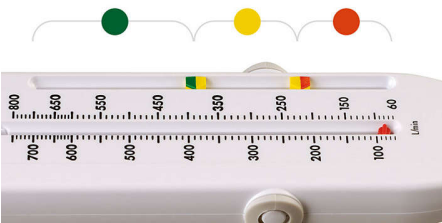

Los indicadores con código de colores definen tres zonas de medición que ayudan a ver si su estado o el de su hijo es estable o ha empeorado.

Medidas ajustables

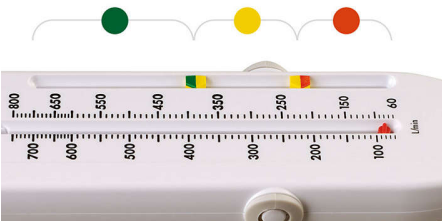

El profesional sanitario puede establecer los indicadores con código de colores para representar los siguientes porcentajes del

mejor flujo máximo personal: zona verde 80 – 100% del mejor valor personal; zona amarilla 50 – 80 % del mejor valor personal; zona roja 50 % o menos del mejor valor personal

Almacenamiento y protección



El mango plegable se transforma en un resistente estuche de almacenamiento para proteger el medidor.

Limpieza sencilla



PersonalBest se puede lavar con agua caliente y jabón líquido suave o en la bandeja superior del lavavajillas y secar al aire.

Especificaciones

Diseño

Indicadores de colores: 3 zonas de manejo del asma

Detalles del producto

Pieza principal: Plástico ABS

Cubierta y mango: Polipropileno

Escala: Estampado en caliente, alcohol resistente

Datos de rendimiento

Exactitud: +/- 10% o 10 L/min

Repetibilidad: Menor o igual al 5 % o 10 l/min

Linealidad: Menor o igual al 5 % o 10 l/min

Resistencia al flujo: Menor o igual a 0,35 kPa/l/min

Frecuencia de respuesta: Menor o igual al 12 % o 15 l/min

Datos de calibración

Rango de medición: 60-800 L/min

Resolución de la escala

10 L/min: de 60 – 700 L/min

20 L/min: de 700 – 800 L/min

