

PHILIPS

Energy Light – giver dig energien tilbage

EnergyUp

Samme positive effekt som sollys

Med ledning

svarer til 10.000 lux



HF3420/01



Plejer du at føle dig mere træt om vinteren?

Kompakt blåt lys giver energi på samme måde som klart dagslys

Langt de fleste i Norden føler sig mere trætte om vinteren. Manglen på sollys i vinterhalvåret har en negativ indvirkning på vores humør og vores helbred. En del af os udvikler endda efterårs- eller vinterdepressioner. Det er ikke så underligt, at vi føler os mindre energiske om vinteren – sol- og dagslys er nødvendigt for, at kroppen skal fungere normalt. I samråd med forskere har Philips skabt EnergyLight. Når du anvender Philips EnergyLight, udsondres der de samme stoffer i kroppen, som når du opholder dig udendørs på en solrig sommerdag, og du genvinder din energi.

Klinisk dokumenteret – giver energi helt naturligt med lys

- Forbedrer energiniveauer, vågenhed og humør
- Bekæmper energidyk, træthed og vintertræthed
- Lys er en naturlig energizer, der passer til en sund livsstil
- Uafhængig forskning bekræfter forbedrede energiniveauer

Kompakt design på farten – brug det hvor og når som helst

- Lige så effektivt som meget større hvide lyskilder med 10.000 lux
- Resultater på blot 20-30 min/dag. Brug, mens du læser, arbejder

Avancerede Philips LED'er leverer behageligt lys

- Har en lignende effekt på velværet som en solrig blå himmel
- Ensartet lysstyrke, ultimativ øjenkomfort
- 100 % UV-frit lys – sikkert for øjne og hud
- Mere end 100 års know-how om Philips Lighting og Healthcare



asimpleswitch.com

Vigtigste nyheder

Øger energiniveauet

Vore dages travle, moderne livsstil kræver en optimal arbejdsindsats hele dagen igennem – men selv de stærkeste personer lider af tab af energi eller nedture, især når de fratages det naturlige dagslys, f.eks. på kontoret om vinteren. EnergyUp bekæmper nedture og forbedrer humøret med sollysets naturlige, energigivende kraft, stimulerer kroppen og øger årvågenheden. Med blot en enkelt 20-30 minutters behandling, som har vist sig effektiv, kan du bruge EnergyUp, når du har brug for at lade op og få energi: Kom i gang om morgenen, kom i gang igen efter frokost, eller oprethold energiniveauet gennem hele dagen.

Bekæmper energidyk

Mangel på lys i de mørkere vintermåneder får mange til at opleve et mærkbart fald i energiniveauet og nedtryktethed, når efteråret sætter ind. Kendt som "vintertræthed" (eller sæsonbetinget affektiv lidelse, SAD) kan symptomerne få den ramte til at føle sig nedtrykt, ugidelig og træt i flere uger eller endda måneder og påvirke vedkommendes personlige ydeevne og humør. Philips EnergyUp bekæmper disse symptomer på vintertræthed med sollysets naturlige, energigivende kraft og forsyner kroppen med sommerens vitalitet gennem de mørke vintermåneder.

Lys er en naturlig energizer

Dagslys er afgørende for dit velbefindende og for at holde dig i form og fyldt med energi hele dagen – lige som sund ernæring og regelmæssig motion. Philips EnergyUp efterligner dagslysets naturlige, energigivende kraft på en klar solskinsdag og stimulerer bestemte receptorer i øjnene, der udløser kroppens naturlige reaktion på sollys. Den får dig til at føle dig mere energisk, aktiv og vågen. På dage, hvor dit energiniveau er lavt, og du føler dig træt, fremmer EnergyUp helt naturlig vitaliteten.

Klinisk dokumenterede resultater

EnergyUp er klinisk testet til at forbedre energiniveauet, årvågenheden og humøret og derved hjælpe med til at bekæmpe

vintertræthed [1] og være effektiv mod vintertristhed [2, 3]. Uafhængig forskning viser, at 70 % af personer, der har prøvet EnergyUp Intense blue fandt, at deres energiniveau blev forbedret efter blot to ugers brug (undersøgelse med 823 deltagere i Storbritannien i 2011 foretaget af Bzz Agent). Yderligere 84 % var tilfredse med den måde, EnergyUp Intense blue hjalp dem til at bekæmpe vintertræthed (undersøgelse med 229 deltagere i Holland i 2011 foretaget af MetrixLab).

Kun 20-30 minutter om dagen



Kun 20-30 minutter om dagen med EnergyUp har vist sig at give ny energi og fremme et positivt humør. Du skal blot placere energilampen en armslængde væk, så lyset rammer øjnene. Du behøver ikke at se direkte ind i lyset, så du kan multitask med EnergyUp og nyde godt af den ved morgenmaden, eller når du arbejder eller læser. Da lampen er uden UV-stråler og behagelig og sikker for øjnene, kan du bruge den, så længe du vil i løbet af dagen (hvis den bruges om aftenen eller inden sengetid, kan den udskyde søvnen). Ved daglig brug er det sandsynligt, at du mærker en energigivende effekt fra EnergyUp inden for 1-2 uger.

Ultimativ øjenkomfort



EnergyUp bruger et unikt belysningssystem til at styre genskinnets og dermed give komplet øjenkomfort. En unik kombination af diffusere,

reflektorer og filtre fordeler det kraftige LED-lys jævnt hen over hele skærmens overflade. Dette styrer genskinnets og forhindrer lyspunkter og giver et diffust lys, der altid er komfortabelt og giver en behagelig oplevelse.

UV-fri



Det rene blå lys fra EnergyUp øger energiniveauet helt naturligt. Effekten svarer til en solskinsdag, men uden UV-strålerne fra sollyset.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer omkostninger, energiforbrug og CO₂-udledning. Hvordan? De tilbyder en markant miljømæssig forbedring på et eller flere af Philips' grønne fokusområder – energieffektivitet, emballage, farlige stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret lang levetid.

Specifikationer

Velvære med lys

Øg energiniveauet
Bliv mere opmærksom
Føl dig mere afslappet
Bekæmp vintertræthed/-tristhed
Få bedre humør
Bekæmp jetlag

Komfortabelt lys

Specifikt blå lys
En effekt, der svarer til 10.000 lux
Jævn skærmlystæthed

Nem at anvende

Lysintensitetsindstillinger: 3
Afbryderknap
Betjening med én knap

Bærbar

Lille, kompakt design

Tekniske

Strømadapter: 10 W
Spænding: 100/240 V
Frekvens: 50/60 Hz
Isoleret strømstik: Klasse II (dobbelt isoleret)
Pæretype: Højstyrke-LED
Pæres levetid: 10.000 timer
Ledningslængde: 180 cm

Vægt og dimensioner

Produktmål: 14,3 × 14,3 × 3,5 cm
Produktvægt: 0,4 kg
F-boksens mål: 18,0 × 18,9 × 10,4 (B x H x

D) cm

Ydre emballage: 2
Vægt: F-box: 0,8 kg

Logistiske data

Oprindelsesland: Kina
CTV-kode: 884342001

Sikkerhed og regler

Medical Device Directive: 93/42/EØF og
2007/47/EF
CE 0344-certificeret
UV-fri: Ingen eller næsten ingen UV--stråling

