

PHILIPS

ACM066

# 用户手册



## 重要事项

### 警告

- 本口罩仅用于滤除雾霾PM2.5、花粉、细菌等固态颗粒物,不能替代工业用防毒口罩,请勿将本口罩用于防护有毒气体、化学烟雾等。若出现呼吸困难,或感觉不适,请尽快离开污染环境,并摘下口罩。
- 为保证防护效果,请正确佩戴口罩,确保口罩与脸部贴合。避免过长的胡须,鬓角,伤疤,或其他物体间隔在口罩和使用者脸部之间。
- 滤芯破损或污损,或在使用时感觉呼吸不畅,请即抛弃并更换新滤芯。
- 若皮肤对口罩过敏,应立即摘下口罩。
- 请勿将口罩留置在极高或极低温环境 (>60°C, 或<-20°C), 比如暴晒的车内。否则可能对产品造成不可逆损伤和安全风险。
- 风扇组件内置锂聚合物电池,使用或储存不当会导致电池漏电或漏液,甚至酿成火灾,导致财物损失,影响健康。
- 充电请使用原装USB连接线。请使用获得CCC认证的充电器充电,注意充电输入电压不超过5V。
- 请避免让风扇组件受到撞击或穿刺。请勿冲洗风扇组件,请勿把风扇浸泡在水或其他清洁剂里,否则可能导致风扇损坏或电池内部受损。即使风扇仍然能转动,也请勿继续使用。

- 如有以下情况,请在使用产品前咨询医生和医疗器械厂家:
  - 如果您患有呼吸系统疾病,或是孕妇;
  - 磁铁和口罩产生的电磁场可能会干扰医疗器械(如人工耳蜗)。
  - 如果您怀疑风扇与医疗器械发生干扰,请立即停止使用。

### 注意

- 本产品尺寸不适宜儿童使用。口罩不是玩具,请勿让儿童玩耍。
- 电动口罩的工作环境温度是-10°C到40°C。超出适宜温度范围口罩会停止工作。
- 电动口罩的适宜充电环境温度是10°C到35°C。超出适宜温度范围口罩可能充电缓慢,或无法充电。
- 在使用时,电动口罩上出现冷凝水是正常现象,不影响使用。请在停止使用时,将口罩在阴凉干燥处荫干。
- 请将飞利浦原装风扇组件,可替换口罩彩壳和滤芯配合使用,否则无法保证贴合和过滤效果。请勿单独使用可替换口罩彩壳,否则没有过滤效果。
- 因为密封包装,滤芯本身可能带有极少量原材料气味。该气味对人体无害。
- 本品属于个人卫生产品,请勿与他人共用。

## 弃置充电电池

- 只有在丢弃产品时才可取下充电电池。
- 确保产品未接入电源,且电池电量完全放空。
- 剪断电动风扇和电池之间的连接线,将电池一侧送往指定的回收中心。


## 电磁场 (EMF)

- 本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。


## 回收

- 弃置产品时,请不要将它与一般生活垃圾一同丢弃,应将其交给政府指定的回收中心。这样做有利于环保。
- 此产品包含内置充电电池,该电池不应与一般生活垃圾一起弃置。
- 强烈建议您携带产品前往政府收集点或飞利浦服务中心,让专业人员取下充电电池。
- 请遵循您所在国家/地区的电器及电子产品分类回收规定。正确弃置产品有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

## 产品概述

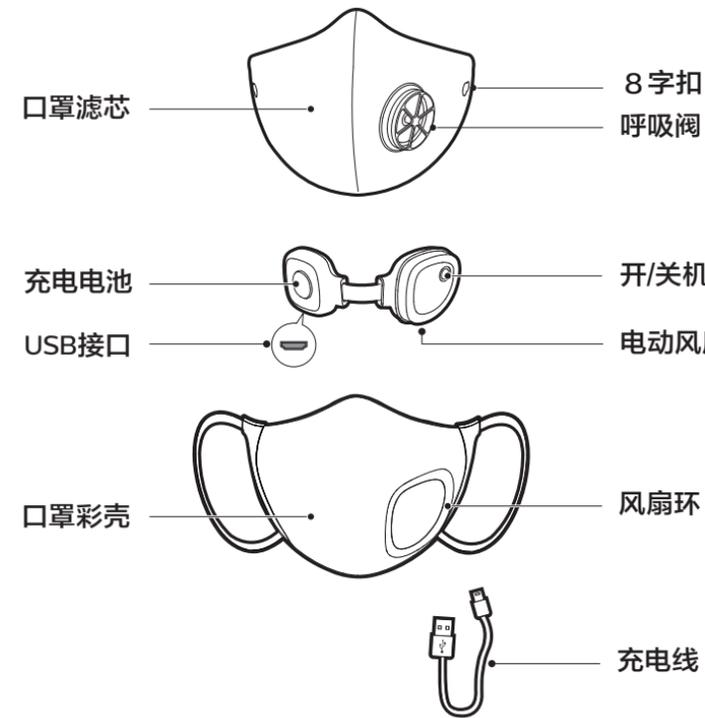


## 安装

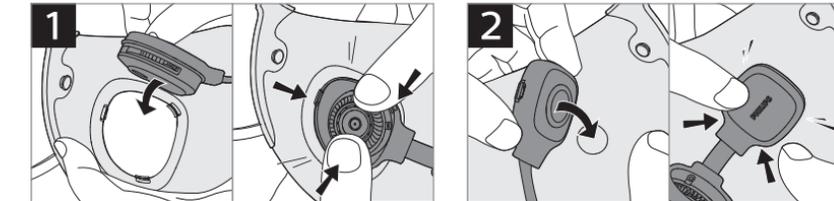

电动风扇一侧压入口罩彩壳上的风扇环,确保环上的三个卡钩都扣住风扇。

电池一侧吸在口罩彩壳内侧磁贴上。

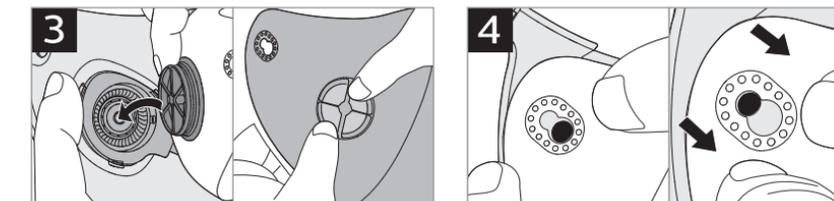


将滤芯呼吸阀与电动风扇对齐压紧。

先将滤芯8字扣上的大孔扣在口罩彩壳内侧的凸起上,然后向内侧拉紧,使得8字扣小孔卡入突起底部。

提示: 第一次使用时,无需安装风扇。

## 佩戴

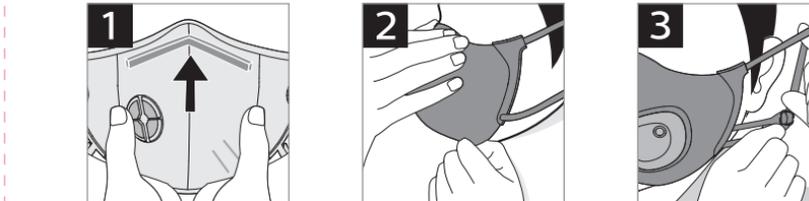


佩戴时注意,有泡棉的一侧朝上贴紧鼻子。

带上口罩,调整鼻夹,使口罩贴合鼻梁。

调整耳带长度,检查确认口罩紧贴于面部。

## 使用电动风扇

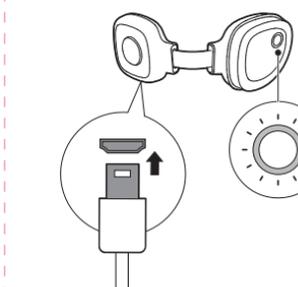

短按按钮(第1次) 第2次 第3次 第4次  
 开机进入低速运转 中速 高速 关机

### 充电时灯环状态

白灯闪烁: 正在充电  
 白灯稳定亮起: 充电完成  
 闪烁三次后熄灭: (环境温度过低或过高,无法充电)

# PHILIPS


产品：飞利浦电动新风口罩  
 型号：ACM066  
 电压/功率：3.8V / 0.8W  
 充电电压：5V  
 滤材级别：N95  
 口罩彩壳：涤纶，热塑纱  
 A类合格品

飞利浦（中国）投资有限公司  
 上海市静安区灵石路718号A1幢  
 全国顾客服务热线：4008 800 008



© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
 保留所有权利  
 出版日期：2020-04-21  
 3000 043 62503

电动部分和滤芯禁止水洗  
 口罩彩壳维护标签：

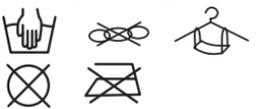

生产日期：请见产品包装  
 产地：中国浙江平湖

本产品根据企标  
 Q/PSH 001-2019 制造




注意：

- 初次使用前务必充电，直至白灯稳定亮起。
- 适宜充电环境温度是10-35°C。每次充电需要大约3小时。
- 电量不足时，电动风扇会快速变化风速，提示需要充电。
- 在低温环境中，使用时间会缩短。

## 清洁和维护

### 风扇组件：

- 清洁前，请确保风扇组件已关闭及没有连接任何电源。
- 如需清洁，可用柔软的湿布、或湿纸巾擦拭表面，请勿用水冲洗。

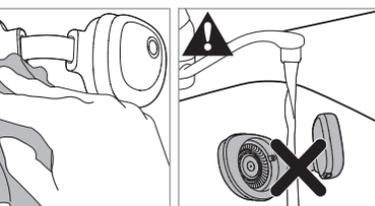

### 口罩彩壳：

- 口罩彩壳可以重复使用和清洗。清洗前，请确保口罩彩壳跟风扇组件和滤芯分离。
- 用柔软的湿布擦拭表面，或浸泡入水中，用中性洗涤剂轻柔手洗。
- 口罩彩壳为可更换附件。可购买不同配色的口罩彩壳，替换使用。

- 仅手洗，水温勿超过40摄氏度
- 不可揉拧
- 晾晒时请挂起口罩两侧耳带，否则容易造成口罩变形
- 不可干洗
- 不可熨烫

## 空气质量指数\* 使用寿命（小时）\*


0-50	122
51-100	57
101-150	37
151-200	28
201-300	17
301-500	8

\*基于PM2.5为首要污染物时

\*\*来自飞利浦内部实验室数据。单片滤芯累计使用的建议时长。具体更换时间可依据个人的使用习惯以及实际环境情况酌情调整。

注意：滤芯为一次性使用，不可水洗清洁。


## 储存

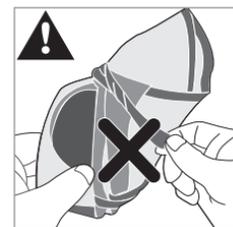

• 储存时，请勿用耳带捆扎口罩，否则容易造成口罩彩壳变形。

• 如果口罩彩壳出现压痕，请先将口罩彩壳用水润湿，然后用吹风机从内向外吹压痕部位，可以帮助恢复形状。

注意：务必先摘下风扇组件。控制温度，使吹风机与口罩彩壳保持一定距离，以免烫坏口罩彩壳材料。

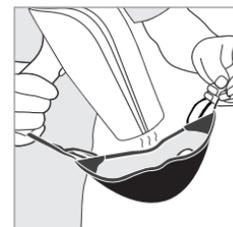

• 口罩长期存储前，请将风扇组件充电，并存储于阴凉干燥处。长时间储存不用时，六个月内进行一次充电维护。

## 故障排除

本章归纳了您在使用产品时最常遇到的问题。如果您无法根据下面的信息解决问题，请联系飞利浦客户服务热线：4008 800 008。

### 问题 可能的解决方法

电池续航能力变短	一次充电后，风扇的使用时间受风速设置和环境温度影响。长期使用过程中，电池续航能力下降是正常的。在正常工作环境下运行，充放电循环300次，电池能保持至少80%续航能力。非正常使用（如进水，极寒）会加速电池衰减。
连接USB线充电，充电指示灯不亮	如果连接USB线，指示灯闪动三次后熄灭。可能是环境温度过高或过低，无法充电。为保护电池性能，推荐在10°C到35°C范围内充电。如果连接USB线，指示灯不亮，可能是充电电压不足，请尝试其他充电器或充电线。
佩戴一段时间后，感觉风扇内有水汽	在冬季寒冷环境下，人体呼出的水汽可能会凝结，并从呼吸阀自然排出。水汽凝结不会影响产品安全和风扇性能。
感觉风扇速度不稳定	可能是电量接近耗尽，电动风扇会通过风速快速变化提示电量不足。也可能是在低温环境下，电动风扇自动调低转速。当外界温度回升，风速自动回升。
已经充好电，电动口罩在使用时突然关机	外界环境温度过低，风扇可能停止工作。此时按下开关键，风扇不会工作，指示灯会闪动三次后熄灭。当外界温度回升，风扇会恢复正常。

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
风扇组件	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
充电线	○	○	○	○	○	○
滤芯	○	○	○	○	○	○
可替换口罩彩壳	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

\* 该表格中所显示的“有害物质”在产品正常使用情况下不会对人身和环境产生任何伤害。  
 \* 该表格中所显示的“有害物质”及其存在的部件向消费者和回收处理从业者提供相关物质的存在信息，有助于产品废弃时的妥善处理。



### 保修及服务：

本产品是一件设计精良，用高品质元件制造之电器，在正常使用及保养下应能发挥其优越性能。在购买日期后一年内，若电动部件发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，飞利浦中国维修服务中心将为持证用户提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品。无论在保期中或保期后，只要飞利浦正式行销该产品的任何国家皆可获得维修服务。若飞利浦在当地无行销该项产品，飞利浦同样提供维修服务，但可能因未储备所需零件，维修时间可能较长，敬请谅解。若您需洽询相关资讯，或遇困难事项时，请联络当地飞利浦维修服务中心，或向飞利浦服务热线咨询。

中国顾客服务热线：  
 4008 800 008  
 （用户需承担本地通话费）。  
 网址：www.philips.com.cn

### 网上会员注册与产品注册：

- 1) 登陆 www.philips.com.cn/welcome
- 2) 点击“创建新账户”，创建您的飞利浦账号
- 3) 点击“注册产品”，通过产品名称或产品型号查找产品，完成产品注册

### 保修条例：

- 在购买日期后一年内，凡经本公司特约维修站人员确认为正常使用情况下，因制造工艺或元器件造成之损坏，

您都将获得免费保修服务。

- 此免费服务不包括需时常更换的易耗零配件如口罩滤芯和彩壳，及运输费。
- 用户请保留此联。
- 维修时请携同此证及发票正本。
- 此证若经涂改即作废。
- 此证须连同发票正本使用方为有效。以下情况将不能获得免费服务。
- 1 使用不当引起的人为损坏，例如接入不适当电源、使用不适当配件、不适当之安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等。因运输及其他意外而造成之损坏非经本公司认可之维修和改装。其他因不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏。

- 2 一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏。
- 3 正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。
- 保修证作为在规定期限及条件之内进行免费维修的保证，并不限制消费者的法定权利。
- 飞利浦提供一年全球联保服务，在产品由飞利浦正式销售的所有国家中，都提供保修和保修期满的维修服务。要求保修时，您需提供发票正本，且请求保修的日期还在保修期限之内。

飞利浦（中国）投资有限公司  
 上海市静安区灵石路718号A1幢