

PHILIPS

AVENT



Nipplette™

Ei tarvetta kirurgiaan

Sisäänpäin kääntyneille nänneille

2 Nippletteä ja 2 liivinsuojaa



SCF152/02

Helppo ratkaisu sisäänpäin kääntyneille nänneille Kliinisesti todistetut tulokset*

Nipplette™ edistää imettämistä, jos nannit ovat matalat tai sisäänpäin kääntyneet. Tämä ainutlaatuinen väline takaa pitkäkestoisen ratkaisun ilman kirurgiaa. Jatkuvassa käytössä nänni nousee pystyasentoon muutamassa viikossa.

Helppo ja miellyttävä

- Lisätietoja
- Laite matalille tai sisäänpäin kääntyneille nänneille
- Yksinkertainen toiminta

Ei vaadi kirurgiaa – hellävarainen imemisliike

- Kliinisesti todistetut tulokset

Yksinkertainen ja huomaamaton – sopii kaikenkokoisille nänneille

- Ihannetapauksessa ennen raskautta tai kuuden ensimmäisen raskauskuukauden aikana

Tekniset tiedot

Helppo puhdistaa

Puhdista kuumassa pesuainevedessä.

Muotoilu

Huomaamaton muotoilu

Consumer Trade Item

Height: 17.1 cm

Width: 14.2 cm

Length: 5.9 cm

Net weight: 0.04 kg

Gross weight: 0.087 kg

GTIN: 5012909005272

Country of origin: GB

Harmonized system code: 39269097

Ulkolaatikko

Height: 18.6 cm

Width: 19.1 cm

Length: 29.6 cm

Net weight: 0.24 kg

Gross weight: 0.646 kg

GTIN: 15012909005279

Lava

Height: 121.6 cm

Width: 100 cm

Length: 120 cm

Net weight: 17.64 kg

Gross weight: 104.916 kg

GTIN: 8710103349594

Materiaali

Liivinsuojat: Dermatologically tested

Niplette: Polypropeeni

Sisältö

Kertakäyttöinen liivinsuoja: 2 kpl

Niplette: 2 kpl

Pallet Layer

Height: 18.6 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Helppokäyttöinen

Helppo käyttää huomaamattomasti vaatteiden alla: Vapauta imu painamalla ruiskua

Toiminnot

Ratkaisu litteille nänneille: Käyttää hellävaraista imua

Kehitysvaiheet

Vaihe: Before Pregnancy, 0 - 6 months, Breastfeeding initiation phase

Kohokohdat

Sisäänpäin kääntyneille nänneille

Jopa kymmentä prosenttia naisista vaivaavat sisäänpäin kääntyneet nännit tai nännit, jotka eivät nouse pystyyn. Siitä aiheutuu ahdistusta, mikä tekee imetyksestä vaikeaa äidille ja vauvalle. Imemisliikkeen pitäisi nostaa nänni esiin. Jos näin ei tapahdu, Niplette™ on yksinkertainen ja miellyttävä ratkaisu. Laitteen avulla naiset, joilla on matalat tai sisäänpäin kääntyneet nännit, voivat imettää miellyttävästi turvautumatta kirurgiaan*. Se koostuu venttiiliin ja ruiskuliitäntään yhdistetystä läpinäkyvästä kupista, jossa on tiivistysrengas.

Suosittelava käyttöajankohta

Ihannetapauksessa Nipletteä olisi käytettävä ennen raskautta 8 tunnin jaksoissa päivällä ja yöllä*. Jos rinnat eivät ole kovin arat, sitä voi käyttää myös kuuden ensimmäisen raskauskuukauden aikana pysyvän tuloksen saavuttamiseen tai synnytyksen jälkeen muutaman minuutin ajan aina ennen imetystä. Niplette nostaa nännin esiin, jolloin vauva saa helpommin otteen. Se helpottaa rintaruokintarutiinia ensimmäisinä päivinä. Imetyksen loputtua seurauksena voi olla pysyvä kosmeettinen muutos, ja silloinkin Nipletteä voi käyttää ajoittain.

Hellävarainen imemisliike

Kuppia pidetään nänninpihalla yhdellä kädellä ja samalla imetään ilmaa pois 5 ml:n ruiskulla, jolloin nänni nousee pystyyn. Käyttäjä hallitsee imua, joten hän voi käyttää niin suurta voimaa kuin tuntuu miellyttävältä. Kun nänni on pystyssä ja käyttäjä on irrottanut ruiskun varovasti venttiilistä, hän voi jatkaa normaaleja toimiaan. Niplette pysyy huomaamattomasti rintaliivien sisällä. Laitetta on suositeltavaa käyttää aluksi mahdollisimman paljon*.

Toimivuus todistettu kliinisesti

Nipletteä koskeissa kliinisissä tutkimuksissa* on osoitettu, että matalat tai sisäänpäin kääntyneet nännit ovat korjaantuneet pysyvästi, riippumatta siitä, onko nännien muutos tapahtunut murrosiässä vai aiheutunut rintojen pienennysleikkauksesta. Naisille, joille ei ollut tehty leikkausta ja jotka olivat raskauden aikana huolissaan imetyksen onnistumisesta, pystyivät imettämään ongelmitta. Pysyvä muutos saavutetaan tavallisesti 1–3 kuukauden jatkuvassa käytössä.

Lisätietoja

Niplette ei toimi, kun maidontulo on täysin käynnistynyt. Siihen mennessä vauva on oppinut saamaan kunnon otteen nännistä.



* McGeorge, D, FRCS (plastiikkakirurgi), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994), painos 47, sivut 46–49

* Tämä osa sisältää kuluttajien mielipiteitä tuotteesta. Philips