

Бірінші рет пайдалану алдында

Барлық бөлшекті шығарып, тазалап, қайнаған суға 5 минутқа салыңыз немесе Philips Avent стерилизаторы арқылы зарарсыздандырыңыз. Бұл — гигиенаны қамтамасыз ету үшін қажетті қадам.

Құрастыру

Емізкі бұранда сақина арқылы толық тартылғанын тексеріңіз (1, 2 -сұр.). Бұранда сақина мен емізкті құрастыру алдында бөтелкеге AirFree клапанын орналастырыңыз (3-сұр.).

Ескерту: Қоспаны дайындаған кезде, оны толық ерітіңіз, сонда AirFree клапаны бітеліп қалмайды.

Ескертпе: Баланызды тамақтандырмас бұрын, бөтелкені (AirFree клапанын) аударып, емізкке сүт құю керек. Содан кейін бөтелкені тамақтандыру үшін бұрыңыз, сонда AirFree клапаны баланыздың мұрын деңгейінде жоғары қарайды (6-сұр.).

Сондай-ақ Philips Avent бөтелкелерін AirFree клапаныңыз қолдануға болады.

Тазалау және сақтау

Гигиенаны қамтамасыз ету үшін әр қолданыс алдында барлық бөлшекті тазалаңыз. Әр қолданыстан кейін барлық бөлшегін шығарып, жылы сабынды суда жуып, тағам қалдықтарын кетіріп, дұрыстап шайыңыз. Емізктің үшін тазалау үшін шетқаны пайдалансаңыз, оны зақымдап алмай, мүмкіндігінше абайлап тазалаңыз. Одан кейін Philips Avent стерилизаторымен зарарсыздандырыңыз немесе 5 минут қайнатыңыз. Зарарсызданған компоненттерді ұстар алдында, қолыңыздың жуылғанын және беттердің таза екендігін тексеріңіз. Қайнаған сумен зарарсыздандыру кезінде бөлшектер табаның бүйіріне тимейтінін тексеріңіз. Бұл Philips компаниясы жауапты бола алмайтын өнімнің түзелмес деформациясына, ақауына немесе зақымына себеп болуы мүмкін. Тамақтың түстері бөлшектерді түссіздендіруі мүмкін. Бұл өнімді ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды. Өнімді ызықтатпашыңыз. Емізкінің ұшына абразивті немесе бактериядан тазалайтын агенттері бар беттерге бөтелке бөлшектерін тигізбеңіз немесе қоймаңыз. Емізкітерді 3 ай сайын ауыстыруды ұсынамыз. Бөлшектерін құрғақ, жабылатын контейнерде сақтаңыз. Емізкіті және/немесе AirFree клапанын күннің сәулесі түсетін немесе ыстық жерде, сондай-ақ зарарсыздандыру құралында (зарарсыздандыру ерітіндісінде) айтылған уақыттан ұзақ қалдырмаңыз, әйтпесе бөлшектер жұмсарып кетеді.

Үйлесімділігі

AirFree клапаны шыны бөтелкелерден басқа және алдыңғы дизайндағы Natural емізкітерінен басқа барлық Philips Avent бөтелкесіне ыдыс қолданылады (7-сұр.). Ауыстырылатын емізкітер белке сатылады. Ескертеңіз үшін дұрыс емізкіні таңдау туралы қосымша ақпаратты **www.philips.com/avent** веб-сайтынан қараңыз.

Қолдау көрсету

Ақпарат немесе қолдау қажет болса, **www.philips.com/support** веб-сайтына кіріңіз.

עברית
<p>יש לקרוא את כל ההוראות בעיון לפני השימוש. מומלץ לשמור את מדרוך המשתמש ואת אריות המוצר לעיון בעתיד.</p> <p>למען ביטחות ילדכם ובריאותו!</p> <ul style="list-style-type: none">- מציצה רציפה וממושכת של נוזלים תגרום לריקבון השיניים. - יש לבדוק תמיד את טמפרטורת המזון לפני ההאכלה. - השליכי את המכשיר עם הסימנים הראשונים לנוק או פגם. - יש לשמור רכיבים שאינם בשימוש הרחק מהישג ידם של ילדים. - עלולם אל תחברי לחוטים, סרטים, שרוכים או חלקים חופפים של ביגוד. <p>היזהר יעול להיתקן.</p> <ul style="list-style-type: none">- אין לעשות שימוש בטמטח הנוה כמוציץ. - יש להשתמש במוצר זה בהשגחת מבוזר בכל עת. <p>לא מומלץ להשתמש במיקרוגל לחימום מזון או משקאות של תינוקות. מכשיר מיקרוגל עלולים להרוס חומרים מזינים רבי ערך במזון או במשקאות ועשויים ליצור טמפרטורות נקודתיות גבוהות. אם בכל זאת ברצונך להשתמש במיקרוגל, יש להפגיד תמיד לערבב את המזון או המשקה המחומם, כדי להבטיח פיזור אחיד של חום ולבדוק את הטמפרטורה לפני השימוש. במכשיר המיקרוגל יש להניח רק את המכל, ללא טבעת ההברגה, שסתום ה-AirFree, הפטמה והכיסוי. אין לאפשר לילדים לשהק עם חלקים קטנים או להסתובב או לרוץ בעת השימוש בבקבוקים. יש לשפוך תמיד חלב אם שנותר בתום ההאכלה. לפני כל שימוש, יש לבדוק את פטמת ההאכלה ולמשוך בכל היתכונם. השליכי את המכשיר עם הסימנים הראשונים לנוק או פגם.</p> <p>שסתום AirFree</p> <p>שסתום ה-AirFree שומר שיהיה חלב בפטמה במהלך ההאכלה, גם אם הבקבוק מוחזק בצורה אופקית. כך ניתן להאכיל את התינוק במנח זקוף, למצוור בליעה של אוויר. שסתום זה עוזר להפחית בעיות האכלה נפוצות, לרבות גזים וריפלוקס.</p> <p>לפני השימוש הראשון</p> <p>יש לפרק את כל החלקים, לנקות ולאחר מכן לחטא את החלקים על-ידי הכנסתם למים רותחים ל-5 דקות או בעזרת מכשיר חטיטו של Philips Avent. כך תשמור על היגיינה.</p> <p>הרכבה</p> <p>יש לוודא שפטמת ההאכלה משוכה במלואה דרך טבעת ההברגה (איור 1, 2). יש להניח את שסתום ה-AirFree בתוך הבקבוק, לפני שמרכיבים את טבעת ההברגה והפטמה (איור 3).</p>
<p>אזהרה: אם מכינים פורמולה, יש להקפיד שכל האבקה נמסה לחלוטין כדי למנוע חסימה של שסתום ה-AirFree.</p>
<p>הערה: לפני האכלת התינוק, יש לוודא שהפטמה מלאה בחלב על-ידי הפיכת הבקבוק (עם שסתום ה-AirFree). לאחר מכן יש לסובב את הבקבוק להאכלה כך ששסתום ה-AirFree יפנה כלפי מעלה, ויהיה ביק ישר עם האף של התינוק (איור 6).</p>
<p>ניתן להשתמש בבקבוקי Philips Avent גם ללא שסתום ה-AirFree.</p> <p>ניקוי ואחסון</p> <p>להבטחת היגיינה, יש לנקות את כל החלקים לפני כל שימוש. לאחר כל השימוש, יש לפרק את כל הרכיבים, לשטוף במי סבון תמים, להסיר את כל שיעיר המזון ולשטוף ביסודיות. אם אתה משתמש במברשת לניקוי קצה פטמת ההאכלה, נקה אותה בוהרות רבה ככל האפשר כדי למנוע נוק. לאחר מכן, יש לחטא בעזרת מכשיר חטיטו של Philips Avent או להרתיח במשך 5 דקות. יש להקפיד לשטוף ידיים בקפידה ולוודא שהמשטחים נקיים לפני שמניחים עליהם את החלקים שבעברו חיטוי. בזמן חיטוי במים רותחים, יש למנוע מגע של החלקים ברפנות הסיר. מגע כזה יגליל לגרום ליערות, נזק או פגם בידת הפוכים, שעלולים Philips לא תוכל לקחת אחריות. צבעי מגאלי עשויים לשנות את צבעם של החלקים. המוצר בנוח לשימוש במדיח כלים. אין להניח את המוצר בתנור מחומם. אין לאפשר מגע של חלקי הבקבוק עם חומרי ניקוי אנטיבטריאליים או חומרי ניקוי שחוקים ואין להניח את חלקי הבקבוק על משטחים עם חומרים אלו. אנו ממליצים להחליף פטמות האכלה כל 3 חודשים. יש לשמור את החלקים במכל יבש ומכוסה. אין לחשוף פטמת האכלה ו/או שסתום AirFree לאור שמש ישיר לחום או להשירים טבולים בחומר חיטוי (חמיסת חיטוי) יותר ממה שמומלץ, כדי שהחלקים לא ייחלשו.</p>
<p>תאמות</p> <p>שסתום ה-AirFree מתאים לכל בקבוקי Philips Avent, למעט בקבוקי זכוכית ופטמת Natural מתניצוב הקודם (איור 7). אפשר לקבל פטמות חלופיות בנפרד. למידע נוסף על חלופות הפטמה המתאימה לתינוק שלך, ניתן לבקר בכתובת www.philips.com/avent.</p>
<p>תמיכה</p> <p>לקבלת מידע או תמיכה, מומלץ לבקר באתר www.philips.com/support.</p>