



Philips PulseRelief
Trådlös smärtlindring med
TENS- teknologi

App-kontrollerad
15 TENS- och 5 EMS-program
60 intensitetsnivåer
Kompatibel med iOS & Android



PR3840/00

Har bevisats ge smärtlindring*

Appstyrd, trådlös smärtlindring

Tyvärr, har Philip PulseRelief utgått från vårt sortiment. Har du denna produkt sedan tidigare och behöver fler elektroder, hör av dig till vår kundtjänst. Den tillhörande appen "Philips Treatment" kommer inte att uppdateras, vilket betyder att den på sikt kommer sluta fungera. Är du en befintlig användare av PulseRelief och har frågor om appen eller elektroderna, hör gärna av dig till oss.

Avancerad pulsbaserad teknik

- Erkänd behandling för smärtlindring
- Avancerad pulsteknik för en behaglig känsla

Alternativ för assisterad behandling

- 20 behandlingar med 60 intensitetsnivåer
- Behandlingskalender för en strukturerad översikt

Tunn, lättburen design

- Enkel magnetanslutning som knäpps på för direkt användning utan väntetid
- Innehåller 2 utbytbara elektroder
- Laddningsbart batteri via USB- eller strömadapter

Styr den trådlöst via iOS- eller Android-enheter

- Styr din behandling från en iOS- eller Android-enhet
- Det finns alternativ för att lägga till och styra ytterligare en PulseRelief

PHILIPS

Funktioner

App-aktiverad behandlingsstyrning



Du kan styra behandlingen via Bluetooth-strömning på en iOS- eller Android-enhet (se specifikationerna för kompatibilitet) för att få en hög grad av rörlighet medan du använder PulseRelief. Det gör att du kan fortsätta med dina dagliga aktiviteter utan att störas av sladdar.

20 behandlingar, 60 intensitetsnivåer

PulseRelief har en mängd olika behandlingsprogram. Enheten har 15 TENS-program (transkutan elektrisk nervstimulering) och 5 EMS-program (elektrisk muskelstimulering) för varierande behandlingsmöjligheter. De 15 TENS-programmen kan användas för att lindra mild till måttlig kronisk smärta i muskler och leder samt lindra artrossmärta och kronisk smärta i allmänhet.* De 5 EMS-programmen ger stimulering och kan även stärka musklerna.

Behandlingskalender

I PulseRelief-appen finns en behandlingskalender. Med en knapptryckning får du en omfattande översikt över din personliga behandlingshistorik. Du kan använda den här översikten för att optimera smärtbehandlingen (i samråd med din vårdkontakt eller på egen hand).

Avancerad puls-baserad känsla

PulseRelief är en trådlös enkanalig TENS-enhet. Med hjälp av en tvåfaspuls stimuleras nerverna under huden. Pulsfunktionen har utvecklats för att ge en behaglig känsla under behandlingen. Du kan styra intensiteten för pulsfunktionen själv via PulseRelief-appen.

USB-/strömadapter

Ladda din PulseRelief via USB- eller vanlig strömadapter hemma eller på jobbet. När batteriet är fulladdat kan PulseRelief användas i upp till åtta timmar.

Självhäftande elektroder


De självhäftande elektroder har patenterad hydrogel-teknik för att minimera hudirritation. Det finns två elektroder i en återförslutningsbar plastförpackning och rekommenderad användning är upp till 20 gånger per elektrod beroende på hudtyp

och användning. Elektroderna ser till att den elektromagnetiska pulsen sprids jämnt över huden under elektroderna.

Para ihop med en till PulseRelief


Via den speciellt utformade appen är det möjligt att lägga till och styra ytterligare en PulseRelief-enhet för att förstora smärtbehandlingsområdet för både TENS- och EMS-behandlingar. I hoppningsalternativet låter dig använda fyra elektroder samtidigt.

Erkänd smärtbehandling

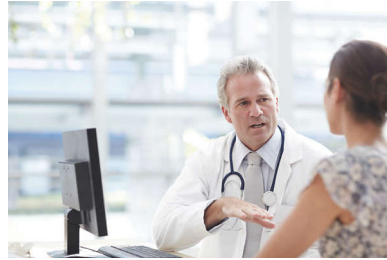

TENS är erkänd behandlingsmetod som används inom vården i smärtlindrande syfte. Studier visar att TENS aktiverar kroppens egna smärtdämpande mekanismer, t.ex. genom att blockera smärtsignalerna till hjärnan (redan i ryggraden) och genom att frigöra signalsubstanser som endorfiner. Tack vare PulseRelief-enhetens trådlösa design kan du röra dig fritt med mindre smärta och ägna dig åt dina dagliga aktiviteter. Philips PulseRelief-enhet kan användas för mild till måttlig akut smärta efter operation och kronisk smärta.

Enkel magnetanslutning som knäpps på

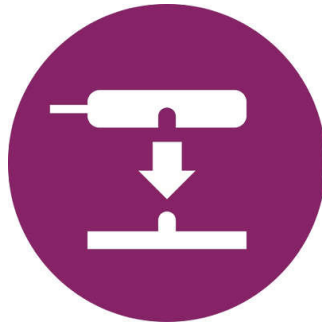

De två TENS-enheterna kopplas enkelt ihop med de självhäftande elektroderna med en magnet. Först fäster du de självhäftande elektroderna på kroppen och sedan knäpper du fast TENS-enheterna med magnetanslutningen. TENS-enheterna levereras med en USB-adapter och när den är fulladdad kan den användas vid upp till åtta timmars kontinuerlig smärtbehandling. Det håller dig igång hela dagen så att du kan njuta av livet till fullo med mindre smärta.

Specifikationer

Programvara

- iPhone®-kompatibilitet: Version iOS7 till iOS10, iPhone® 4S och senare
- Kompatibilitet med Android: 4.4 upp till 7
- iPad®-kompatibilitet: Version iOS7 till iOS10, iPad® 3:e generationen, iPad Air™, iPad mini™ och senare
- iPod®-kompatibilitet: Version iOS7 till iOS10, iPod touch® 5:e generationen och senare

Effekt

- Adaptertyp: 100-240 V, AC 50/60 Hz
- AC/DC-adapter: 5 V-300 mA
- Batterityp: Litiumjon (laddningsbara)

Vikt och mått

- Vikt för TENS: 62 g
- Mått för TENS (L x B x H): 53,5 x 53,5 x 11,5 (exklusive elektroder för vardera enheten) mm

Driftförhållanden

- Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1 060 hPa
- Relativ luftfuktighet: 15 % till 93 %
- Temperaturintervall: +5 °C till +40 °C

Class

- Klass för medicinsk enhet: Medicinsk enhet klass IIa

Pulsens effektparametrar

- Frekvensomfång: 1-100 Hz
- Utgående ström: Max 60 mA
- Maximal utspänning: 60 V
- Aktuell pulsform: Tvåfas, symmetrisk



Publiceringsdatum
2023-03-09

Version: 2.0.1

EAN: 87 10103 73723 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* M. Johnson, M. Martinson (2007). Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: A meta-analysis of randomized controlled trials. Pain 130, 157-165