



PHILIPS

足部按摩器

足浴按摩器

PPM3301F

注册您的产品并在以下网站链接中了解详情
www.philips.com/welcome

本手册内容与实物可能存在差异，请以实物为准，如产品有任何更新恕不另行通知。

©2021 AquaShield
All rights reserved

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited and Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

水护盾是飞利浦净饮水解决方案、热水解决方案、卫浴解决方案、水杯及个人按摩器唯一品牌官方授权运营主体。



目录

1	用户必读	1	8	环保说明	10
	符号描述	1			
	禁忌人群	1	9	产品保修服务指南	11
	使用注意事项	2		保修及服务	11
	使用场所的注意事项	4		保修条例	11
	保养的注意事项	4		保修卡	12
2	产品功能	5	10	装箱清单	12
3	部件名称	5			
4	使用方法	6			
	使用前的准备事项	6			
	使用操作	6			
	使用后	6			
5	保养维护	7			
	清洁方式	7			
6	故障诊断	8			
7	主要技术参数	9			

1 用户必读

产品使用前请仔细阅读并妥善保管本说明书。

符号描述

为避免造成人身危害或财产损失，请务必遵守以下内容。

· 用以下图示来分别说明希望遵守的内容。



表示禁止



表示需要根据指示去做

禁忌人群



以下人群应谨慎使用

建议您在使用前咨询医生。未获得医生事先同意，不能在以下任何一种情况下使用本产品。

- 对热度不敏感或行动不便者及儿童必须由成年人陪同使用。
- 儿童、智障、残疾和对热不敏感的人员应在有人看管的情况下使用
- 近期做过手术的人群。
- 癫痫或偏头痛人群。
- 足部皮肤病、皮肤炎症人群。



以下人群/情况禁止使用

- 禁止带有心脏起搏器人群使用。
- 禁止严重糖尿病患者使用。
- 禁止妇女在月经、妊娠期间使用。

- 禁止足膝部有伤口或外伤者使用。
- 禁止足部有脓肿破裂者使用。
- 禁止妇女怀孕或月经期间使用本产品。
- 禁止肢体不健全、在感官或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人使用本产品。
- 禁止在产生淤青，出现疼痛或不适的迹象时使用。
- 禁止将任何物体放置在产品的通风孔中。
- 禁止将产品投入火中或靠近火源。
- 禁止故意摔落本产品。
- 禁止以任何方式拆卸本产品。

使用注意事项

- ❗ 产品表面发热，对热不敏感的人使用时必须注意。
- ❗ 本机禁止站立或放入重物使用，严禁无水加热。
- ❗ 使用本产品前，应将机器放置在水平的表面，使用单独电源，务与其他电源公用插座。
- ❗ 本机必须放置在坚固且平稳的地面用，以防本机倾侧。
- ❗ 为保证安全，本机不得在有易燃、易爆气体或粉尘的地方使用（像浴室，游泳池或澡堂）以免漏电！
- ❗ 建议每天使用两次，早晚各一次，每次30分钟左右为宜。
- ❗ 在足浴盆按摩时，全身的毛孔将会呈现扩张的状态，所以请勿让电风扇或冷风直接吹向身体，以免导致风寒。
- ❗ 建议初次使用水温为38-42度，初次使用者请依体质可承受之热度，慢慢调高水温；若觉得温度过高或不舒适，应立即停止使用；将设定之水温调低后并加入适量的冷水调节后再使用。

- ❗ 在使用时易有出汗现象，所以建议在使用前后请喝下250mL的温开水。
- ❗ 在足浴盆按摩时，水中的污垢将会囤积在机体的内壁，所以使用完后请清理干净，有助于延长机体的寿命。
- ❗ 距离饭前或饭后一小时以上泡脚较为合适。
- ❗ 为防止因水温过高而发生烫伤使用者的皮肤，如加热水请不要加超过42℃的水。
- ❗ 本产品严禁向控制面板方向倒水，严禁将产品放入水中清洗或冲洗，严禁有水存放，以免冻伤部件。
- ❗ 本产品严禁无水加热，如不慎在无水时开启了加热功能，请立即关闭。
- ❗ 避免毛发、脏杂物进入盆内，使用完毕后请及时清洗。
- ❗ 本机需使用电源插座，不得与其他电器共享插座或延长线，以避免发生危险，清洁前请先检查电源是否已拔离插座，请勿直接往开关面板上洒水或用很湿的抹布擦拭，以免造成电器故障。
- ❗ 不在使用的时候请务必拔掉电源线。
- ❗ 本机不得直接安放在靠近电源插座处使用。
- ❗ 电源线不可靠近或接触发热体或打结，任何元器件损坏，应立即停止使用，严禁用户拆修，及时由制造商指定维修点维修或更换。
- ❗ 在使用时身体请勿接触导体，如金属椅架、暖气片等连接地面的导电物品。
- ❗ 本机不可放置幼童可取得之处，不可让幼童自行操作本机，也不可将本机与幼童单独留置一室，不使用时及无人看管时请将电源线拔离插座。
- ❗ 如果液体从器具中泄漏，则不能再继续使用该器具。
- ❗ 雷电交加时，建议不要使用本机。
- ❗ 本产品不打算由肢体不健全、在感官或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人使用（除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导）；照顾好儿童，确保他们不玩耍产品。
- ❗ 每台足浴盆出厂均经过加上测试，因此您在购买本机时，如发现少量余水属正常现象。
- ❗ 不得在足浴器上站立使用。

- ⊘ 不要对电源线进行负荷压载，或者导致电源线受损。
- ⊘ 不要站在本体上面，也不要将产品作为玩具，避免发生意外。
- ⊘ 不要用力拉扯产品，也不要用力或者尖锐的物品去刺产品。

使用场所的注意事项

- ⊘ 不要靠近火炉，或者电暖被里面以及电热毯等暖房器具上使用，容易引起火灾或故障。
- ⊘ 不要在产品上盖上毛巾或者布等物体使用。
- ⊘ 不要在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他高湿器皿附近使用本产品。

保养的注意事项


- ❗ 保养的时候，务必把电源线拔掉。
- ❗ 长期不使用的时候，务必把电源线拔掉。
- ⊘ 不要掉落本体或者遥控器，也不要强烈的敲打。
- ⊘ 不要故意加大力在产品上。
- ⊘ 不要同时给两个人使用。
- ⊘ 不要在产品上淋水。
- ⊘ 不要在室温35°C以上的场所或者直射阳光的地方使用。
- ⊘ 不要在浴室或者湿气很大的场所使用。
- ❗ 长期没有使用，再次使用的时候，务必事先确认开关等是否正常。
- ⊘ 保养的时候，请不要使用挥发油，稀释剂，酒精，强碱性洗涤剂，漂白剂等清洗。
- ❗ 产品设有简易的防震设施，适合航空铁路、公路及轮船运输。运输过程中应避免雨雪淋溅、倒置和碰撞。
- ❗ 请将本产品放在儿童接触不到的地方。
- ❗ 保持过滤网的清洁，以免堵塞损坏足浴器。

- ❗ 存放器具时，先让器具冷却下来。
- ❗ 经常检查器具上是否有磨损或损坏的迹象，如果有这种迹象，或如果此器具已经被误用，则应在再次使用前将器具返回到供应商处。

2 产品功能

本产品针对足底不同部位提供揉捏、刮痧的方式，模拟人手按摩，促进足部血液循环，排除积聚在体内的代谢废物和毒素，三种按摩模式，温度可调，加高桶身设计，适合不同人群用于足部和腿部的按摩保养。

3 部件名称

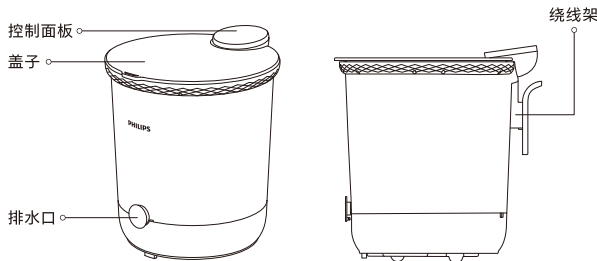

4 使用方法

使用前的准备事项

- 1、本产品不打算由肢体不健全、在感官或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导）应照看好儿童，确保他们不玩耍产品。
- 2、本机严禁无不加热，无水严禁使用，严禁站立使用。
- 3、注入干净的冷水或温水，水位高度不超过足浴盆内“最高水位线”的位置。
- 4、使用时注意插座必须使用交流220V之家用插座。
- 5、插上电源线，本机处于待机状态。
- 6、设定所需的运作模式，本机即可开始使用。


使用操作

- 1、将机器平放，根据水位线提示，向机器内倒入适量的水，（不可低于低水位或高于高水位），冬天使用时可加入温水，倒入的水温不可过高（不超42℃为宜）以免烫伤皮肤。
- 2、接通电源，请勿湿手操作，屏幕显示“OF”。手按控制面板的“一键启动”键，可开始设定各功能。
- 3、如感觉水温合适，即可将双脚浸入机器内使用，一般足浴时间30-40分钟为宜，期间请适量饮用温开水。
- 4、使用完毕，重按“一键启动”键关闭所有功能，机器显示“OF”，拔下电源插头（请勿用湿手操作），倒出机器内的水，擦拭干净，放置于室内通风干燥处。

使用后

- 1、请将水排放干净并以清洁刷清洗足浴盆内部。
- 2、请将主机放置阴凉干燥处，避免日光直射。
- 3、建议使用前后喝一杯250ml温水。

- 本机建议初次使用水温为38-42℃，再次使用者请依体质及可接受热度，慢慢调高水温，若觉水温太高感到不适，应立即暂停使用，先调低设定温度并加入适量的冷水调节后才可再使用。

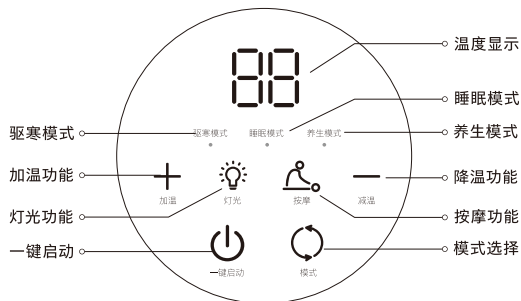

5 保养维护

清洁与保养

- (1) 先确认电源关闭，将电源线拔离插座可以使用清洁刷刷洗内部的污垢或灰尘。
- (2) 开关、控制面板等电器零件切勿触碰到水，更不可用水直接冲洗，不仅会造成产品或零件损坏，更有触电的危险！
- (3) 不可使用酒精，汽油等强挥发性液体擦拭以免损坏表面光泽，清洁晒干后再装入包装盒内保存。

保养须知

- (1) 严禁从开关处倒水。
- (2) 使用时水平放置本机器。
- (3) 轻拿轻放。
- (4) 不使用时，机器内不要有水存放。
- (5) 请经常清洗加热槽中的污渍。
- (6) 请不要用酒精，汽油等强挥发性液体擦拭控制面板。
- (7) 使用后及时拔下电源插头。
- (8) 拔下电源插头后，才能倒水和清洗。
- (9) 不使用时，请将机器存放于阴凉干燥处。
- (10) 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

! 保养的时候，一定要把电源线拔掉，但是不要用湿手去拔除电线。

6 故障诊断

本章列出了关于本产品最常见的问题。如果您无法在其中找到您所遇问题的答案，请联系服务热线或您所在地区的授权服务中心。

现象	产生原因	处理方法
水垢	水质差或脏	用草酸或白醋泡 10 分钟后冲洗
不加热	电源未接通	检查电源并确定已接通
	无水时误开加热开关	按“启动键”关闭机器，再向机器内倒入适量的水，重新启动机器
不通电	电源插头未插好	按正确方法插好电源插头
	未按“启动”按键	按下“启动”按键

显示屏显示异常	接通电源后未按相应按键	按说明书正确操作
	水温过高	如加冷水降温(注意不要超出高水位)后重新启动机器
	电源未接通	检查电源并确定已接通

长时间未使用后，务必先确认功能正常，才能再次使用。		
定期检查	有无以下故障	
	● 电源线或者插头发热 ● 电源线有深深的伤痕或者变形、有焦味 ● 工作中有异常的声音或者震动 ● 开启开关后，不正常工作 ● 有其他异常或者故障	若出现上述故障，为了防止引发事故，请立刻停止使用，并切断电源。请送往本公司维修点。

注意：

如果无法排除故障或产品仍无法理想操作，与售后服务人员联系，切勿自行拆卸或尝试维修。

7 主要技术参数

产品名称	飞利浦牌足浴按摩器	产品净重	3.7kg
产品型号	PPM3301F	产品尺寸	440x380x460 mm
额定电压	220V~	电源线长度	约1.8m
额定频率	50Hz	防水等级	IPX4
额定功率	650W	生产日期	见产品合格证
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008		

8 环保说明

- 1.本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求；
- 2.在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用；
- 3.本公司产品环保使用期限为10年，只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板组件	×	○	○	○	○	○
塑料壳	○	○	○	○	○	×
电源线	×	○	○	○	○	○
喷涂	○	○	○	×	○	○
螺钉	○	○	○	×	○	○
包装、贴纸	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

(备注: 以上标“×”的部件中, 部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限, 暂时无法实现替代或减量化。)



9 产品保修服务指南

保修及服务

此产品是一件设计精良，用高品质元件制造之家用电器，在正常使用及保养下应能发挥其优越性能。在购买日期后二年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，飞利浦中国维修服务中心将为持证用户提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品。

无论在保期中或保期后，只要飞利浦正式销售该产品的任何国家皆可获得维修服务。

若飞利浦在当地无销售该项产品，飞利浦同样提供维修服务，但可能因未储备所需零件，维修时间可能较长，敬请谅解。请联络当地飞利浦经销商，或飞利浦服务部门。

若您需咨询相关资讯，或遇困难事项时，请联络当地飞利浦维修服务中心，或向飞利浦服务热线咨询。

中国顾客服务热线：4006 186 222（免费）。

网址：<http://www.philips.com.cn>

保修条例

- 在购买日期后二年内，凡经本公司特约维修站人员确认为正常使用情况下，因制造工艺或元器件造成之损坏，您都将获得免费保修服务。
- 此免费服务不包括需时常更换的易耗零配件及附件，辅助装置，运输费及维修人员上门服务费。
- 用户请保留此联。
- 维修时请携带此证及发票正本。
- 此证若经涂改即作废。

- 此证须联同发票正本使用方为有效。
- 以下情况将不能获得免费服务
 - 1、使用不当引起的人为损坏, 例如接入不适当电源、使用不适当配件、不适当之安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等。因运输及其他意外而造成之损坏。非经本公司认可之维修和改装。其他因不可抗力(如自然灾害, 电压异常等)造成的损坏。
 - 2、一般家庭以外使用(如工业、商业用)而造成的损坏。
 - 3、正常使用引起的产品老化、磨损等, 但不影响产品的正常使用。
- 此证仅在中国境内有效。
- 保保证作为在规定期限及条件之内进行免费维修的保证, 并不限制消费者的法定权利。

保修卡

产品型号		用户姓名	
销售单位		联系电话	
购买日期		出厂编号	
特别技术服务站		用户地址	
维修内容		时间	保修人员

10 装箱清单

主机	1×	说明书	1×
合格证	1×		