



请在以下网站链接中了解详情
www.philips.com

本手册内容与实物可能存在差异, 请以实物为准, 如产品有任何更新恕不另行通知。

©2021 AquaShield

All rights reserved

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited and Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

水护盾是飞利浦净水解决方案、热水解决方案、卫浴解决方案、水杯及个人按摩器唯一品牌官方授权运营主体。

Rev A FEB 22



PHILIPS

腰背按摩器

腰部按摩器

PPM3201B



使用说明书

目录

1	用户必读	1	7	主要技术参数	10
	符号描述	1			
	适用人群	1	8	环保说明	11
	使用注意事项	2			
	保养的注意事项	3	9	产品保修服务指南	12
				保修及服务	12
2	产品功能	3		保修条例	12
				保修卡	13
3	部件名称	4			
			10	装箱清单	13
4	使用方法	5			
	使用操作	6			
	充电方法	7			
	指示灯说明	7			
5	保养维护	8			
	清洁方式	8			
	废弃方式	8			
6	故障诊断	9			

1 用户必读

产品使用前请仔细阅读并妥善保管本说明书。

符号描述

为避免造成人身危害或财产损失，请务必遵守以下内容。

· 用以下图示来分别说明希望遵守的内容。

 表示禁止

 表示需要根据指示去做

适用人群

 以下人群应谨慎使用

在医疗机构治疗中，或有下列状况的人，使用之前请务必找医生或者理疗医师商量。

- 皮肤感觉障碍者。
- 因骨折或整形手术而在体内注入金属、硅或塑料材质者。
- 器具具有发热表面。对热不敏感的人使用时必须注意。
- 因交通事故等而存在腰部后遗症者。
- 容易受到心脏起搏器等电磁故障影响的体内植入型医疗电子仪器的人。
- 被认定失去温度感觉的人。
- 有恶性肿瘤的人。
- 患有心脏病的人。
- 怀孕期间或者生完孩子后不久的人。
- 糖尿病引起有知觉障碍的人

- 腰部有伤未痊愈的人。
- 需要安静的人和身体状况不佳的人。
- 患有骨质疏松症的人、剧烈骨折、扭伤、肌肉疼痛、急性(头)疼痛的人。
- 体温38℃(发烧)时。
- 具有急性炎症症状、倦怠感、恶寒、血压变动等症状的强烈、衰弱的时候。
- 其他在医疗机构治疗的人。

使用注意事项

- ❗ 每次使用时间是60分钟，请检查自己的腰部和腹部状况，然后适当调整使用次数。
- ❗ 建议在刚开始使用本产品阶段采用1档力度。
- ❗ 使用本产品时，您的腰部可能短时间变红。这并不表示存在问题。如果这一症状持续得不到缓解，请向外科医生咨询。
- ❗ 如果感觉腰部或腰腹周围疼痛，请立即停止使用本产品。
- ❗ 如果在使用过程中皮肤或腰部出现任何问题，请立即停止使用本产品并向医师咨询。
- ❗ 建议不要过度使用按摩功能。
- ❗ 请在5-35℃环境内使用本产品。
- ⊘ 禁止睡觉时使用。
- ⊘ 禁止盖上被子或毛毯使用。
- ⊘ 禁止在产品上躺着，坐着。
- ⊘ 禁止给产品带来巨大的冲击和负荷。
- ⊘ 请勿在浴室或淋浴间内使用产品。
- ⊘ 佩戴机身时请勿进行剧烈运动。



保养的注意事项

- ❗ 进行清洁时，请务必从家用电源插座上拔掉适配器的插头。
- ❗ 请妥善处理本产品的包装袋，使其远离婴幼儿。
- ⊘ 本产品内含锂电池，请勿自行拆卸、改装、水浸产品(控制器)或投掷火中，否则可能导致产品损坏。
- ⊘ 请勿存放在儿童和婴幼儿的接触范围之内。此外，请勿让他们接触或操作本产品。否则，可能会引起灼伤、触电或人身伤害。
- ⊘ 请勿损坏或改装、或用力弯曲、拉拔电源线。另外，请勿在电源线上放置重物或挤压电源线。

2 产品功能

本产品通过振动按摩配合热敷功能，可促进腰部及腹部血液循环，缓解肌肉疼痛、痛经等不适症状，多种温度及按摩力度可供选择，适合不同人群用于腰部及腹部按摩放松。


3 部件名称

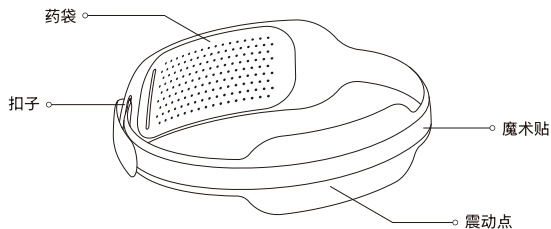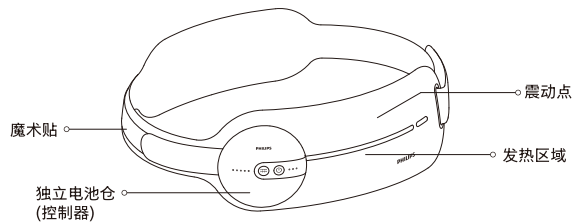

4 使用方法

使用前的准备事项

1. 将电池仓背后的磁吸扣与机身上的磁吸扣相吸, 使电池仓稳固安装于机身上;

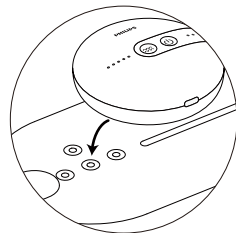

2. 将按摩器套在腰上, 绑带穿过扣子, 通过魔术贴固定好。



! 因腹部皮肤较为敏感, 50°C及以上建议隔着衣服使用, 谨防烫伤。


使用操作

开关按键

- 1、待机状态下长按2秒开关按键开机/待机，蜂鸣器长鸣2秒“滴~”，电源指示灯亮起橙色，机器开机。开机默认加热50°C，振动力度1挡。加热指示灯二挡亮起橙色灯光，振动挡位指示灯1挡亮起蓝色灯光；
- 2、短按开关按键循环切换加热挡位，依次为：一挡(45°C)-二挡(50°C)-三挡(55°C)-关闭加热，选定挡位时对应指示灯亮起，关闭加热时挡位指示灯熄灭，开关指示灯亮蓝色灯光，每次操作机器蜂鸣器均发出“滴”一声提示；
- 3、机器默认定时60分钟，运行60分钟后自动关机，蜂鸣器长鸣2秒“滴~”，机器进入待机状态。


振动按键

短按振动按键，循环调节振动挡位，一挡-二挡-三挡-四挡-五挡-关闭振动，对应挡位指示灯亮起蓝色灯光，关闭振动时挡位指示灯熄灭。每次操作蜂鸣器均发出“滴”一声提示。

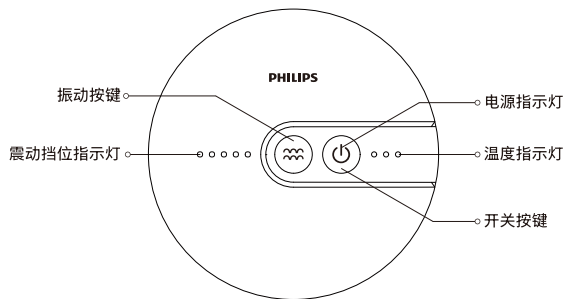

充电方法

1. 将充电插头插入电池仓侧面的充电孔内；
2. 将充电器插头插入100-240V~，50/60Hz的电源插座上；
3. 充电时温度指示灯呈现递增闪烁状态，充满电后3颗灯常亮橙色灯光；
4. 充满电约需4.5小时。

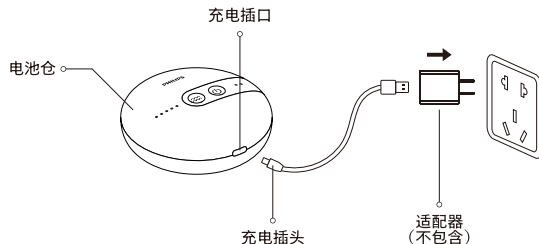

- ❗ 当电量少于10%时，电源指示灯频闪2秒并关机。
- ❗ 请关机后再充电，请勿边充电边使用。

指示灯说明

电源指示灯	状态	描述
橙色	常亮	加热开启
蓝色	常亮	加热关闭
蓝色	频闪	低电量
橙色	频闪	低电量
橙色/蓝色	交替频闪	控制盒未贴合布料区

温度指示灯	状态	描述
1颗灯亮	常亮	一挡(45°C)
2颗灯亮	常亮	二挡(50°C)
3颗灯亮	常亮	三挡(55°C)
无灯光	/	加热关闭

振动挡位指示灯	状态	描述
1颗灯亮	常亮	一档
2颗灯亮	常亮	二挡
3颗灯亮	常亮	三挡
4颗灯亮	常亮	四挡
5颗灯亮	常亮	五挡
无灯光	/	振动关闭

5 保养维护

清洁方式

1. 电池仓（控制器）护理：应妥善保护好有触控功能的电池仓（控制器）显示屏，清洁时请使用软布擦拭。
2. 布料区域护理：布料区域不支持水洗。需要清洁保养时，请用酒精杀菌除汗渍或用洁净湿毛巾擦拭。



- ❗ 保养的时候，一定要把电源线拔掉，但是不要用湿手去拔除电线。

废弃方式

本产品所用的锂离子电池是可回收再生的宝贵资源，请在使用完毕废弃之时，将锂离子电池取出，交给可进行充电式电池回收再生处理的专业机构进行处理。

电池拆除步骤：

1. 从侧面撬开电池仓的上下盖
2. 松开电路板的螺丝，并取出电路板
3. 剪断电池连接线并用绝缘胶带缠好电线断口

- ❗ 用户不能自行更换电池；
- ❗ 废弃器具前，必须将电池从器具中取出；
- ❗ 在取出电池时器具必须断电；
- ❗ 电池应安全地处理。

6 故障诊断

本章列出了关于本产品最常见的问题。如果您无法在其中找到您所遇问题的答案，请联系服务热线或您所在地区的授权服务中心。

故障描述	可能原因	解决方式
不能开机	产品仍连接在电源插座上	将充电线从机身上移除
	电池电量耗尽	请充电
	磁吸未能准确吸附	重新吸附
充电指示灯不点亮	USB充电线未正确插入电源插座	请将USB充电线正确插入电源插座
即便刚充过电也只能使用几分钟	电池寿命用尽(大约5年)	请向经销商咨询(请勿自行更换电池)
机身不加热	在推荐的环境温度范围之外使用时，本产品可能无法正	在推荐的5~35℃的使用温度范围内使用
产品在运行过程中停止	电池电量已耗尽	电量不足请充电
	使用时磁吸错位或未能吸附	重新吸附

长时间未使用后，务必先确认功能正常，才能再次使用。		
定期检查	有无以下故障	
	· 电源线或者插头发热 · 电源线有深深的伤痕或者变形、有焦味 · 工作中有异常的声音或者震动 · 开启开关后，不正常工作 · 有其他异常或者故障	若出现上述故障，为了防止引发事故，请立刻停止使用，并切断电源。请送往本公司维修点。

注意：

如果无法排除故障或产品仍无法理想操作，与售后服务人员联系，切勿自行拆卸或尝试维修。

7 主要技术参数

产品名称	飞利浦腰部按摩器
产品型号	PPM3201B
工作电压	3.7V ---
工作功率	11.8W
充电电压	5V ---
充电电流	1A
产品尺寸	1055x122x32mm
产品净重	230g
电池容量	4500mAh
接口类型	Type-C
生产日期	见产品合格证
执行标准	GB4706.1-2005，GB4706.10-2008

8 环保说明

- 1.本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理方法》的要求；
- 2.在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用；
- 3.本公司产品环保使用期限为10年，只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶类组件	○	○	○	○	○	○
皮套	○	○	○	○	○	○
线路板(电子)组件	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
五金类组件	×	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

(备注: 以上标“X”的部件中, 部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限, 暂时无法实现替代或减量化。)



9 产品保修服务指南

保修及服务

此产品是一件设计精良，用高品质元件制造之家用电器，在正常使用及保养下应能发挥其优越性能。在购买日期后二年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，飞利浦中国维修服务中心将为持证用户提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品。

无论在保修期中或保修期后，只要飞利浦正式销售该产品的任何国家皆可获得维修服务。

若飞利浦在当地无销售该项产品，飞利浦同样提供维修服务，但可能因未储备所需零件，维修时间可能较长，敬请谅解。请联络当地飞利浦经销商，或飞利浦服务部门。

若您需咨询相关资讯，或遇到困难事项时，请联络当地飞利浦维修服务中心，或向飞利浦服务热线咨询。

中国顾客服务热线：4006 186 222（免费）。

网址：<http://www.philips.com.cn>

保修条例

- 在购买日期后二年内，凡经本公司特约维修站人员确认为正常使用情况下，因制造工艺或元器件造成之损坏，您都将获得免费保修服务。
- 此免费服务不包括需时常更换的易耗零配件 及附件（布袋、冰袋、收纳包等），辅助装置，运输费及维修人员上门服务费。
- 用户请保留此联。
- 维修时请携带此证及发票正本。
- 此证若经涂改即作废。
- 此证须联同发票正本使用方为有效。

- 以下情况将不能获得免费服务
- 1、使用不当引起的人为损坏，例如接入不当电源、使用不当配件、不适当之安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等。因运输及其他意外而造成之损坏。非经本公司认可之维修和改装。其他因不可抗力（如自然灾害，电压异常等）造成的损坏。
- 2、一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏。
- 3、正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。
- 此证仅在中国境内有效。
- 保修证作为在规定期限及条件之内进行免费维修的保证，并不限制消费者的法定权利。

保修卡

产品型号		用户姓名	
销售单位		联系电话	
购买日期		出厂编号	
特别技术服务站		用户地址	
维修内容		时间	保修人员

10 装箱清单

主机	1×	电池仓	1×
充电线	1×	收纳袋	1×
说明书	1×	快速入门指南	1×
合格证	1×		