



注册您的产品并在以下网站链接中了解详情
www.philips.com/welcome

本手册内容与实物可能存在差异，请以实物为准，如产品有任何更新恕不另行通知。

©2021 AquaShield
All rights reserved

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited and Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

水护盾是飞利浦净饮水解决方案、热水解决方案、卫浴解决方案、水杯及个人按摩器唯一品牌官方授权运营主体。

Rev A SEP 21



PHILIPS

眼部按摩器

气囊式眼部按摩器

PPM7101E



使用说明书

目录

1	用户必读	1	8	环保说明	8
	符号描述	1			
	禁忌人群	1	9	产品保修服务指南	9
	使用注意事项	2		保修及服务	9
	使用场所的注意事项	3		保修条例	9
	保养的注意事项	3		保修卡	10
2	产品功能	3	10	装箱清单	10
3	部件名称	4			
4	使用方法	4			
	使用前的准备事项	4			
	指示灯说明	4			
	使用操作	5			
5	保养维护	6			
	清洁方式	6			
6	故障诊断	7			
7	主要技术参数	7			

1 用户必读

产品使用前请仔细阅读并妥善保管本说明书。

符号描述

为避免造成人身危害或财产损失，请务必遵守以下内容。

· 用以下图示来分别说明希望遵守的内容。

-  表示禁止
-  表示需要根据指示去做

禁忌人群

 以下人群应谨慎使用

在医疗机构治疗中，或有下列状况的人，使用之前请务必找医生或者理疗医师咨询。

- 隐形眼镜佩戴者使用前，请取下隐形眼镜后再使用
- 请将本产品远离水源，火源及具有腐蚀性的环境
- 在特定环境下使用，请遵守相应法规
- 6~12岁儿童请在监护人指导看护下使用
- 敏感性皮肤、面部过敏性皮炎、脸部部位有放美容整形材料的，请在医师指导下使用本产品
- 本产品为家用电子保健产品，并非医疗器械，不适用于诊断，治疗和其它商业用途
- 请只用本公司配置充电设备进行充电，请注意安全用电
- 器具具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意

⊗ 以下人群/情况禁止使用

医生建议禁止运动或者伸展活动的人群

比如：血栓症，重度的动脉瘤，急性静脉瘤，各种皮肤炎，各种皮肤感染症，因为容易引起恶化，所以禁止使用。

- 请勿驾驶时使用本产品
- 请勿在醉酒或身体不适时使用本产品
- 曾施行过眼部手术和有心脏病患者禁止使用
- 有青光眼、白内障、视网膜脱落、红眼病等眼疾症状时请勿使用
- 孕妇及月经期妇女请勿使用
- 请勿使用到眼部以外，身体的其它部位按摩
- 睡眠时请勿佩戴本产品
- 6岁以下儿童禁止使用

使用注意事项

- ❗ 配戴眼镜、发饰等物者，使用前应摘下后方可使用。
- ❗ 长期没有使用，再次使用的时候，务必事先确认开关等是否正常。
- ❗ 使用产品时请闭目，使用完后取下产品时会出现视力模糊的情况，闭目1-3分钟即可缓解。
- ❗ 使用出现异常，请立即断电。
- ❗ 本产品不适用于诊断、治疗用途。
- ❗ 产品不具备防水性能，使用时注意不要让水进入到产品内部，也不要直接将产品浸泡于水中。
- ⊗ 不要故意加大力在产品上。
- ⊗ 不要使用非指定电压供电，容易导致产品电路受损。
- ⊗ 不要摔掉产品，也不要强烈的敲打，容易导致产品损坏。

- ⊗ 绝对不要私自分解产品，改造或者自己修理产品。
- ⊗ 不要用力拉扯产品，也不要用刀或者尖锐的物品去刺产品。
- ⊗ 不要在室温35℃以上的场所或者直射阳光的地方使用。
- ⊗ 不要在浴室或者湿气很大的场所使用。

使用场所的注意事项

- ⊗ 不要靠近火炉，或者电暖被里面以及电热毯等暖房器具上使用，容易引起火灾或故障。
- ⊗ 不要在产品上盖上毛巾或者布等物体使用。
- ⊗ 不要在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他高湿器皿附近使用本产品。


保养的注意事项

- ❗ 保养的时候，产品先关机。
- ❗ 长期不使用的時候，務必拔掉充電器。
- ⊗ 不要在产品上淋水。
- ⊗ 保养的时候，请不要使用挥发油，稀释剂，强碱性洗涤剂，漂白剂等清洗。
- ⊗ 如需清洁产品外表，请用酒精棉清洁，请勿直接用水清洁。

2 产品功能

本产品通过仿人手气压配合热敷功能，可促进血液循环缓解眼部疲劳。设有多种按摩模式，适合不同人群用于眼部按摩。创新骨传导蓝牙音乐播放功能，可以边放松眼部，边享受喜爱的音乐。

3 部件名称

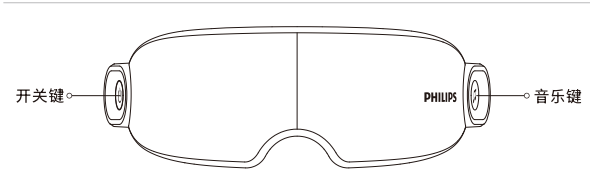

4 使用方法

使用前的准备事项

- (1) 请检查机器及配件完整。
- (2) 使用时请去除周周的挂件和装饰物，以避免影响按摩部位。
- (3) 将松紧头带调整到适合自己头型的尺寸。

指示灯说明

电量指示灯			
	颜色	状态	描述
常规工作状态	橙色	常亮	热敷功能 - 开启
	绿色	常亮	热敷功能 - 关闭
充电状态	红色	呼吸灯	0%-20%
	绿色	呼吸灯	20%-99%
	绿色	常亮	已充满
低电提醒	红色	频闪	电量不足

音乐指示灯			
	颜色	状态	描述
常规工作状态	蓝色	常亮	蓝牙 - 已连接
	青色	常亮	蓝牙 - 未连接
搜索新蓝牙设备	蓝色	频闪	搜索新蓝牙设备

使用操作

按键	按键功能	操作方式	对应功能
“⏻”键	开 / 关机	长按2秒	开机或关机操作
	热敷开 / 关	双击	双击电源键（0.5秒内按两次），可开启/关闭热敷功能。
	模式切换	短按	开机时默认进入“睡眠模式”。短按电源键可循环切换按摩模式，依次为“睡眠模式”、“美眼模式”、“护眼模式”、“暖眼模式”。
“🎵”键	搜索新蓝牙设备	长按2秒	长按两秒音乐键，搜索新蓝牙设备，指示灯为蓝色频闪状态。配对成功后，指示灯为蓝色常亮。
	音乐开 / 关	双击	双击音乐键（0.5秒内按两次），可开启/关闭音乐功能。
	下一曲	短按	短按播放下一首音乐。

5 保养维护

清洁方式

- (1) 产品外壳脏污可用干净的抹布去除；
 - (2) 眼罩脏污可用干净的抹布沾上酒精去除；
 - (3) 比较深的脏污，用中性洗洁剂沾湿抹布，然后轻轻的擦除；
 - (4) 不要让水进入到产品内部；
 - (5) 放置自然干燥。
- 使用之后不要放在阳光直射的地方或者湿气很大的地方。
- 如果长时间不使用的話，去除脏污后，用布盖好放置。
- 废弃方法：为了保护环境，不要就这样废弃，请根据各个部位的废弃方法进行废弃。

- ❗ 保养的时候，要关机产品状态下进行。
- ❗ 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出；
- ❗ 在取出电池时，器具必须要断电；
- ❗ 电池应安全地处置。

电池拆卸步骤

- (1) 切断外接电源，拆掉产品外壳
- (2) 拔掉主板上电源
- (3) 拆卸电池
- (4) 废弃电池请放置固定回收点
- (5) 请遵守当地环境保护法律法规与废弃指南

6 故障诊断

本章列出了关于本产品最常见的问题。如果您无法在其中找到您所遇问题的答案，请联系服务热线或您所在地区的授权服务中心。

基本故障	可能引起的原因	基本排除方法
无法开机	锂电池电量不足	充电再使用确认
气囊按压强度弱	头戴绑带太松	根据个人调整头戴绑带长度,使按摩仪舒适的佩戴在眼部。
蓝牙链接不上	蓝牙键被误按,蓝牙功能被关闭。	长按关机键 2 秒关机,然后重启按摩仪蓝牙功能即可恢复。
蓝牙播放音乐声音小	手机播放音量太小	调整手机播放音量

注意：
如果无法排除故障或产品仍无法理想操作，与售后服务人员联系，切勿自行拆卸或尝试维修。

7 主要技术参数

产品名称	飞利浦牌眼部按摩器	电池容量	1200mAh
产品型号	PPM7101E	产品尺寸	215×114×80mm
工作电压	3.7V ==	产品净重	301g
工作功率	4W	生产日期	见产品合格证
充电电压	5V ==	充电电流	500mA
执行标准	GB4706.1-2005，GB4706.10-2008		

8 环保说明

- 1.本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求；
- 2.在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可以放心使用；
- 3.本公司产品环保使用期限为10年，只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶类组件	○	○	○	○	○	○
皮套	○	○	○	○	○	○
线路板(电子)组件	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
五金类组件	×	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

(备注:以上标“X”的部件中,部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限,暂时无法实现替代或减量化。)



9 产品保修服务指南

保修及服务

此产品是一件设计精良，用高品质元件制造之家用电器，在正常使用及保养下应能发挥其优越性能。在购买日期后二年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，飞利浦中国维修服务中心将为持证用户提供免费门市维修服务，视情况更换零件或整个产品。

无论在保期中或保期后，只要飞利浦正式销售该产品的任何国家皆可获得维修服务。

若飞利浦在当地无销售该项产品，飞利浦同样提供维修服务，但可能因未储备所需零件，维修时间可能较长，敬请谅解。请联络当地飞利浦经销商，或飞利浦服务部门。

若您需咨询相关资讯，或遇困难事项时，请联络当地飞利浦维修服务中心，或向飞利浦服务热线咨询。

中国顾客服务热线：4006 186 222（免费）。

网址：<http://www.philips.com.cn>

保修条例

- 在购买日期后二年内，凡经本公司特约维修站人员确认为正常使用情况下，因制造工艺或元器件造成之损坏，您都将获得免费保修服务。
- 此免费服务不包括需时常更换的易耗零配件（电池、充电器、电源线、按摩头等）及附件（布袋、冰袋、收纳包等），辅助装置，运输费及维修人员上门服务费。
- 用户请保留此联。
- 维修时请携带此证及发票正本。
- 此证若经涂改即作废。

- 此证须联同发票正本使用方为有效。
- 以下情况将不能获得免费服务
 - 1.使用不当引起的人为损坏, 例如接入不当电源、使用不当配件、不适当之安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等。因运输及其他意外而造成之损坏。非经本公司认可之维修和改装。其他因不可抗力(如自然灾害, 电压异常等)造成的损坏。
 - 2.一般家庭以外使用(如工业、商业用)而造成的损坏。
 - 3.正常使用引起的产品老化、磨损等, 但不影响产品的正常使用。
 此证仅在中国境内有效。
- 保修证作为在规定期限及条件之内进行免费维修的保证, 并不限制消费者的法定权利。

保修卡

产品型号		用户姓名	
销售单位		联系电话	
购买日期		出厂编号	
特别技术服务站		用户地址	
维修内容		时间	保修人员

10 装箱清单

主机	1×	适配器	1×
说明书	1×	合格证	1×