

PHILIPS

AVENT

Mamadeira
Anti-cólic



www.philips.com/avent
Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten,
The Netherlands / Países Baixos

Marcas registradas são de propriedade
da Koninklijke Philips N.V.

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.
3000.102.5646.1 (13/07/2023)



PORTUGUÊS DO BRASIL

Leia todas as instruções cuidadosamente antes de usar o produto. Guarde o manual do usuário e a embalagem do produto para consultas futuras.

Para a saúde e segurança do seu bebê

AVISO!

- A sucção contínua e prolongada de fluidos pode causar enfraquecimento dos dentes.
- Sempre verifique a temperatura do alimento antes de dá-lo ao bebê.
- Aos primeiros sinais de dano ou desgaste, descarte o produto imediatamente.
- Mantenha os componentes não utilizados fora do alcance das crianças.
- Nunca prenda o produto em cordas, fitas, laços ou partes soltas da roupa. Isso pode estrangular a criança.
- Nunca use o bico como chupeta.
- Não utilizar a mamadeira sem supervisão constante de um adulto.
- Antes de cada uso, colocar o bico e a mamadeira em água fervente por, pelo menos, 5 (cinco) minutos.
- Antes de cada uso, examinar se o bico apresenta algum rasgo ou perfuração, descartando-o caso esteja danificado.
- O furo do bico já está na medida exata, não necessitando aumentá-lo sob risco de provocar asfixia.
- Para prevenir cáries dentárias, não mergulhar o bico em substâncias doces.

Não é recomendável usar um micro-ondas para aquecer alimentos ou bebidas do bebê. As micro-ondas podem destruir nutrientes valiosos em alimentos/bebidas e produzir altas temperaturas localizadas. Se você decidir usar o micro-ondas, tenha cuidado redobrado para mexer alimentos/bebidas aquecidas para garantir a distribuição uniforme de calor e verifique a temperatura antes de servir. Coloque somente o recipiente no micro-ondas, sem o anel de rosca, o bico e a tampa. Não deixe o bebê brincar com peças pequenas ou andar/correr com a mamadeira. Após amamentar o bebê, sempre jogue fora o leite materno que sobrar. Examine o produto antes de usá-lo, esticando o bico em todas as direções. Aos primeiros sinais de dano ou desgaste, descarte o produto imediatamente.

Antes da primeira utilização

Desmonte todas as partes, limpe e esterilize-as, colocando-as em água fervente por, pelo menos, 5 minutos. Esse procedimento visa garantir a higiene.

Montagem

Certifique-se de colocar a tampa na vertical na mamadeira para que o bico fique reto (veja a imagem para obter mais detalhes). É mais fácil montar o bico no anel de rosca se você movê-lo para frente e para trás enquanto o puxa para cima, em vez de puxá-lo em linha reta.

Limpeza e armazenamento

Limpe todas as partes antes de cada uso para garantir a higiene. Após cada uso, desmonte todas as partes, lave com água morna e sabão, remova todos os resíduos de alimentos e enxágue bem. Se usar uma escova para limpar a ponta do bico, limpe-o cuidadosamente para evitar danos. Em seguida, deixe ferver por, pelo menos, 5 minutos. Lave bem as mãos e verifique se as superfícies estão limpas antes do contato com os componentes esterilizados. Durante a esterilização com água fervente, evite que as partes encostem na lateral da panela. Isso pode causar deformação, defeito ou dano irreversível ao produto pelos quais a Philips não se responsabiliza. A coloração dos alimentos pode manchar as peças. Este produto pode ser colocado em lava-louças. Não coloque o produto em um forno aquecido. Não coloque as partes da mamadeira em contato ou em superfícies com agentes de limpeza abrasivos ou antibacterianos. Recomenda-se trocar o bico a cada 3 meses. Mantenha os bicos em local seco e fechado. Não deixe o bico em locais expostos à luz solar direta ou ao calor, nem imerso em desinfetante (solução esterilizadora) por muito tempo, pois pode haver desgaste.

Compatibilidade

Bicos para troca estão disponíveis separadamente. Certifique-se de escolher o bico adequado correspondente ao anel de rosca da mamadeira: os bicos da linha anticólica da Philips Avent só encaixam nos anéis de rosca da linha anticólica da Philips Avent. Para saber mais sobre como escolher o bico certo para o seu bebê, visite-nos em www.philips.com/avent. A mamadeira Philips Avent é compatível com a maioria dos extratores de leite, copos de bico de silicone, discos de vedação e roscas de copos da marca Philips Avent.

Suporte

Caso você precise de informações ou suporte, acesse

www.philips.com/support.

