

PHILIPS

肩頸按摩器


頸部按摩器

PPM3502

快速入門指南

適用於PPM3502系列

1、將按摩器環繞於頸部，隨後可將鎖扣扣上，以保持按摩器與身體充分貼合。

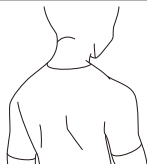

長按1.5秒開機；
1.5秒內雙擊電源鍵，
即可關閉語音/開啟語音，
對應語音播報。

2、長按電源鍵1.5秒開機，語音播報“按摩開啟”。開機默認進入【舒緩模式】，對應語音播報。1.5秒內雙擊電源鍵，即可關閉語音/開啟語音，對應語音播報。

3、短按電源鍵切換溫度檔位，切換順序依次為：【溫度低檔】-【溫度高檔】-【關閉加熱】對應語音播報，各模式的起始檔位以定義為準。



短按切換
溫度檔位



短按
切換模式

4、短按模式鍵切換模式，順序依次為：【舒緩模式】-【活力模式】-【喚醒模式】-【護頸模式】-【操捏模式】，對應語音播報。



短按切換
力度檔位

5、短按力度鍵切換力度檔位，切換順序依次為：【力度低檔】-【力度中檔】-【力度高檔】，對應語音提示，各模式的起始力度檔位根據各模式定義為準。

6、默認15分鐘定時關機，若需要中途停止，請長按電源鍵1.5秒關機。



電源指示燈

7、電源鍵指示燈顯示：

- 1)開機使用過程：綠燈常亮：溫度低檔；橙色常亮：溫度高檔；青色：關閉加熱。
- 2)充電過程：紅色呼吸燈：10%電量；綠色呼吸燈：11-50%電量；綠色呼吸燈：51-99%電量；綠色常亮：100%電量。

8、當電量低於10%時，電源鍵指示燈呈閃爍狀態作低電量預警，語音播報“電池電量低，請及時充電”1分鐘後機器自動關機，充電後才可再次開機。



當電量低於10%時，
指宗燈呈閃爍狀態

❗ 表面髒汙可用乾淨的抹布去除，較深的髒汙，可用中性洗潔劑沾濕抹布，然後輕輕擦除，保養時整機必須處於關機狀態。