

PHILIPS

筋膜リリースガン


ミニ筋膜リリースガン

PPM7302



クイックスタートガイド


1. 温感ヘッドにお好みのアタッチメントを取り付けます（そのままフラットヘッドでもご使用になれます）
取り付け後、問題なく動作するかどうかを確認してください。

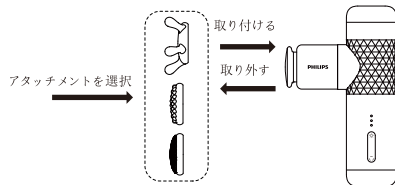


2. 電源ボタンを長押しすると、電源が入り振動が始まります。温感機能は作動せず、インディケーターランプが青く点灯します。



3. レベル切替ボタンを押すと、レベル1〜3、遅い変速、早い変速、レベル0（待機状態）までの順に切り替わります。
レベルによってレベル表示ランプの点灯が異なります。
レベル0は待機状態です。インディケーターランプ3灯すべてが点滅します。

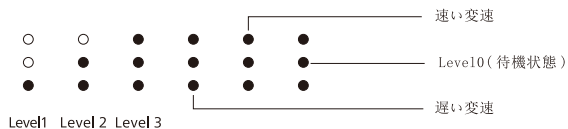


4. 温感機能ボタンを押しますと温感機能がオン / オフに切り替わります。
温感機能作動時はインディケーターランプがオレンジ色に点灯します。

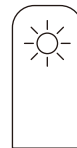

5. 10分間連続使用すると自動的に電源が切れます。再びご使用するには再度電源ボタンを長押ししてください。



6. はじめてご使用になるときは、満充電にするために3時間充電してください。

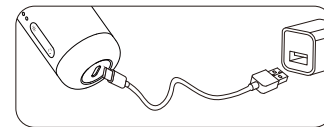



詳しくは下記のURLにて製品情報をご覧ください

www.philips.com

本取扱説明書に記載されている内容は、ご使用の製品とは一部異なる場合があります。実際の製品をご参照ください。製品の仕様、定格、デザイン等は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

© 2024 AquaShield

All rights reserved

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong Deerma Technology Company Limited and Guangdong Deerma Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

Made in China

Rev B JUN 24



7. 電池残量が10%以下（電池残量インディケーターが赤く点滅状態）になったら速やかに充電してください。



8. 電池残量インディケーターが点滅中は充電中を意味します。点滅から点灯（緑）に切り替わると満充電になります。



- ❗ 1. 充電中に本体を起動しないでください。
- 2. ご使用する前にアクセサリ類を取り外してください。
- 3. ご使用する前にアタッチメントを所定の位置に取り付けてください。
- 4. 刺激を避けるため、初回使用時にはレベル1からスタートをおすすめします。
- 5. フィンガーアタッチメントで頭皮をマッサージする際は、強い力で押さえつけないでください。