



詳しくは下記のURLにて製品情報をご覧ください

www.philips.com

本取扱説明書に記載されている内容は、ご使用の製品とは一部異なる場合があります。実際の製品をご参照ください。製品の仕様、定格、デザイン等は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

© 2024 AquaShield

All rights reserved

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong Deerma Technology Company Limited and Guangdong Deerma Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

Made in China

Rev B SEP 24



PHILIPS

筋膜リリースガン


ミニ筋膜リリースガン

PPM7303




クイックスタートガイド

1. 初めてご使用になる前には満充電にするために4時間充電してください。充電中は電源を入れないでください。

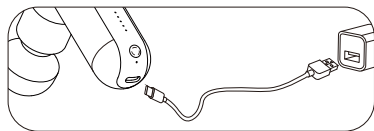


2. 電池残量インディケーターが緑色に点灯した場合は、バッテリーが完全に充電されていることを示します。


電池残量インディケーター赤色に点灯している場合は (バッテリー残量が 5% 未満)、充電してください。

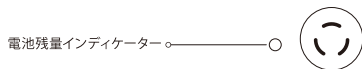

3. 10分間連続使用すると自動的に電源が切れます。再びご使用するには再度電源ボタンを長押ししてください。

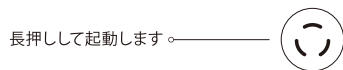

4. ヘッド取替部にお好みのヘッドおよびアタッチメントを取り付けます。ヘッドおよびアタッチメントはヘッド取替部にまっすぐ根元までしっかり押し込んでください。

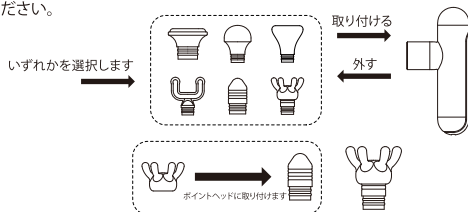


5. 電源ON：電源ボタンを長押しすると本体が起動します(レベル0)。

レベル0の状態では電源は入りますが作動しません。(インディケーターランプが緑色で表示) ただし温感ヘッド取付時は温感機能が作動します。(インディケーターランプが赤色で表示)。
レベル調整：レベル切替ボタンを1回ずつ押すとインディケーターランプが1～5まで順次点灯します。

レベル5の点灯後、さらに1回ボタンを押したら、レベル0(本体起動状態)に戻ります。



6. ヘッドを強く押すと自動停止し、レベル0 (本体起動状態) に切り替わります。電源ボタンを押すと再度ご使用いただけます。

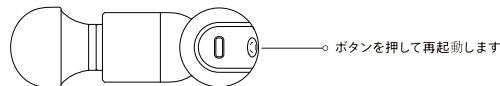

- ❗ 体の状態や状況に応じてレベルの強度を選択してください。
同じところに連続 10 分以上使用しないでください。