

PHILIPS

筋膜リリースガン


スポーツ
ミニ筋膜リリースガン

PPM7501




クイックスタートガイド

1. ご使用するアタッチメントを、ヘッド取替部に確実に取り付けてください。

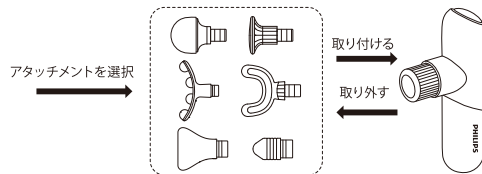


2. 本体上部の電源ボタンを長押し（約1秒）すると、電源が入ります。
（ただし、3秒以上電源ボタンを長押しすると電源は入りません。）

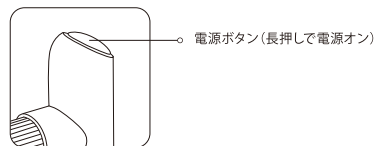

3. レベル切替ボタンを押すたびに、リングランプはレベルに応じて、
下記のように5段階に光ります。



4. 気になる部分にヘッドをあてます。
本製品を軽く押しあてたり、ゆっくりなぞるように動かしたりなどしてご使用ください。

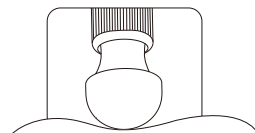


5. 電源を入れるとリングランプがレベル切替モードになります。
電源オンの状態で約3秒間操作がなかった場合、リングランプは自動的にレベル切替モードから圧力表示モードに切り替わります。ランプの色で圧力の大きさを表します。



- 青ランプ
- 緑ランプ
- 黄ランプ
- オレンジランプ

6. 電池残量が10%以下になるとランプが赤く点滅します。速やかに充電してください。
満充電になるとランプが青く点灯します。

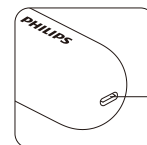



詳しくは下記のURLにて製品情報をご覧ください

www.philips.com

本取扱説明書に記載されている内容は、ご使用の製品とは一部異なる場合があります。実際の製品をご参照ください。製品の仕様、定格、デザイン等は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

© 2024 AquaShield

All rights reserved

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.


This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong Deerma Technology Company Limited and Guangdong Deerma Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

Made in China

Rev B JUN 24



7. 電源がオンになってから約 10 分で自動的に電源がオフになります。使用中に本体を停止させる場合は、本体上部の電源ボタンを電源が切れるまで長押ししてください。

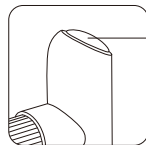

電源ボタン（長押しで電源オフ）

- ❗ 1. 充電中に本体を起動しないでください。
 - 2. 初回使用時にはレベル1からのスタートをおすすめします。
 - 3. 骨部や関節など筋肉が薄い部位に使用しないでください。
 - 4. 筋肉損傷の恐れがあるため、同じ部位に長時間のご使用はお控えください。
 - 5. 長期間使用しない場合は本体の汚れやほこりをよくふき取り保管してください。
- また、月に 1 回充電することをおすすめします。