

スリーププロファイラー **PSG2(LE)** SNLピエゾ 装着ガイド

販売名 スリーププロファイラー PSG2
医療機器認証番号 229AABZX00054000
アドバンスドブレインモニタリング社製



KT0312-3 第1版 2023.09.07

構成部品一例 (キャリングケース内のスポンジの形態及び一部の構成部品は実際と異なる場合があります。)

テープ 6 枚



本体とケーブル類



パルスオキシメータ
(SPO2 センサ付)



SP 電極
(EEG 電極・EMG 電極兼用)



スリープセンス
PVDF エフォートセンサーキット

装着完了図 (全体)



装着ビデオについて (ベルトの種類が異なる場合があります。)

本製品の装着方法は、右の二次元コード又は以下の URL から確認できます。

<https://www.imimed.co.jp/medical/product/inspect/sleepprofiler-psg2le/>



※リンクを開いた際、「あなたは医療関係者ですか?」と表示されますので「医療従事者」を選択してください。


Authorized distributor

PHILIPS


1. 本体の装着 (額の電極: EEG 電極、カニューラ、顎の電極: EMG 電極)



- 1 額を石けんで洗い、タオル等でよく拭いて乾かしてください。

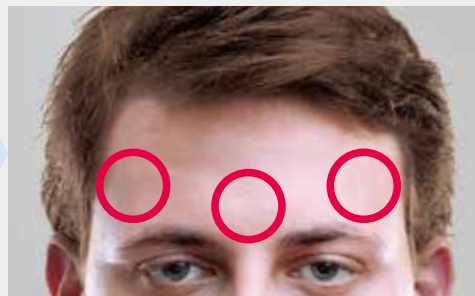

- 2 EEG 電極は、赤丸枠の辺りに貼り付けます。EEG 電極の電極カバーを取り外し、本体を両手で保持して中央の電極を額の中央にしっかりと装着します。電極と皮膚の間に毛髪が入らないよう注意してください。

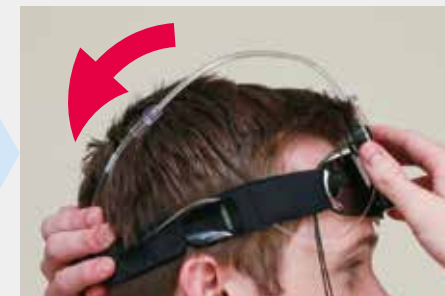

- 3 頭部ベルトを後頭部側に引張り調節し、頭を動かして頭部ベルトがずれないようにします。



- 4 本体から垂れる左右のケーブルを整えます。



- 5 カニューラの左右先端をつかみ、鼻孔から離れないように調節します (7mm 以内推奨)。



- 6 鼻孔からカニューラが抜けないようスリップチューブで調整をします。



- 7 EMG 電極の装着部位を石けんで洗い、タオル等でよく拭いて乾かしてください。



- 8 電極間は、5cmの間隔でしっかり貼り付けます。ひげのある場所は避けてください。
※電極の形状は写真と異なる場合があります。




装着図




カニューラや EMG 電極が外れないように矢印の箇所をテープで固定します。

2. エフォートベルトの装着 ※エフォートベルトは衣類の上から装着してください。

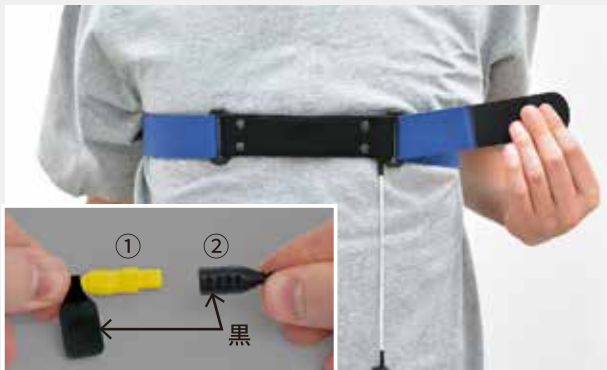

- 1 エフォートセンサーに取付けたベルトのどちらか片方の面ファスナーを外し、外したベルトを背中側から回して、白いコネクタケーブルが下向きになるように胸(脇の下)の周りで固定します。
接続は、黒ステッカー付きコネクタ①と黒コネクタ②を接続します。

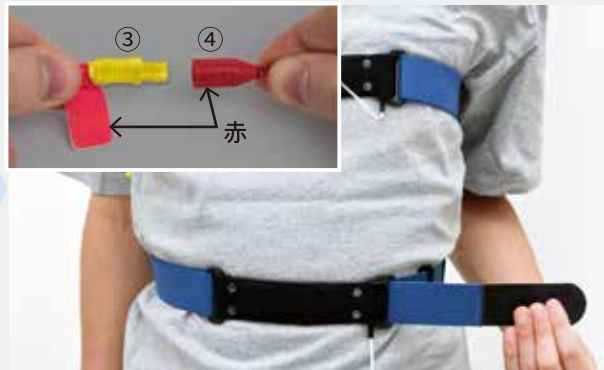

- 2 エフォートセンサーに取付けたベルトのどちらか片方の面ファスナーを外し、外したベルトを背中側から回して、白いコネクタケーブルが下向きになるようにお腹(へその上)の周りで固定します。
接続は、赤ステッカー付きコネクタ③と赤コネクタ④を接続します。



- 3 緩みや締め付けがない程度にベルトを調節します。


3. パルスオキシメータの装着



- 1 リストバンドを調節しながら、手首に取付けます。



- 2 人差し指を SPO2 センサに挿すと、自動的に電源がオンになります。液晶の数字を確認します。

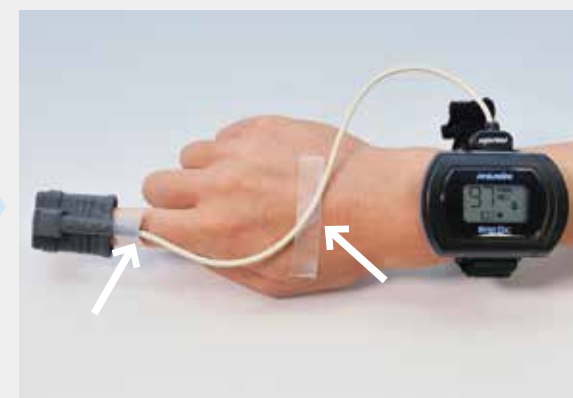

- 3 SPO2 センサのケーブルは、テープ等で固定します。

測定開始・終了

測定開始（入眠時）

〈音声メッセージ〉
電源が入りました



電源スイッチを1秒以上押します。緑色LEDが点滅し、センサチェックを行います。音声メッセージに従い測定の準備をします。

〈音声メッセージ〉
記録を開始します



「記録を開始します」の音声の後、測定を開始します。測定中は緑色LEDが点滅から点灯に変わります。

測定中（睡眠中）



トイレなどで睡眠中に起床するときも、測定を継続します（機器を外さない、スイッチを切らないでください）。

測定終了（起床時）

〈音声メッセージ〉
電源が切れました



電源スイッチを押すと「電源が切れました」の音声の後、測定が終了し電源が切れます。

機器の取り外し方



顎に取付けた電極は、肌を痛めないようにゆっくりと取り外します。



本体の取り外しは、ストリップと電極部をおさえながらゆっくりと取り外します。
※無理に外すとストリップが破損する原因になります。



機器を取り外し、ケースに戻します。使用したもののすべてをケースに戻してください。（梱包方法は写真と異なる場合があります）



エアフローアダプタからカニユーラを外す際は、回しながら外してください。（カニユーラを引っ張るとエアフローアダプタごと抜けてしまいます）


エアフローアダプタ

捨てないで必ず返却してください。



鼻カニユーラ

鼻カニユーラは使い捨てです。本体から取り外して各自治体の区分に従い、ご自宅で捨ててください。

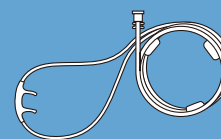

本社
〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-12
TEL.048(988)4411(代) FAX.048(961)1350
ホームページ <https://www.imimed.co.jp>

販売業者 株式会社フィリップス・ジャパン

〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー15階
www.philips.co.jp/healthcare

睡眠・呼吸製品のお問い合わせは地域の事業所まで
※各事業所の連絡先は以下のURLで公開しています
www.philips.co.jp/SRC-Office

販売名 スリーププロファイラー PSG2
製造販売認証番号 229AABZX00054000

アドバンスドブレインモニタリング社製 PN 1155968/240330 R2-W

