

お客様各位

株式会社フィリップス・ジャパン

AED 消耗品及び本体の管理のお願い

拝啓 この度は、弊社の AED をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

AED を管理いただくのに際しまして、以下内容をご参照いただき、AED 消耗品交換時期ラベルおよび AED 本体管理ラベルの取り付けをお願い致します。

敬具

1. AED 消耗品交換時期ラベルの記入

1) パッド【右図ラベルオレンジ枠内】

パッドの外袋パッケージの  マークの横に記載されている使用期限の年月日を記入する。

例)  2024-09-18

AED消耗品交換時期 (パッド/バッテリー)	
小学生~大人用	次回交換 2024 年 9 月 18 日
小学生~大人用	次回交換 2024 年 9 月 18 日
パッド 未就学児用	次回交換 2024 年 9 月 18 日
バッテリー AEDへの装着日より ☒ HS1・FRxシリーズ/FR2+ : 4年 (目安) ☐ FR3/FR3 Pro : 3年 (目安) ※バッテリーは設置環境や使用状況等により使用可能期間が異なります。	
	次回交換 2026 年 6 月

Gb-000-15-06

2) バッテリー【右図ラベル青枠内】

該当機種の下にチェックマーク ☒ を記入して、未使用バッテリーを AED に装着した年月から以下の年数を加算した年月を記入する。

HS1・FRx シリーズ/FR2+ : AED 装着日より 4 年※
FR3/FR3 Pro : AED 装着日より 3 年※

例) 未使用バッテリーの AED 装着日が 2022 年 6 月の場合は、以下のように記入する。

HS1・FRx シリーズ/FR2+の場合 : 2026 年 6 月
FR3/FR3 Pro の場合 : 2025 年 6 月

※バッテリーに記載の年月 (INSTALL BEFORE) は「AED 本体への装着期限」であり、次回交換の目安ではありません。


2. AED 本体管理ラベルの記入

1) シリアル番号 (右下図ラベルオレンジ枠内) : AED 本体裏面のシリアル番号 (SN) を記入する。

【FR3/FR3 Pro の本体裏面】

【HS1+e の本体裏面】

【FRx+e の本体裏面】

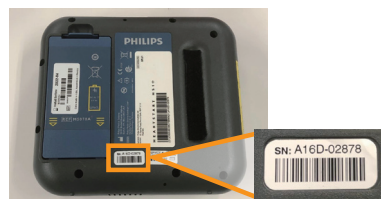

2) 購入日 (右図ラベル青枠内) :

AED をご購入された日 (設置された日) を記入する。

3) 耐用期間 (右図ラベル緑枠内) :

該当機種の下にチェックマーク ☒ を記入する。

AED本体管理	
シリアル番号 (SN) :	
□□□□-□□□□	
購入日 : 20 年 月 日	
☐ HS1+e/FRx+e : 8 年 ☒ HS1・HS1+/FRx・FRx+ : 7 年 ☐ FR3/FR3 Pro : 6 年 (製造年月より)	
耐用期間を過ぎた機器は、できるだけ早く更新をご検討ください。	
備考	

Gb-000-41-04

3. ラベルの表示

通常の収納状態でラベルの表示内容が容易に確認できるよう、ラベルを付属プレートに貼り、AED キャリングケースに取り付けます。プレートを使用せず、直接キャビネットにラベルを貼付いただいても構いません。




プレートをキャリングケースに取付けた例




ラベルを直接キャビネットに貼った例

【プレートの取り付け方法】

- 1) 付属プレートの表裏面に 2 種類のラベルを貼付します。

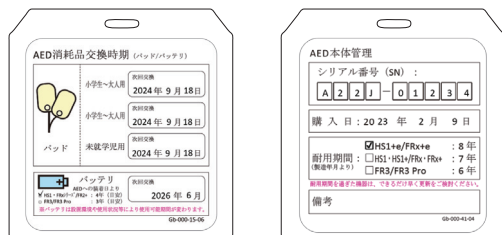

- 2) ストラップのくびれ側をプレートの穴に通します。
- 3) ストラップの反対側をくびれ上部の穴に通します。
- 4) AED のキャリングケースに取手部分にくぐらせて取り付けます。

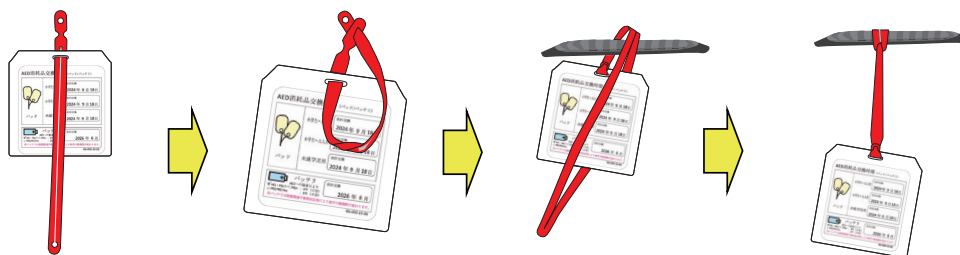

※設置後は、以下、日常点検を継続的に実施してください。

- 1) AED 本体上の「使用準備完了ランプ（緑色点滅）」を確認する。
- 2) AED 消耗品（パッドとバッテリー）の交換時期を確認する。
- 3) AED の外観を確認し、損傷等の異常がないことを確認する。

ご不明な点や、AED 本体に異常があった場合は、お買い上げいただいた販売店もしくは、弊社 AED コールセンターまでお問合せください。

株式会社フィリップス・ジャパン
AED コールセンター
0120-802-337
受付時間：9:00-18:00
(土、日、祝日、年末年始は除く)