



PHILIPS ZOOM!

Kombinované a domácí
bělení zubů Philips ZOOM!

6% koncentrace H_2O_2
v souladu s EU legislativou

Kombinované bělení

Je ideální pro pacienty, kteří hledají vysokou účinnost a chtějí okamžité výsledky.



PHILIPS
Zoom!

Výhody

- Rychlost
- Šetrnost
- Minimální nebo žádná citlivost zubů
- Flexibilita dobělování (denní nebo noční)
- Trvalé výsledky bez recidivy odstínu¹

Klinicky prokázané bělení až o 7 odstínů během 60 minut¹.




Doporučený postup ošetření:

1

První fáze: bělení v ordinaci



Ochrana dásní a nanesení bělicího gelu.

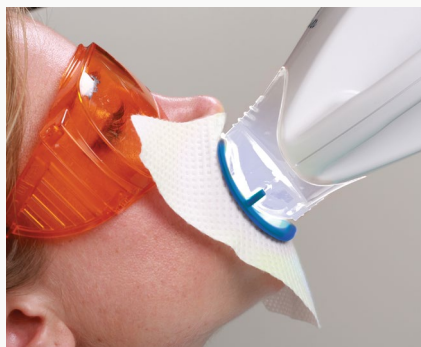

Aktivace bělicího gelu LED lampou
pro urychlení procesu (4 x 15 minut).

2

Druhá fáze: dobělení doma



3–6 dní dobělení a fixace barvy pomocí nosičů.

(A)

Výsledky



¹ Za 2 týdny (při kombinaci ordinační a domácí fáze NiteWhite 16% KP, která je součástí kitu).

Domácí bělení


Dramatické výsledky
z pohodlí domova.



Rozmanitost receptur
umožňuje flexibilitu v době
léčby podle potřeb pacientů.

Bělení podložené klinickými výsledky

- Malá nebo žádná citlivost²
- Prokázaná bezpečnost pro sklovinu
- Zanechává zuby hladší a lesklejší

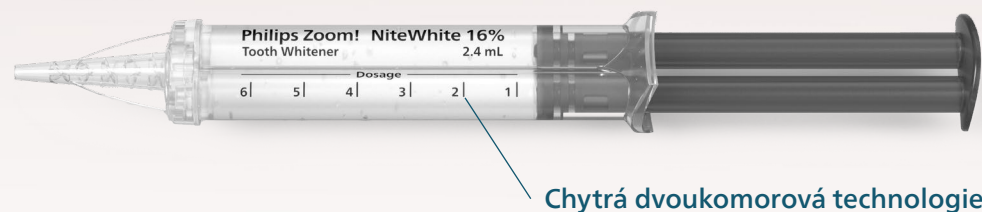

- Stabilní gel, který se aktivuje díky pH boosteru až při aplikaci.
- Gely není nutné uchovávat v lednici.



	Philips Zoom! NiteWhite 16%	Philips Zoom! NiteWhite 10%	Philips Zoom! DayWhite 6%
	Noční bělení pro hloubkový efekt i náročná zabarvení	Noční bělení vhodné pro pacienty s citlivými zuby	Denní bělení pro rychlé a pohodlné bělení během dne
Koncentrace účinné látky	16% karbamidperoxid	10% karbamidperoxid	6% peroxid vodíku
Doba působení	4–6 hodin během noci	4–6 hodin během noci	30–45 minut 2x denně
Výsledek	během 1–2 týdnů	během 2–3 týdnů	během týdne

² n = 77, USA. Během ordinačního bělení nebo bezprostředně po něm nebyla prakticky zaznamenána žádná citlivost zubů ani dásní.


Prevence citlivosti

PHILIPS
ZOOM!


Nejčastějším vedlejším účinkem bělení je citlivost zubů. Váš zubní lékař nejlépe posoudí, zda je pro vás bělení zubů vhodné a doporučí vám správnou koncentraci bělicí látky.

Philips ZOOM navíc obsahuje 3 látky snižující citlivost zubů:


1. Amorfní kalcium fosfát (ACP)

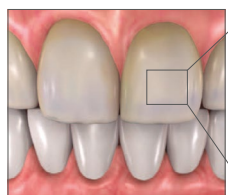


Remineralizace skloviny

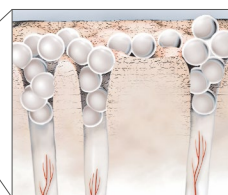

Zvýšené vstřebávání fluoridů

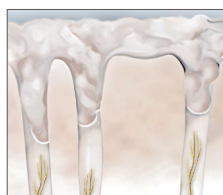


Snížení citlivosti mechanickým uzavřením dentinových tubulů

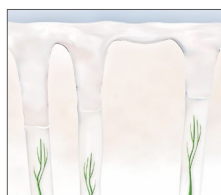

Zvýšení hladkosti a lesku zubů

2. Dusičnan draselný (KNO_3)

Inhibuje receptory bolesti zubu a tím snižuje bolest

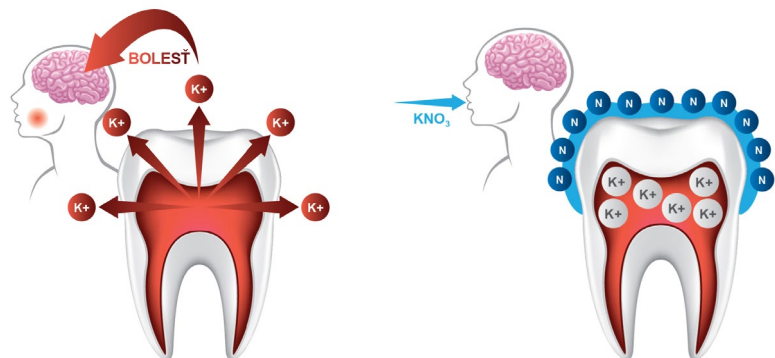

3. Fluoridy

Fluoridy jsou účinnou látkou zubních past, gelů, laků i tablet, které se používají k prevenci zubního kazu. Jejich účinek je znám již od 20. let minulého století.

Během procesu bělení jsou důležitou sloučeninou, která obnovuje minerální rovnováhu ve sklovině, aby zub během procesu bělení nestrádal.

Obsahuje 1000 ppm fluoridu sodného.



Jedinečnost Philips Zoom

Gely poskytují víc než jen bělení.
Unikátní kombinace složek zajistí zářivý úsměv bezpečně pro zubní sklovinu.



Ochrana
skloviny



Hladký povrch
zubu



Snižuje
citlivost



Odstranění
pigmentů

Získejte více informací

Kontaktujte obchodního zástupce



©2025 Philips Oral Healthcare, Inc. Veškerá práva vyhrazena. PHILIPS a emblém Philips jsou ochranné známky společnosti KPENV. Ostatní ochranné známky jsou ve vlastnictví společnosti Discus Dental, LLC. Pouze k užívání dentálními odborníky.
©2024 Discus Dental LLC. Veškerá práva vyhrazena.