

PHILIPS



マスク及びCPAP付属品の使い方

ドリームウェア シリコンピローマスク

DreamWear Silicone Pillows mask

- ※ 本書は取扱説明書に代わるものではありません。必ず添付文書および取扱説明書をご覧ください。
- ※ フィルタの交換・取り付けはご使用の機器を確認し、裏面の「5.フィルタの取り付け方法」の項を参照しながら行ってください。
- ※ ご不明な点がございましたら、最終ページのお客さまコールセンターまでお問い合わせください。

マスク装着方法の動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから

各端末から右記の二次元コードを読み取り動画へ



パソコンから

フィリップス

検索

philips.co.jp のトップページ上部メニューにある「健康」を開き「患者さま向け機器取り扱い資料」の下にある「DreamFamily」をクリック

各部品の名称

＊呼気ポート付きマイクロエルボ、および呼気ポートは塞がないでください。

呼気ポート付き
マイクロエルボ＊



クイックスイベル

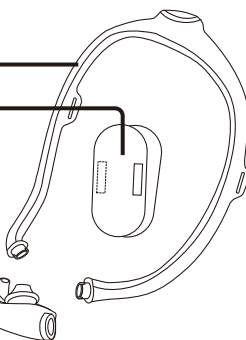
マスクフレーム

布製フレームカバー（オプション）


ピロークッション先端部

ピロークッション基部

呼気ポート付き
ピロークッション
プラットフォーム



ヘッドギア
（オプション）

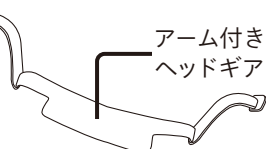

アーム付き
ヘッドギア



正しい装着図

1 マスク装着の手順（1）

図のようにクッションを鼻の下に
当て、ピロークッション先端部を
鼻孔に入れます。

ピロークッションの基部
が鼻の下に隙間なく快適
に固定されるサイズの
クッションを選択して
ください。



① マスク装着の手順 (2)

フレームを頭の上に取り付けます。
ヘッドギアを引っ張り、後頭部に
掛けます。



ヘッドギアのタブを布製部分から
剥がします。

ストラップの長さを調整します。
タブを布製部分に押し付けて再装着
します。

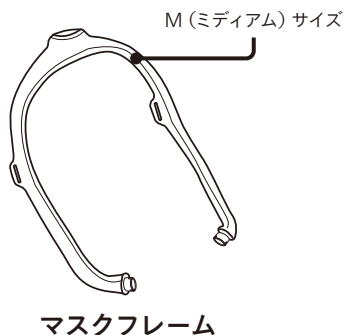
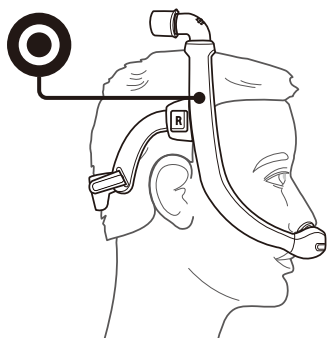


マスクを外す場合は、調整した
ストラップの長さを保持するため、
クッションをつかんで前方に引き
離して鼻から外します。
その後、クッションとマスクを引き
上げて頭から外します。




2 マスクフレームの調整方法

M (ミディアム) サイズのマスクフレームが顔のサイズに合わない場合は医療機関に問い合わせ、S (スモール) またはL (ラージ) サイズのマスクフレームをお試しください。




マスクフレームが 耳に近すぎる場合








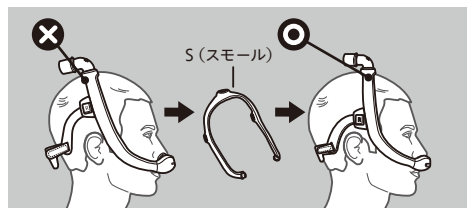
マスクフレームが後方に傾き、耳に近すぎる場合は、より小さなマスクフレームが必要と考えられます。



マスクフレームが 目に近すぎる場合

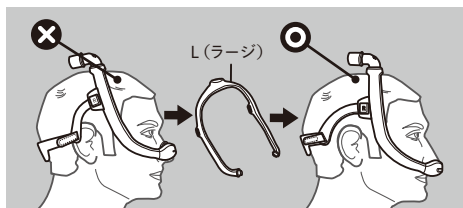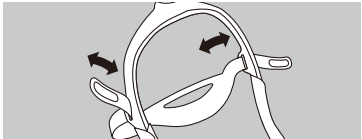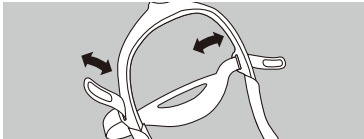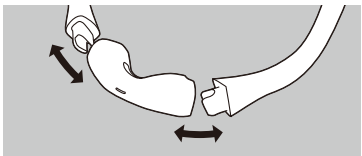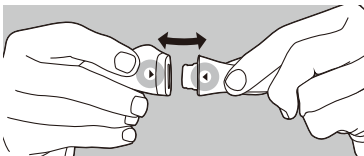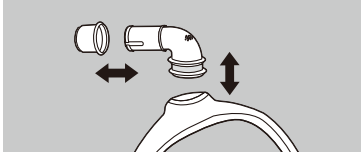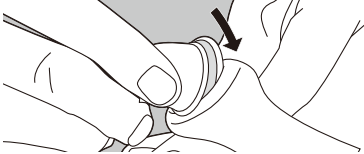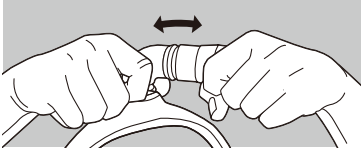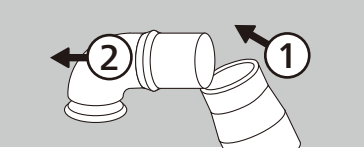マスクフレームが頭の前方に傾き、眼に近すぎる場合は、より大きなマスクフレームが必要と考えられます。



部品名	分 解	組み立て
ヘッドギア	ヘッドギアをマスクフレームから取り外します。 	ヘッドギアをマスクフレームのスロットに通します。 
クッション	クッションをマスクフレームから取り外します。 	マスククッションとフレームの△マークを合わせ、カチッと音がするまで取り付けます。 
呼吸ポート 付き エルボ	マスクフレームから呼吸ポート付きエルボを取り外します。 	マスクフレーム上部に、呼吸ポート付きエルボをななめから溝に合わせて差し込みます。 
マスクと回路 の接合部	マスクと回路の根元を持ち、接続部を直角に折り曲げるようにして外します。* 	スイベルに回路を覆うようにあてて奥まで差し込みます。 

*回路にスイベルが残っていないことを確認してください

スイベルが回路に残っているとマスク交換の際に接続できないことがあります。

4

付属品のお手入れ方法

(呼吸回路、水タンク、花粉フィルタはマスクの付属品ではありません)

頻度	付属品名	洗浄方法・交換
毎日	マスク 	各部品を分解し、中性洗剤を薄めたぬるま湯で洗浄します。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。
	呼吸回路 	中性洗剤をうすめたぬるま湯で、洗います。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。
1週間	水タンク+ 水タンク用 パッキン 	中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水ですすぎます。乾いた布などで水気を拭き取り陰干しします。
	ヘッドギア 	マスクからはずして中性洗剤をうすめたぬるま湯にひたし、5分間おきます。
1ヶ月	花粉 フィルタ 	必ず乾いた花粉フィルタと交換します。使用後は中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水でよくすすいだあと風通しのよい所で陰干しします。



注意

付属品（マスク・回路など）の

お手入れをする際は、以下のことをお守りください。

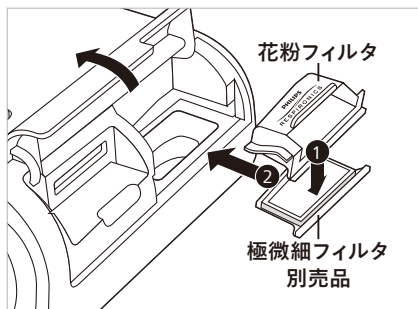
- ・ベンジン、アルコール、塩素系洗剤は使用しない。
- ・日当りの良い場所で干さない。

5 フィルタの取り付け方法



ドリーム
ステーション

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際は
右図の順でセットします。



ドリームステーションの取り扱い方法を解説した動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから

各端末から右記の二次元コードを
読み取り動画へアクセス



パソコンから

philips.co.jp のトップページ上部メニューにある「健康」
を開き「患者さま向け機器取り扱い資料」の下にある
「DreamFamily」をクリック

販売名: ドリームステーション Auto
販売名: ドリームステーション Pro
販売名: ドリームステーション BIPAP Auto

製造販売承認番号: 30200BZX00299000
製造販売承認番号: 22800BZX00314000
製造販売承認番号: 22800BZX00348000



CPAPお客様コールセンター

よるは よいこきゅう
0120-48-4159

受付時間 7:00～22:00 年中無休 365日対応

製造販売業者

株式会社フィリップス・ジャパン

〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1

麻布台ヒルズ森JPタワー15階

www.philips.co.jp/healthcare

睡眠・呼吸製品のお問い合わせは地域の事業所まで

※各事業所の連絡先は以下のURLで公開しています

www.philips.co.jp/SRC-Office

販売名：ドリームウェア シリコンビローマスク

製造販売届出番号：13B1X00221000125

一般医療器 一般的名称：人工呼吸器用マスク

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくはお近くの事業所までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

© 2025 Koninklijke Philips N.V. PN 1153818/250520 R5-FK

