


# PHILIPS

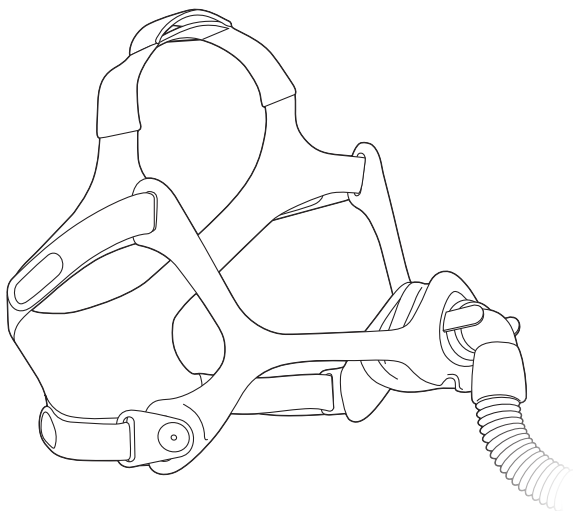

## マスク及びCPAP付属品の使い方

ウィスプ ネーザルマスク

Wisp Mask

- ※ 本書は取扱説明書に代わるものではありません。必ず添付文書および取扱説明書をご覧ください。
- ※ フィルタの交換・取り付けはご使用の機器を確認し、裏面の「5.フィルタの取り付け方法」の項を参照しながら行ってください。
- ※ ご不明な点がございましたら、最終ページのお客コールセンターまでお問い合わせください。

### マスク装着方法の動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから

各端末から右記のQRコードを読み取り動画へアクセス



パソコンから


フィリップス

検索

philips.co.jp のトップページ上部メニューにある「健康」を開き「患者さま向け機器取り扱い資料」の下方にある「マスク」をクリック

# ヘッドギアとマスクの名称

\*塞がないこと

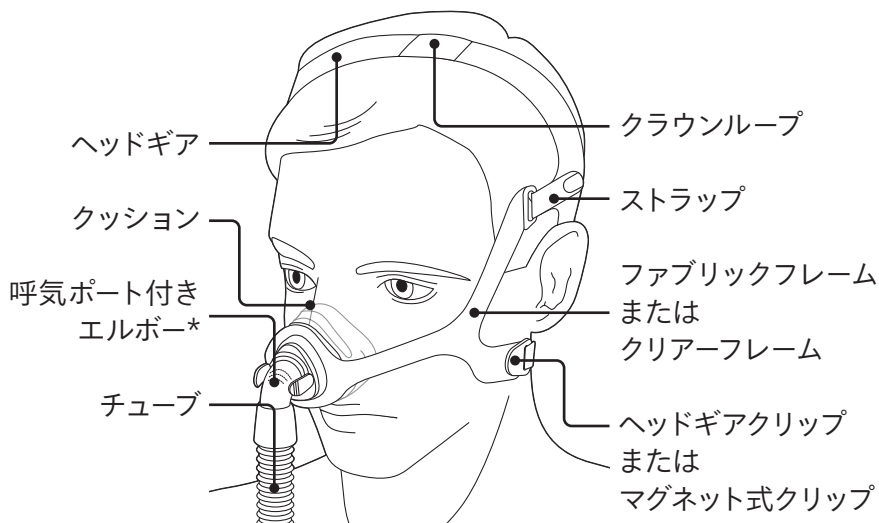


正しい装着図

## 1 マスク装着の手順（1）


ヘッドギアのクリップを片方はずします。

次にクッションを鼻にあてたまま、ヘッドギアを装着します。

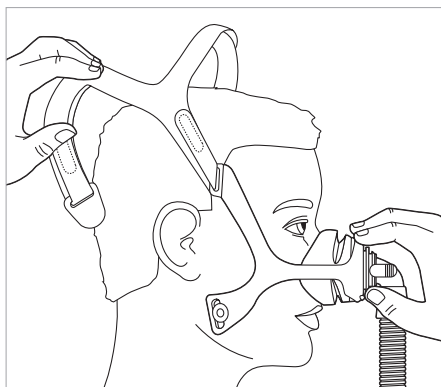


## 1 マスク装着の手順 (2)

ヘッドギアの下部にクリップ  
を再装着します。


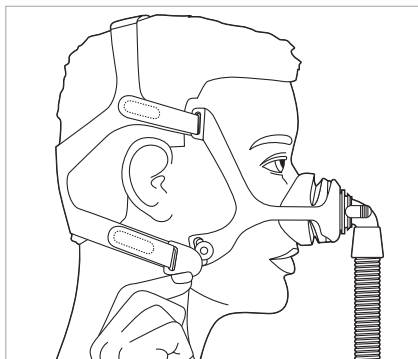


上部ストラップと  
下部ストラップを左右均等に  
締めすぎないように注意しつつ  
調整します。

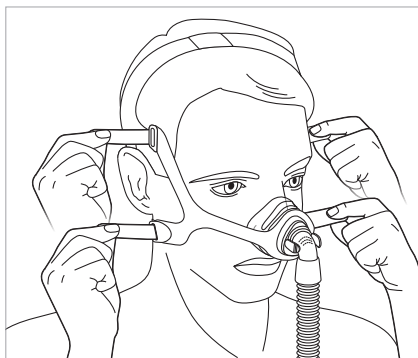

マスクを取り外す際は、  
クッション部分を手で  
押さえながらヘッドギア  
を前方にずらして取り  
外します。


※クッション部分を持ちあげな  
がら取り外さないください。

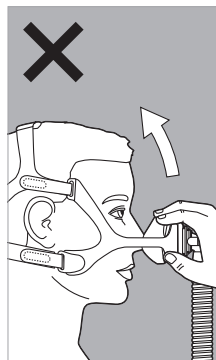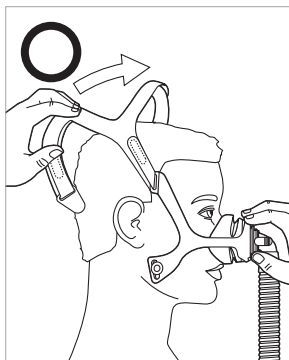

## 2 トラブルと対処法


### マスクが頬に食い込んでいる場合

ヘッドギアを締めすぎていませんか？  
特に下部のヘッドギアは頬との間に  
指が1本入る程度に緩めます。

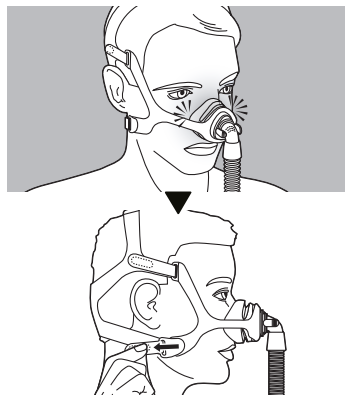


### 目の周辺に空気漏れがある場合

マスクが顔と平行になっていますか？  
ヘッドギアが顔を圧迫しないところで  
留めなおします。



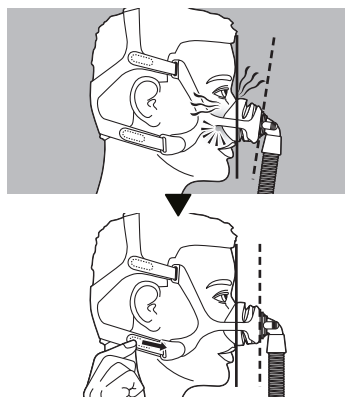


### 口元の周辺に空気漏れがある場合

マスクが顔と平行になっていますか？  
ヘッドギアが顔を圧迫しないところで  
留めなおします。

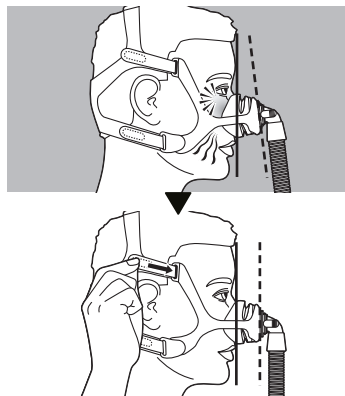

### 3 マスクの分解／組み立て
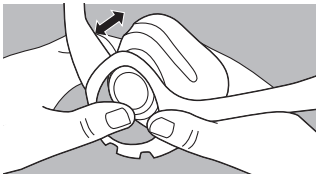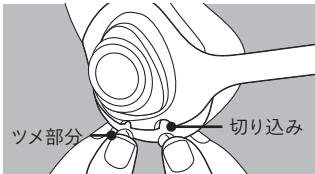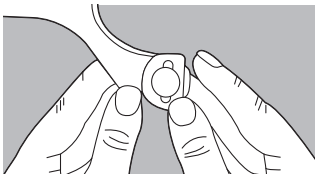
| 部品名            | 分 解                                                                                                               | 組み立て                                                                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ヘッドギア          | ヘッドギアのストラップ部分をフレームから取り外します。                                                                                       | ヘッドギアのストラップをスロット、クリップに通して取り付けます。                                                                                                    |
| チューブ           | クイックリリースタブを両側から押さえて引き離し、フレームからチューブを取り外します。                                                                        | クイックリリースタブを両側から押さえながら接続口に取り付けます。                                                                                                    |
| マスク<br>クッション   | マスクフレームから取り外します。<br>            | クッションのツメ部分をフレームの切り込みに合わせてはめ込みます。<br>             |
| マグネット式<br>クリップ | クリップを外し、丸い部分をフレームから押し出します。<br> | 丸いパーツの突起をフレームに押し込み、クリップをヘッドギアのストラップに取り付けます。<br> |

## 4

## 付属品のお手入れ方法

(呼吸回路、水タンク、花粉フィルタはマスクの付属品ではありません)

| 頻度  | 付属品名                                                                                                | 洗浄方法・交換                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 毎日  | マスク<br>            | 各部品を分解し、中性洗剤を薄めたぬるま湯で洗浄します。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。                      |
|     | マグネティッククリップ<br>    | クリップはすすいだあと水分を拭き取ってください。                                              |
|     | 呼吸回路<br>           | 中性洗剤をうすめたぬるま湯で、洗います。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。                             |
| 1週間 | 水タンク+水タンク用パッキン<br> | 中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水ですすぎます。乾いた布などで水気を拭き取り陰干しします。                   |
|     | ヘッドギア<br>         | マスクからはずして中性洗剤をうすめたぬるま湯にひたし、5分間おきます。                                   |
| 1ヶ月 | 花粉フィルタ<br>       | 必ず乾いた花粉フィルタと交換します。使用後は中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水でよくすすいだあと風通しのよい所で陰干しします。 |



注意

付属品（マスク・回路など）の

お手入れをする際は、以下のことをお守りください。


- ・ベンジン、アルコール、塩素系洗剤は使用しない。
- ・日当りの良い場所で干さない。

## 5 フィルタの取り付け方法



ドリーム  
ステーション

古いフィルタを取り除きます。  
新しいフィルタに交換する際は  
右図の順でセットします。

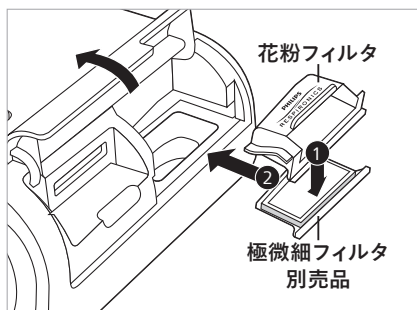

ドリームステーションの取り扱い方法を解説した動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから  
各端末から右記のQRコードを  
読み取り動画へアクセス



パソコンから

philips.co.jp のトップページ上部メニューにある  
「健康」を開き「患者さま向け機器取り扱い資料」の  
下方にある「ドリームファミリー」をクリック

販売名: ドリームステーション Auto  
販売名: ドリームステーション Pro  
販売名: ドリームステーション BiPAP Auto

製造販売承認番号: 30200BZX00299000  
製造販売承認番号: 22800BZX00314000  
製造販売承認番号: 22800BZX00348000

### マグネット式クリップについてご注意ください

- 動作中の医療機器（特にペースメーカー、除細動器、人工内耳などの植込型機器）、ニッケル・鉄などの磁性金属から5cm以上離して使用してください。
- 磁気共鳴画像（MRI）装置の内部または近くでは使用しないでください。



CPAPお客様コールセンター

よるは よいこきゅう

**0120-48-4159**

受付時間 7:00～22:00 年中無休 365日対応

販売名: ウィスプ ネーザルマスク

製造販売届出番号: 13B1X00221000100

一般医療機器

製造販売業者

**株式会社フィリップス・ジャパン**

〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1

麻布台ヒルズ森JPタワー15階

[www.philips.co.jp/healthcare](http://www.philips.co.jp/healthcare)

睡眠・呼吸製品のお問い合わせは地域の事業所まで

※各事業所の連絡先は以下のURLで公開しています

[www.philips.co.jp/SRC-Office](http://www.philips.co.jp/SRC-Office)

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくはお近くの事業所までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

©20175 Koninklijke Philips N.V. PN 1110450/250420 R19-FK

