

PHILIPS



マスク及びCPAP付属品の使い方

ウィスプ小児用ネーザルマスク
ウィスプ小児用ネーザルマスク用SE エルボ
Wisp Pediatric nasal mask

- ※ 本書は取扱説明書に代わるものではありません。必ず添付文書および取扱説明書をご覧ください。
- ※ フィルタの交換・取り付けはご使用の機器を確認し、裏面の「5.フィルタの取り付け方法」の項を参照しながら行ってください。
- ※ ご不明な点がございましたら、最終ページのお客コールセンターまでお問い合わせください。

マスク装着方法の動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから

各端末から右記のQRコードを
読み取り動画へアクセス



パソコンから

philips.co.jp のトップページ上部メニューにある「健康」を開き「患者さま向け機器取り扱い資料」の下方にある「マスク」をクリック

CPAP装置をお使いの方

CPAPお客様コールセンター

よるは よいこきゅう

0120-48-4159

受付時間 7:00～22:00 年中無休 365日対応

販売名: ウィスプ小児用ネーザルマスク
医療機器届出番号: 13B1X00221000117
一般医療機器

製造販売業者

株式会社フィリップス・ジャパン

〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1

麻布台ヒルズ森JPタワー15階

www.philips.co.jp/healthcare

睡眠・呼吸製品のお問い合わせは地域の事業所まで
※各事業所の連絡先は以下のURLで公開しています
www.philips.co.jp/SRC-Office

人工呼吸器をお使いの方

昼間

地域事業所

受付時間 平日9:00～17:30

夜間休日

機器安全センター



0120-633-811

受付時間 平日17:30～翌9:00 土・日・祝祭日

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくはお近くの事業所までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

© 2017 Koninklijke Philips N.V. PN 1134118/250716 R5-PDF

ヘッドギアとマスクの各部名称

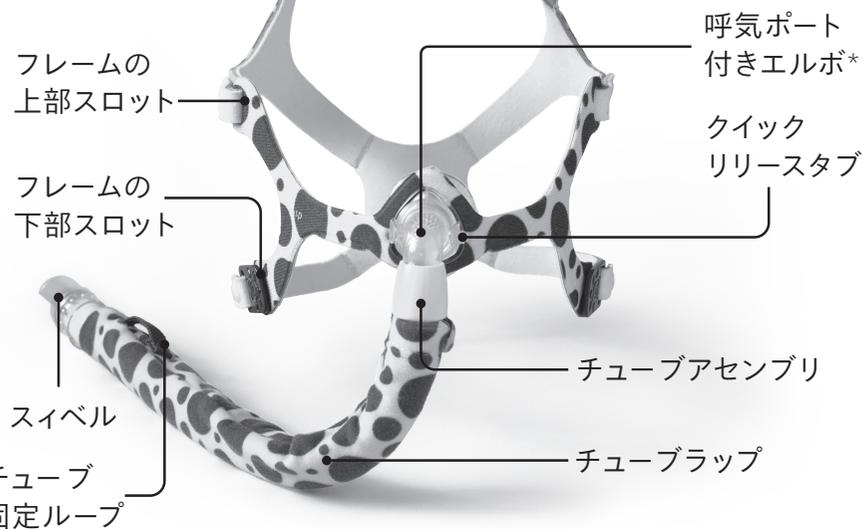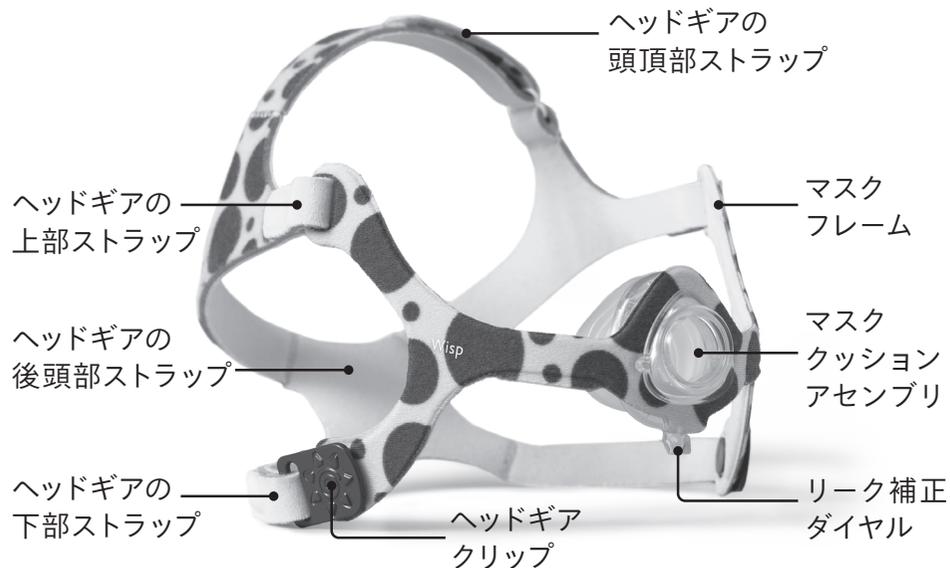


*呼吸ポート付きエルボは塞がないでください。

1 マスク装着の手順 (1)

ヘッドギアのクリップを片方はずします。



リーク補正ダイヤルを下向きにしてクッションを鼻にあてたまま、ヘッドギアを装着します。

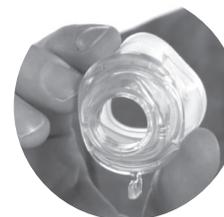


ヘッドギアの下部にクリップを再装着します。



1 マスク装着の手順 (2)

上部ストラップと下部ストラップを左右均等に取り付けます。
締めすぎないようにご注意ください。

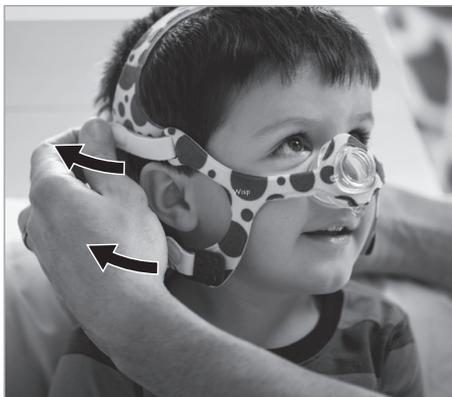

ヘッドギアとマスクフレームが耳に触れないように頭頂部のストラップを調整します。



マスクを取り外す際は…

チューブアセンブリを取り外します。
片方のヘッドギアクリップを外し、マスククッション部分を片手で押さえながらヘッドギアを前方にずらして取り外します。



2 トラブルと対処法

マスクが頬に食い込んでいる場合

ヘッドギアを締めすぎていませんか？
特に下部ストラップは頬との間に指が1本入る程度に緩めてください。



空気が漏れる場合

鼻周辺から空気が漏れる場合はマスククッション下部にあるリーク補正ダイヤルを左右に動かしてください。



リーク補正ダイヤルを使用しても空気漏れが補正できない場合は、マスククッションを手でつかんで浮かし、マスククッションの位置を調整してください。



3 快適にご使用いただくためのヒント

ヘッドギアクリップはオプションです。

ヘッドギアのストラップを直接マスクフレームの
スロットに通すこともできます。



クイックリリースタブを押すと、ヘッドギアから
チューブが外れ、迅速に機器とマスクを取り
外すことができます。再び機器に接続する際
は、エルボを所定の位置にカチッと音がする
まで押し込みます。



チューブラップのチューブ固定ループにチューブ
を通し、頭上に固定することができます。
固定中はクイックリリースタブを使用してチューブ
を取り外さないでください。



取り外し方について

お子さまの好みに合わせ、
マスクフレームを引き上げて
外すか、ヘッドギアをすべら
せて外してください。




3 マスクの分解／組み立て

部品名	分 解	組み立て
ヘッドギア	ヘッドギアのストラップ部分を マスクフレームから取り外します。	上部ストラップをマスクフレーム の上段に通し、下部ストラップを ヘッドギアクリップに通して取り 付けます。
チューブ	クイックリリースタブを両側から 押さえて引き離し、マスクフレーム からチューブを外します。	クイックリリースタブを両側から 押さえながらマスククッションに 取り付けます。
マスク クッション	マスクフレームから取り外します。	リーク補正ダイヤルを下向きに して、マスクフレームの切り込み に合わせてはめ込みます。



5 SEエルボアクセサリ (オプション)

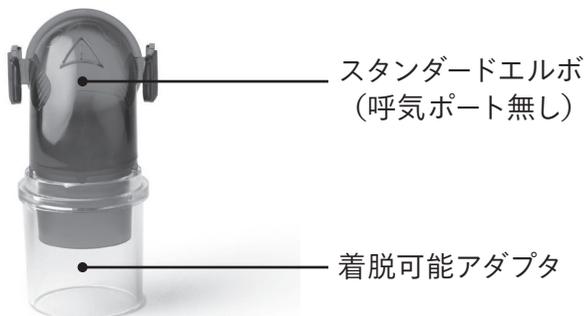

注意

機器の電源が入っていない時にこのアクセサリを接続したマスクを使用すると、呼気を再呼吸するおそれがあります。数分以上の間、呼気を再呼吸すると、状況により窒息を生じることがあります。

エルボの取り付け方

クイックリリースタブが所定の位置でカチッと音がするまで、エルボをマスククッションに押し込みます。

※着脱可能アダプタを回路に接続する必要がある場合は、アダプタをスタンダードエルボに取り付けてください。



エルボの取り外し方

クイックリリースタブを両側から押さえて引き離し、マスクフレームからエルボを外します。



6

付属品のお手入れ方法

(呼吸回路、水タンク、花粉フィルタはマスクの付属品ではありません)

頻度	付属品名	洗浄方法・交換
毎日	マスク 	各部品を分解し、中性洗剤を薄めたぬるま湯で洗浄します。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。
	呼吸回路 	中性洗剤をうすめたぬるま湯で、洗います。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。
1週間	水タンク+水タンク用パッキン  or 	中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水ですすぎます。乾いた布などで水気を拭き取り陰干しします。
	ヘッドギア 	マスクからはずして中性洗剤をうすめたぬるま湯にひたし、5分間おきます。
1ヶ月	花粉フィルタ 	必ず乾いた花粉フィルタと交換します。使用後は中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水でよくすすいだあと風通しのよい所で陰干しします。



注意

付属品 (マスク・回路など) の

お手入れをする際は、以下のことをお守りください。

- ・ベンジン、アルコール、塩素系洗剤は使用しない。
- ・日当りの良い場所で干さない。

