


PHILIPS

ドリームマッパ インストールガイド

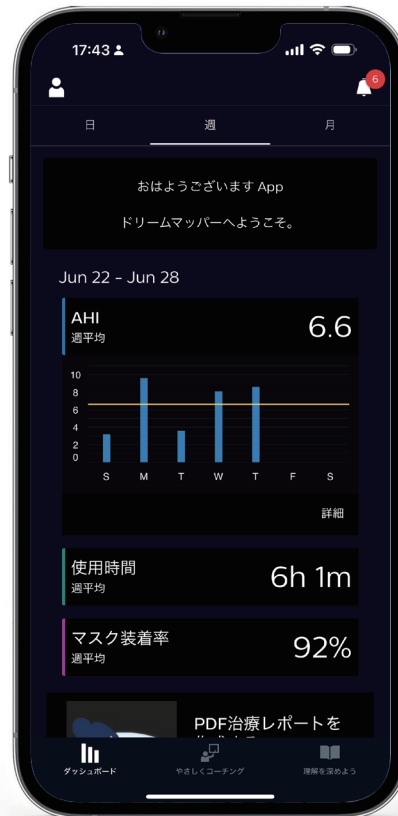

注意事項

- アプリダウンロードは無料です。アプリのダウンロード時もしくはアプリをご利用時の通信料はお客様のご負担になります。
- App StoreやGoogle Playから専用のアプリケーションをダウンロードする必要があります。
- 画面はイメージで実際とは異なる場合があります。
- 本アプリケーションの対象OSにつきましては App Store またはGoogle Play のページをご確認ください。
- 通信環境によっては各種機能をご利用いただけない場合があります。
- Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。
- 本コンテンツは予告なく終了する場合があります。
- ドリームマッパーは、ドリームステーションと併用するための専用アプリケーションです。
- ドリームマッパーにおけるプライバシーポリシーは、各アプリケーションストアやドリームマッパーのヘルプから参照できます。
またフィリップスのプライバシーに関する通知は、<http://www.philips.co.jp>のプライバシーに関する通知からご確認ください。
- 「Android」「Google Play」は、Google Inc.の登録商標です。
- 「iPhone」「App Store」は、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
- 掲載内容は、2025年6月時点のものです。予告なく変更・中止される場合があります。

1 アプリのダウンロード

検索してインストール

モバイル端末からApp StoreまたはGoogle Playで「ドリームマッパー」を検索して、アプリをインストールしてください。

ドリームマッパー

検索

このアイコンが目印です



※ iPadでアプリが見つからない場合は、
表示設定を「iPhoneのみ」にしてください。

二次元コードからインストール

モバイル端末からご利用のOSに対応した以下の二次元コードを読み込みインストールしてください。



インストールが完了したらドリームマッパーを開き、設定を行います。

2 エリアの設定

お住まいの国を選択してください。

どちらにお住まいですか？

Q Search

ポルトガル

ポーランド

マルタ

ミャンマー

メキシコ

ルーマニア

南アフリカ

大中華圏 台湾

大中華圏 香港

日本

米国

韓国

3 アカウント作成


はじめてアプリを開くときは、「アカウントの作成」を選んでください。



The image shows the login screen of the DreamMapper app. At the top is the Philips logo. Below it, the text 'ドリームマッパー' (DreamMapper) is displayed. There are two input fields: one for the email address (japan.dmuatone@mail.con) and one for the password. Below these fields is a 'ログイン' (Login) button. Underneath the login button is a link that says 'ユーザー名/パスワードをお忘れですか？' (Forgot your username/password?). At the bottom, there is a light blue button labeled 'アカウントの作成' (Create account), which is highlighted with an orange border.

4 必要事項の入力

必要事項を入力してください。
アカウントを作成するため、お使いの端末で使用可能なEメールアドレスをご用意ください。

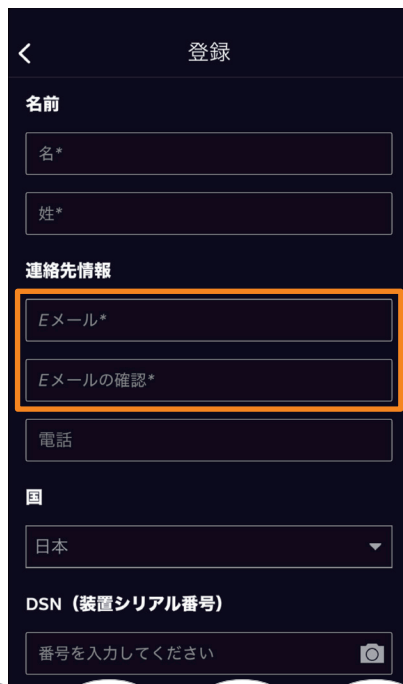

The image shows the registration form in the app. The title is '登録' (Registration). The form has several sections: '名前' (Name) with fields for '名*' (First name) and '姓*' (Last name); '連絡先情報' (Contact information) with fields for 'Eメール*' (Email) and 'Eメールの確認*' (Confirm email), both highlighted with orange borders; '電話' (Phone); '国' (Country) with a dropdown menu showing '日本' (Japan); and 'DSN (装置シリアル番号)' (Device serial number) with a field and a camera icon for scanning. The 'Eメール*' and 'Eメールの確認*' fields are highlighted with orange borders.

5 CPAP装置の登録

装置シリアル番号では、カメラマークを押すとモバイル端末のカメラが起動しますのでアクセス許可を押してください。画面に従ってスキャンします。



The image shows the camera access and scanning process. The first screen is titled 'DSN (装置シリアル番号)' and has a field for the serial number with a camera icon to the right, highlighted with an orange border. The second screen is a system dialog box titled '"DreamMapper" がカメラへのアクセスを求めています' (DreamMapper is requesting access to the camera) with the text 'For barcode scanning.' and two buttons: '許可しない' (Don't allow) and '許可' (Allow), with '許可' highlighted with an orange border. The third screen is titled 'スキャン手順' (Scanning procedure) and shows instructions: 'カメラを装置の下部にあるQRコードに向け、コードがフレームの中央に来るようにします。' (Point the camera at the QR code at the bottom of the device, and make the code come to the center of the frame.) and a warning: '⚠ 装置を裏返す前に必ず加湿器を外してください。そうしないと、加湿器の破損や故障の可能性があります。' (Before turning the device over, please remove the humidifier. Otherwise, the humidifier may be damaged or malfunction.) At the bottom, there are two buttons: '却下' (Cancel) and 'スキャン' (Scan), with 'スキャン' highlighted with an orange border.

6 ライセンス契約書

契約書をご一読ください。
同意いただけましたらチェックを入れ
「次へ」ボタンを押してください。

登録

J29812737EC03

☒ 私は契約条件を理解し、これに同意します。

☒ 私は、私の個人情報が、私のアカウントおよびユーザープロフィールを作成するために、また、私の治療目標の達成をサポートする目的で、私の治療装置の使用状況の概要を提供するために使用されることに同意します。当社が使用する個人情報の内容、お客様にサービスを提供するためにデータを使用する方法の詳細については、添付のプライバシー通知を確認してください。プライバシー通知には、お客様にドリームマッパーを提供するために当社がどのようにデータを使用するのか詳しく記載されています。私は、アカウントおよびユーザープロフィールを作成するために個人情報を使用することに同意します。

次へ

7 パスワードの作成

記載された条件を満たすパスワード
を設定してください。
「アカウントの作成」を押します。

登録

ユーザー名
japan.dmuatone@mail.com

パスワードの作成

パスワードには次の文字が必要です：

- 8～20文字
- 大文字と小文字
- 特殊文字
- 数字
- パスワードにEメールアドレスや「password」という単語を含めることはできません

アカウントの作成

8 設定の確認

すべての項目がオンの状態になって
いることをご確認ください。
「始めましょう!」を押します。

登録

改善にご協力ください

すべての同意を確認する ☒

Cookieと分析 ☒


アプリでのマーケティング ☒

始めましょう!

9 マスクの設定

プロフィール画面からマスクの設定を行います。


ホーム画面で左上の人型アイコンを押します。

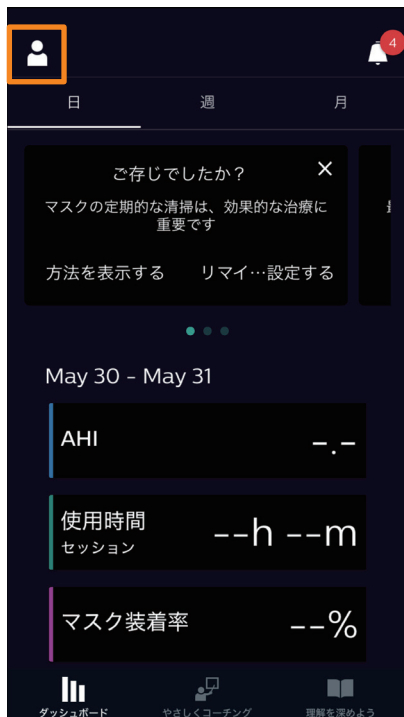


プロフィール画面から「マスク」を押して設定を行います。



お使いのマスクのマスクタイプを選択し、「次へ」を押します。

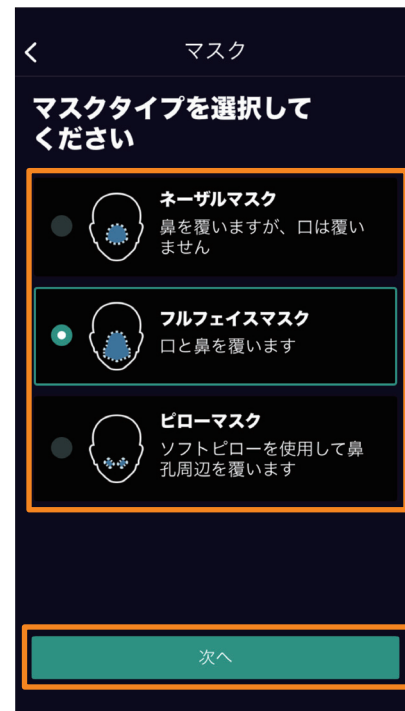

お使いのマスクを一覧から選択し、
「保存」を押すとマスクが保存されます。

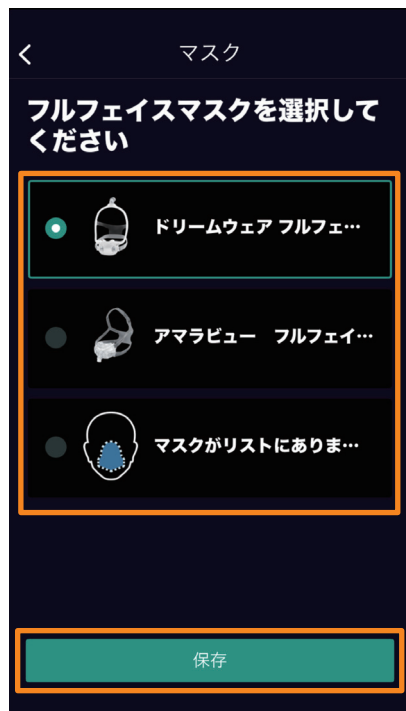

10 ペ어링設定 モバイル端末、または治療器を交換した場合は、再度ペアリングを行なってください。


この操作は、電源が入った状態の
治療器の近くでおこなってください。

アプリと治療器を接続する際は、
Bluetooth®を使用します。
ホーム画面で左上の人型アイコンを
押します。



プロフィール画面で「治療装置」を
押し、次の画面でプライマリ装置に
設定された項目を選びます。

ドリームステーションの場合、治療器側
で、ブルートゥース設定をオンにする
必要があります。


治療器のメインメニュー→ユーザー
設定→ブルートゥースがオンに
なっていることを確認してください。

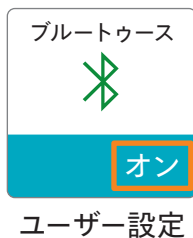

※機器により画面が異なる場合がございます

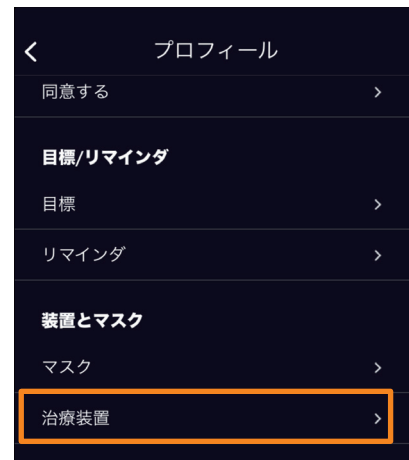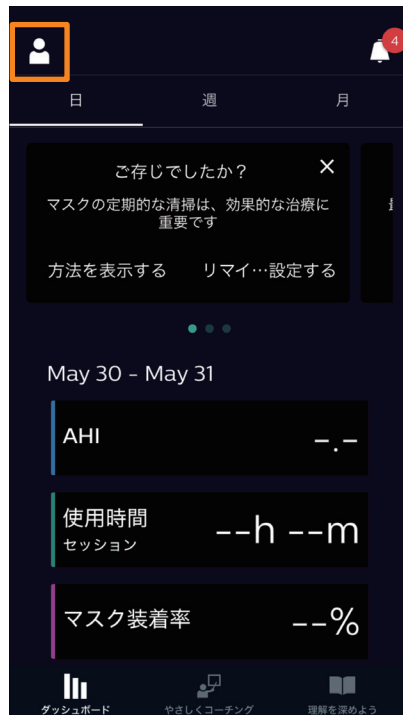

操作にある「この装置をペアリング」を押すとペアリングが開始されます。アプリでデバイスを探す許可を求められた場合は「許可」を押します。

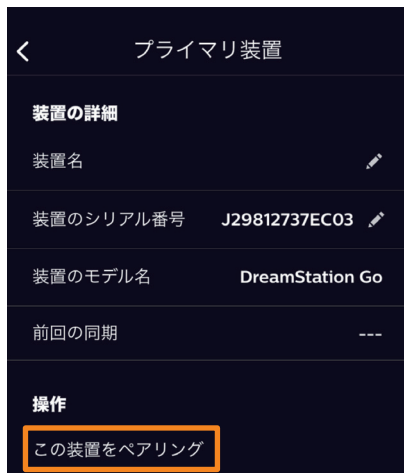

セットアップ画面が表示されますのでプライバシー通知をオンにして「続行」を押します。



治療器に表示されたコードを入力して「ペアリング」を押します。



ペアリングが完了すると「完了」ボタンが表示されますのでボタンを押してホーム画面に戻ります。





製造販売業者

株式会社フィリップス・ジャパン

〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1
麻布台ヒルズ森JPタワー15階

www.philips.co.jp/healthcare

睡眠・呼吸製品のお問い合わせは地域の事業所まで
※各事業所の連絡先は以下のURLで公開しています
www.philips.co.jp/SRC-Office

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくはお近くの事業所までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

© 2025 Koninklijke Philips N.V. PN 1127981/250801 R15-W