

PHILIPS



マスク及びCPAP付属品の使い方

ドリームウェア フルフェイスマスク

DreamWear Fullface mask

- ※ 本書は取扱説明書に代わるものではありません。必ず添付文書および取扱説明書をご覧ください。
- ※ フィルタの交換・取り付けはご使用の機器を確認し、裏面の「5.フィルタの取り付け方法」の項を参照しながら行ってください。
- ※ ご不明な点がございましたら、最終ページのお客コールセンターまでお問い合わせください。

マスク装着方法の動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから

各端末から右記の二次元コードを読み取り動画へ



パソコンから



フィリップス

検索

philips.co.jp のトップページ上部メニューにある「健康」を開き「患者さま向け機器取り扱い資料」の下にある「DreamFamily」をクリック

ヘッドギアとマスクの名称

＊呼気ポート付きマイクロエルボ、外気取入口（左右）および呼気ポートは塞がないでください。

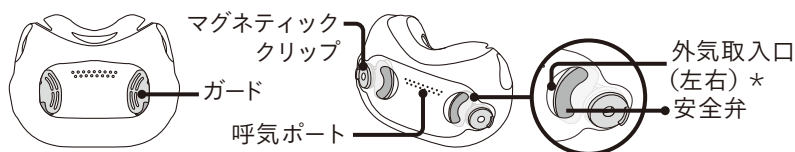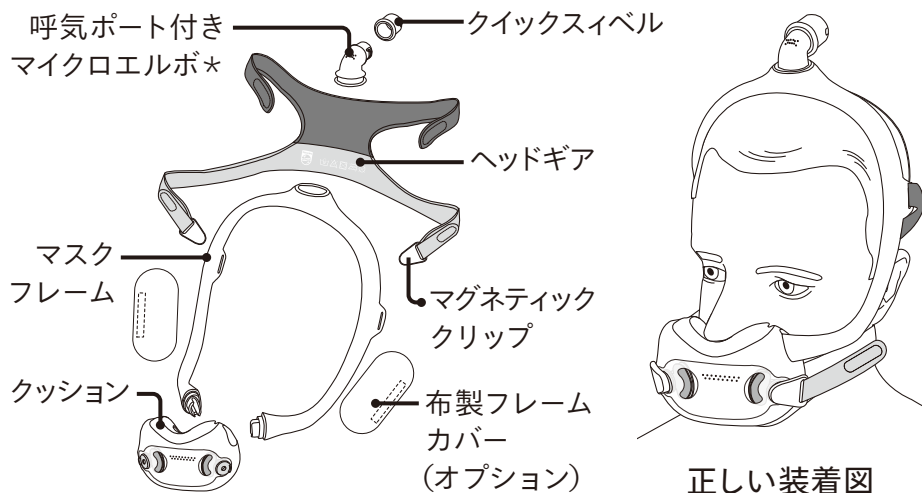

1 マスク装着の手順（1）

マスクを組み立て、クッションを鼻の下に当てます。

フレームを頭の上に配置します。



① マスク装着の手順 (2)

ヘッドギアを後頭部にかかるように
取り付けます。

呼気ポート付きエルボが頭頂部に来
ていることを確認してください。



マグネティッククリップをマスクの
クッションに取り付けます。

ヘッドギアのタブをはがし、締めすぎない
ように注意しながら長さを調整します。



マスクを取り外す際は、クッションを
つかみ、鼻から前方に引き離して
マグネット式クリップを外します。

次に、クッションとマスクを引き上げて
頭から外します。





2 トラブルと対処法

マスクが頬に食い込んでいる場合



ヘッドギアを締めすぎていませんか？

ヘッドギアと頬の間に指が1本入る程度に緩めます。

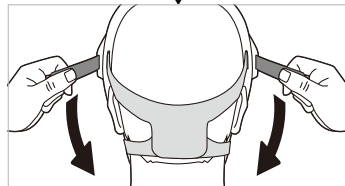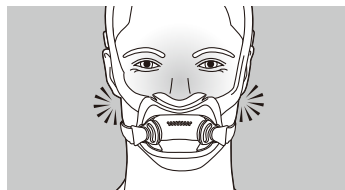



マスクフレームが耳にかぶる場合

マスクフレームが後方に傾き、耳にかぶる場合は、より小さいサイズのマスクフレームをおすすめします。

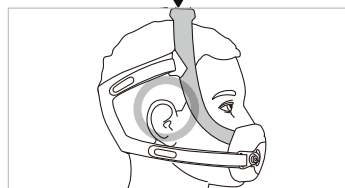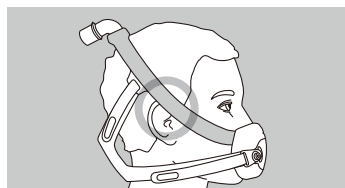









マスクフレームが目付近に近すぎる場合

マスクフレームが頭の前方に傾き、目に近すぎる場合は、より大きいサイズのマスクフレームをおすすめします。

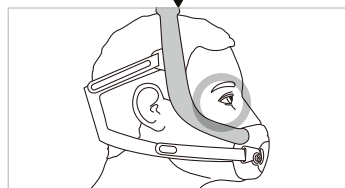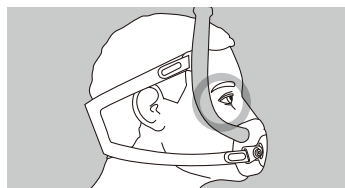

3

マスクの分解／組み立て

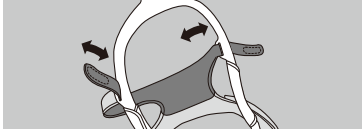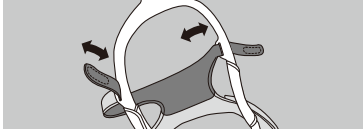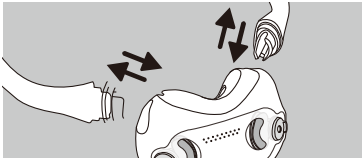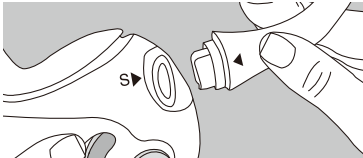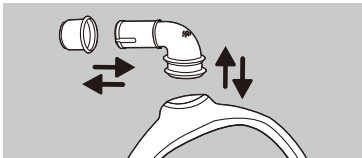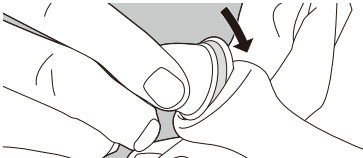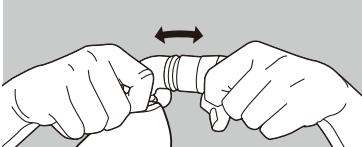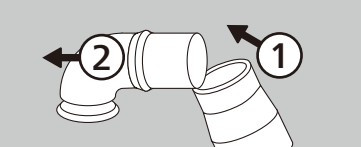部品名	分 解	組み立て
ヘッドギア	ヘッドギアタブを外し、マグネティッククリップを回して取り外します。 	ヘッドギアをマスクフレームのスロットに通します。 
クッション	クッションをマスクフレームから取り外します。 	所定の位置に「カチッ」とはまるまでマスクフレームに差し込みます。 
呼吸ポート付き マイクロ エルボ	マスクフレームから呼吸ポート付きマイクロエルボを取り外します。 	マスクフレーム上部に、ななめから溝に合わせて差し込みます。 
マスクと回路 の接合部	マスクと回路の根元を持ち、接続部を直角に折り曲げるようにして外します。* 	スイベルに回路を覆うようにあてて奥まで差し込みます。 


*回路にスイベルが残っていないことを確認してください

スイベルが回路に残っているとマスク交換の際に接続できないことがあります。

4

付属品のお手入れ方法

(呼吸回路、水タンク、花粉フィルタはマスクの付属品ではありません)

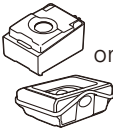頻度	付属品名	洗浄方法・交換
毎日	マスク 	各部品を分解し、中性洗剤を薄めたぬるま湯で洗浄します。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。
	マグネティッククリップ 	クリップはすすいだあと水分を拭き取ってください。
1週間	呼吸回路 	中性洗剤をうすめたぬるま湯で、洗います。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。
	水タンク+水タンク用パッキン  or 	中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水ですすぎます。乾いた布などで水気を拭き取り陰干しします。
	ヘッドギア 	マスクからはずして中性洗剤をうすめたぬるま湯にひたし、5分間おきます。
1ヶ月	花粉フィルタ 	必ず乾いた花粉フィルタと交換します。使用後は中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水でよくすすいだあと風通しのよい所で陰干しします。




注意

付属品（マスク・回路など）の

お手入れをする際は、以下のことをお守りください。


- ・ベンジン、アルコール、塩素系洗剤は使用しない。
- ・日当りの良い場所で干さない。

5 フィルタの取り付け方法

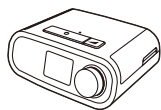

ドリーム
ステーション

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際は
右図の順でセットします。

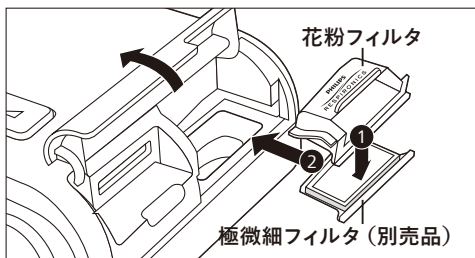

ドリームステーションの取り扱い方法を解説した動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから

各端末から右記の二次元コードを
読み取り動画へアクセス




パソコンから

フィリップス



検索

philips.co.jp のトップページ上部メニューにある「健康」
を開き「患者さま向け機器取り扱い資料」の下にある
「DreamFamily」をクリック

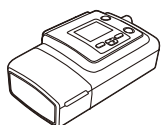


BiPAP A40システム
シルバースシリーズ

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際は
右図の順でセットします。

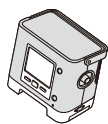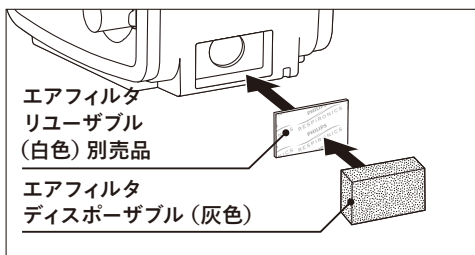

トリロジー
トリロジー plusシリーズ

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際は
右図の順でセットします。

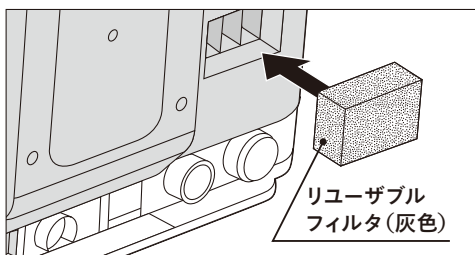

マグネティッククリップについてご注意ください

- 動作中の医療機器（特にペースメーカー、除細動器、人工内耳などの植込型機器）、ニッケル・鉄などの磁性金属から5cm以上離して使用してください。
- 磁気共鳴画像（MRI）装置の内部または近くでは使用しないでください。



CPAP装置をお使いの方

CPAPお客様コールセンター

よるは よいこきゅう

0120-48-4159

受付時間 7:00～22:00 年中無休 365日対応

販売名: ドリームウェア フルフェイスマスク
製造販売届出番号: 13B1X00221000121
一般医療機器 一般的名称: 人工呼吸器用マスク

製造販売業者

株式会社フィリップス・ジャパン

〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1

麻布台ヒルズ森JPタワー15階

www.philips.co.jp/healthcare

睡眠・呼吸製品のお問い合わせは地域の事業所まで
※各事業所の連絡先は以下のURLで公開しています
www.philips.co.jp/SRC-Office

人工呼吸器をお使いの方

昼間

地域事業所

受付時間 平日9:00～17:30

夜間休日

機器安全センター

0120-633-811

受付時間 平日17:30～翌9:00 土・日・祝祭日

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくはお近くの事業所までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

© 2025 Koninklijke Philips N.V. PN 1140397/250520 R9-FK

